

パーツリスト



NCT-AS

Ver.1


▼改訂履歴

バージョン	改訂年月日	改定内容
Ver. 1	2025年 9月22日	初版


▼ご注意

※ 当機種は新車製作時に特注・改造などのご注文を承っています。
そのため、現在ご使用中の部品とパーツリスト部品が異なる場合がございますので
パーツをご発注時にはご注意願います。


NCT-AS
フレーム部 - 1

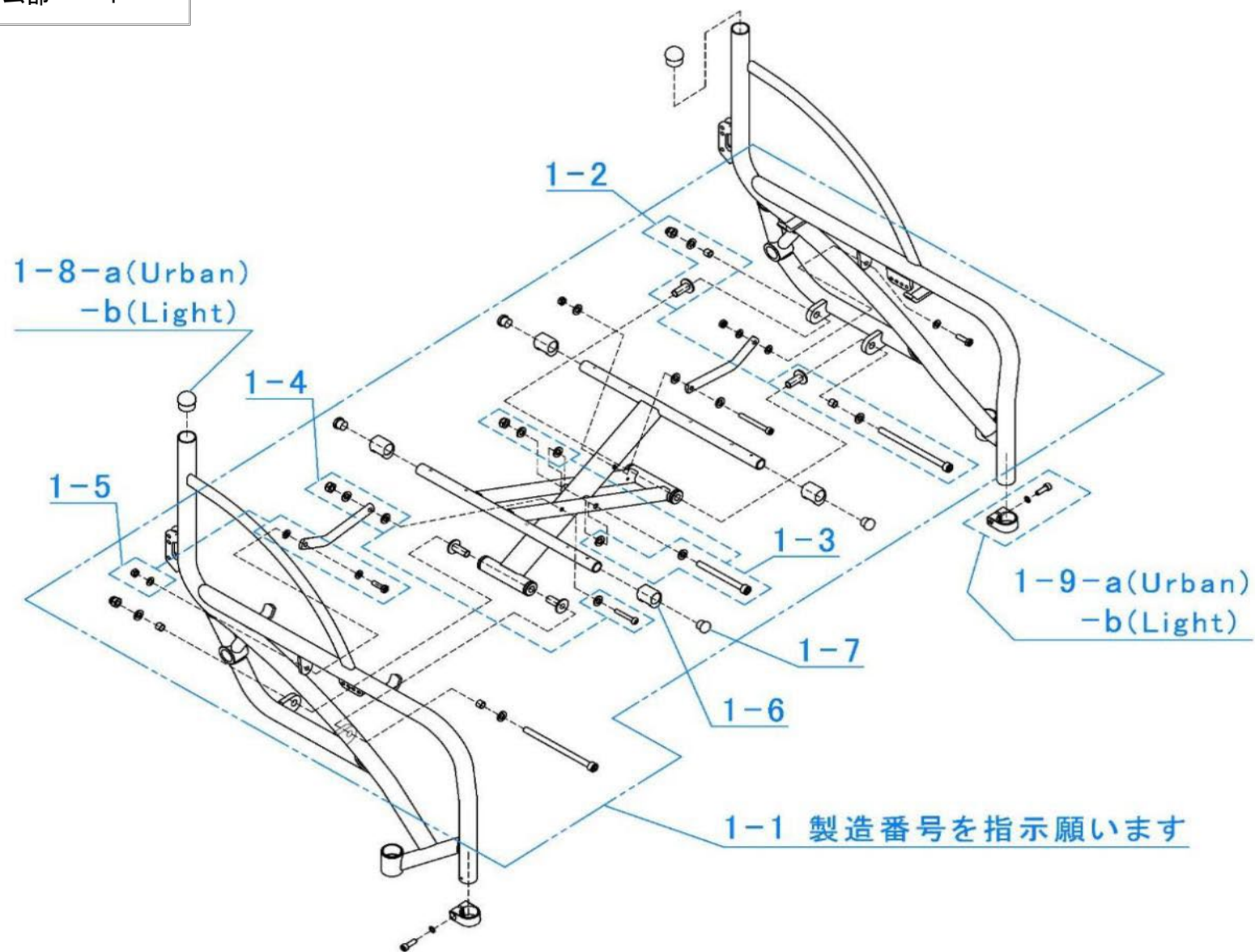

NCT-AS
キャスター部 - 1

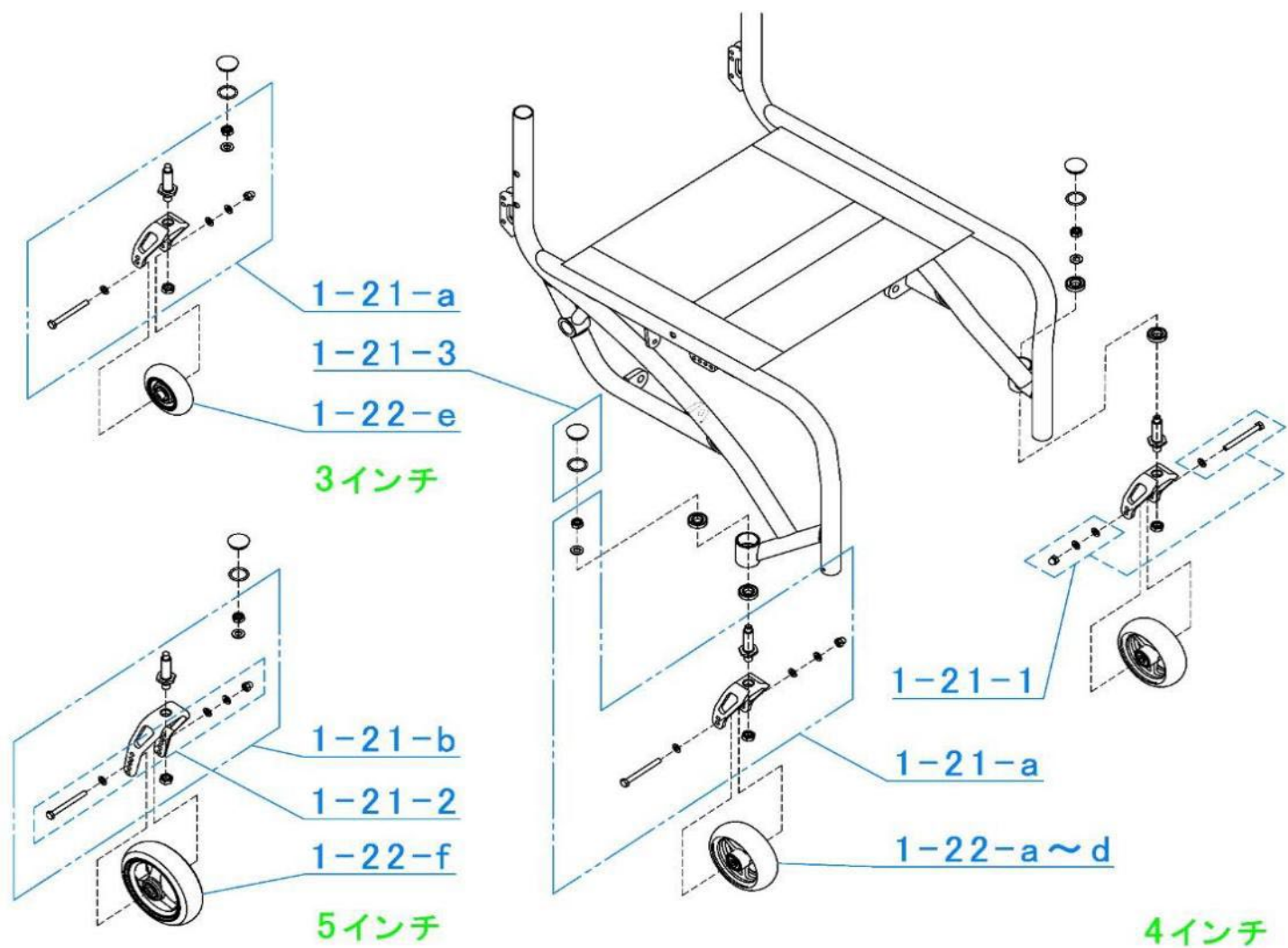



NCT-AS
キャスター部 ー 2

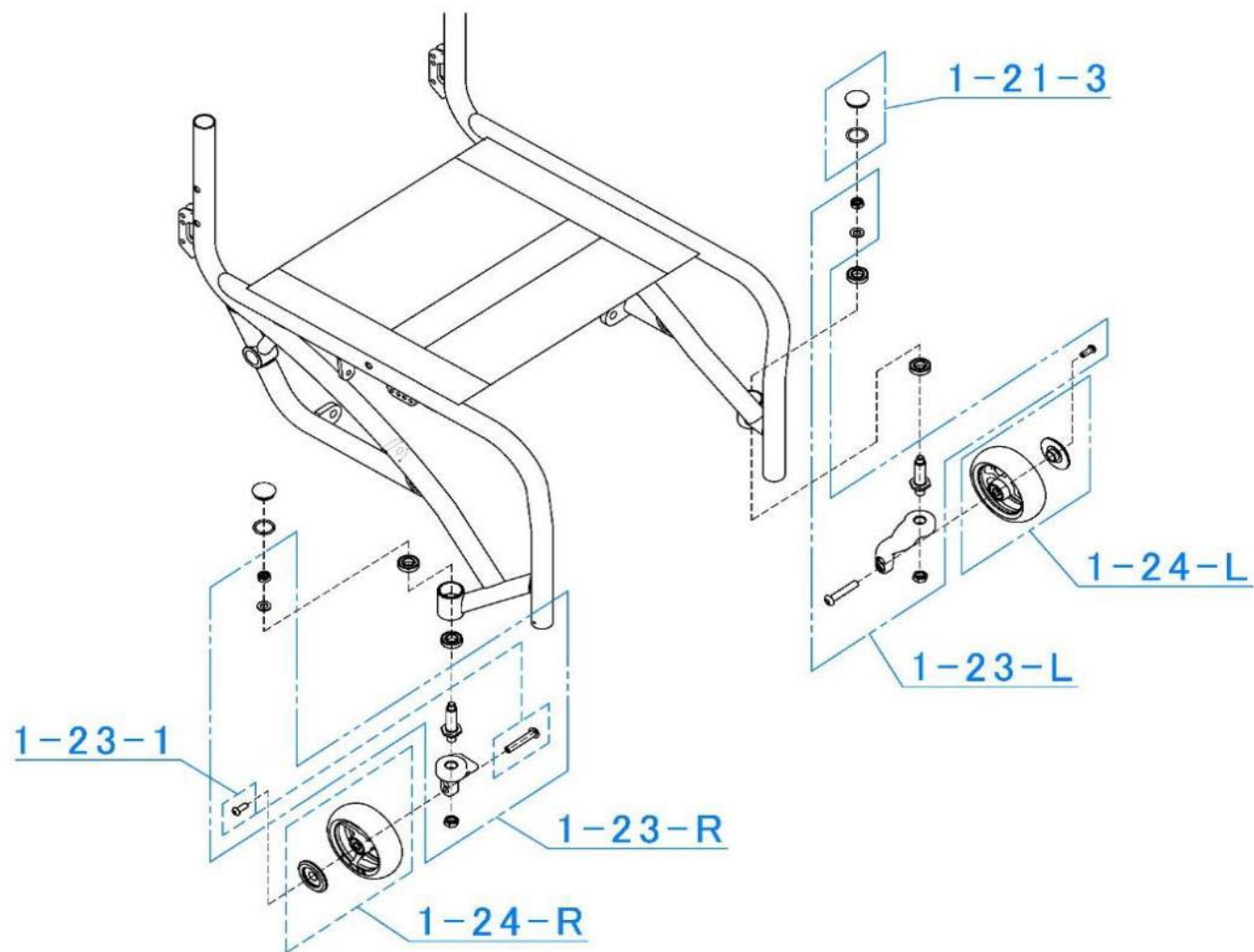


NCT-AS
側板部 - 1

カーボン側板

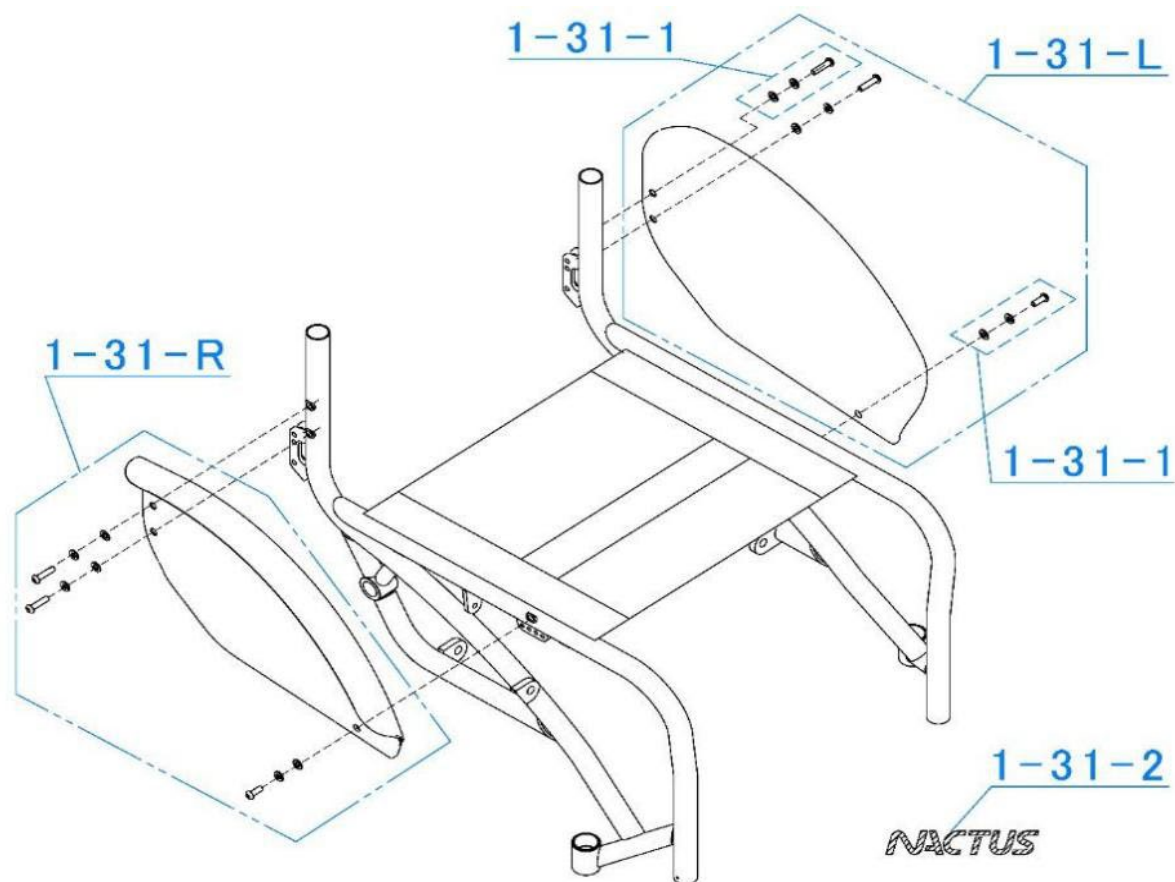


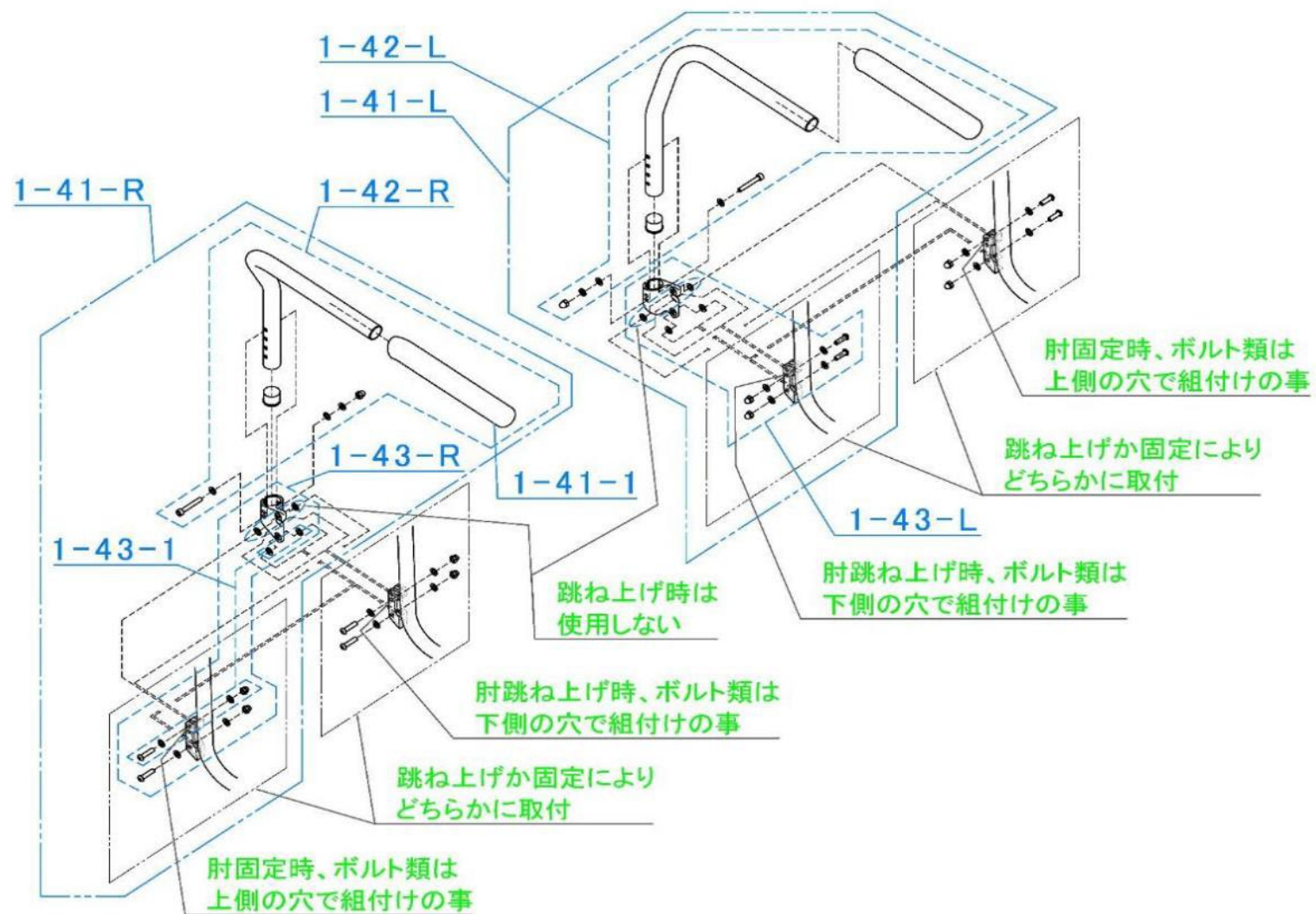


アール押手

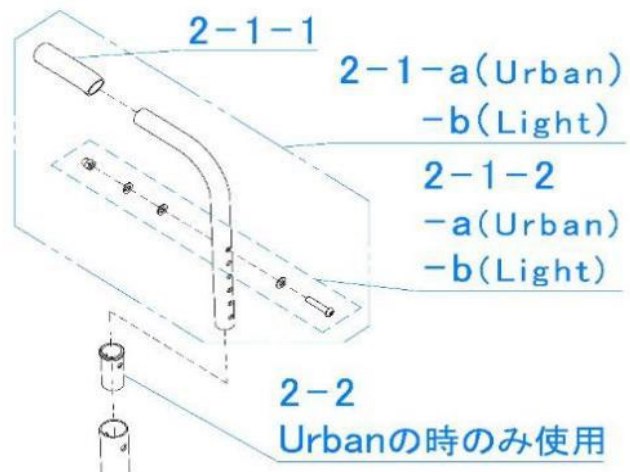


直角押手

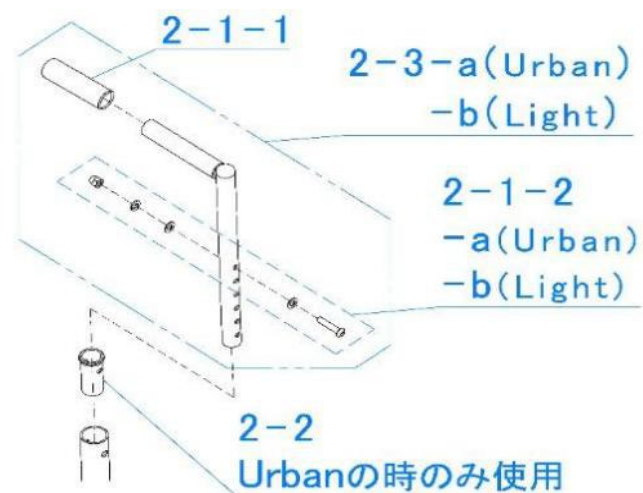


中間押手

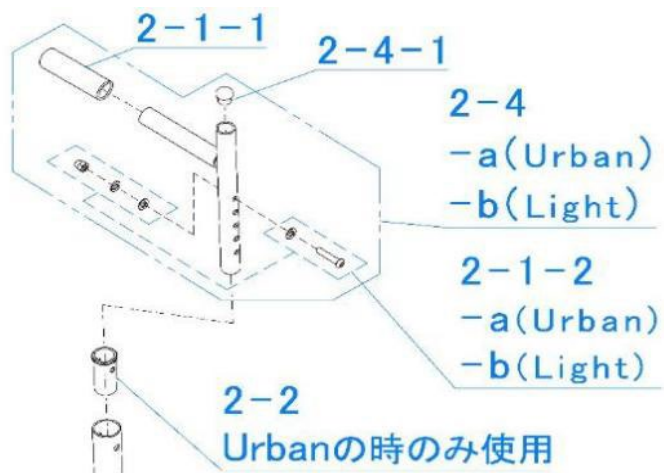


フールディンググリップ

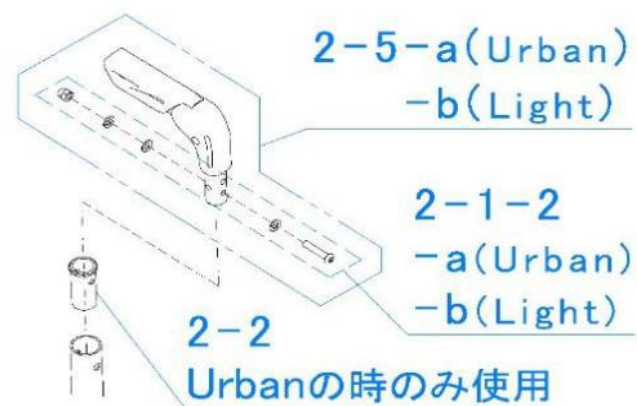


パイプ式中折れ

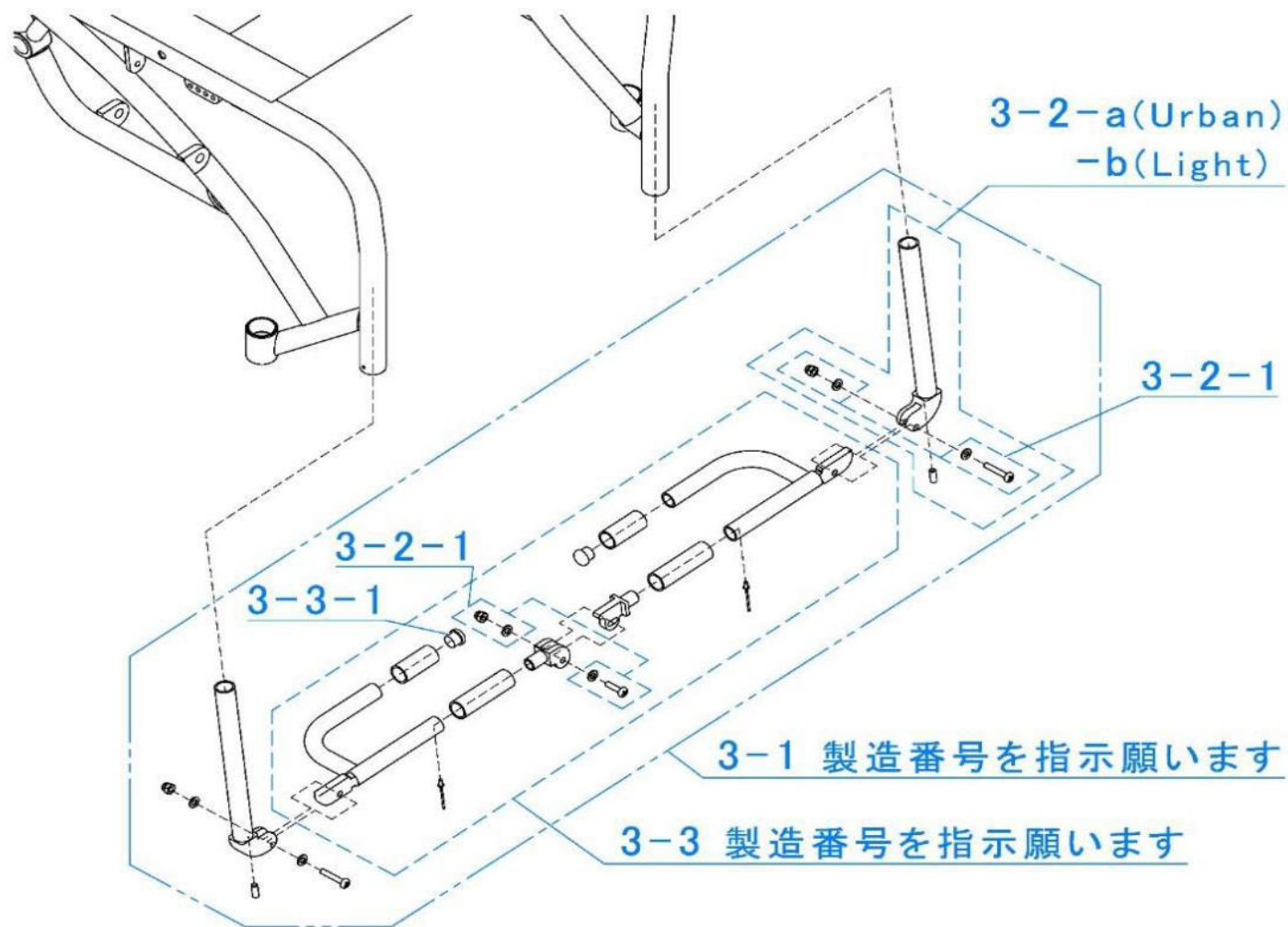


中折れ式

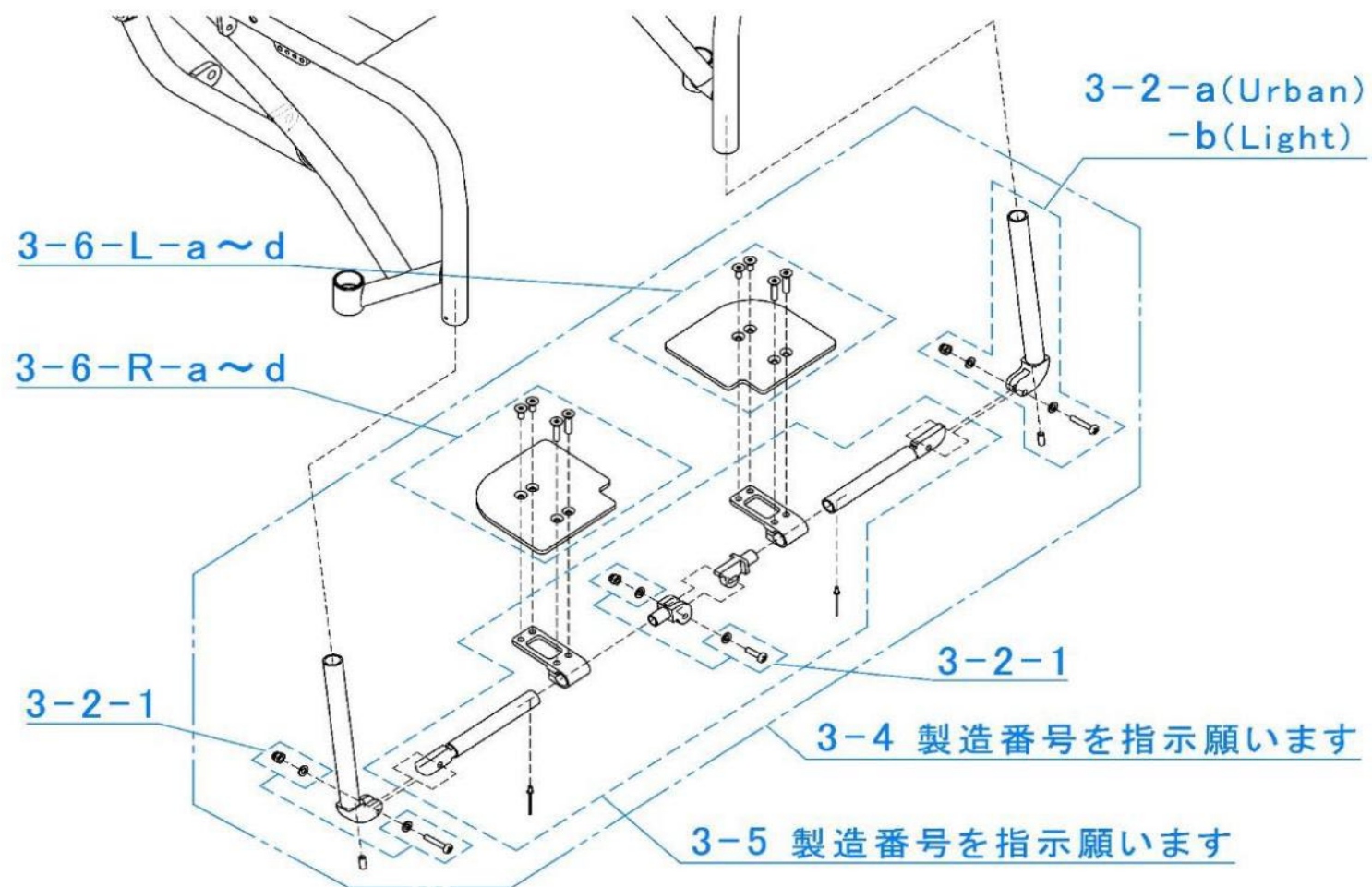

両跳ね式


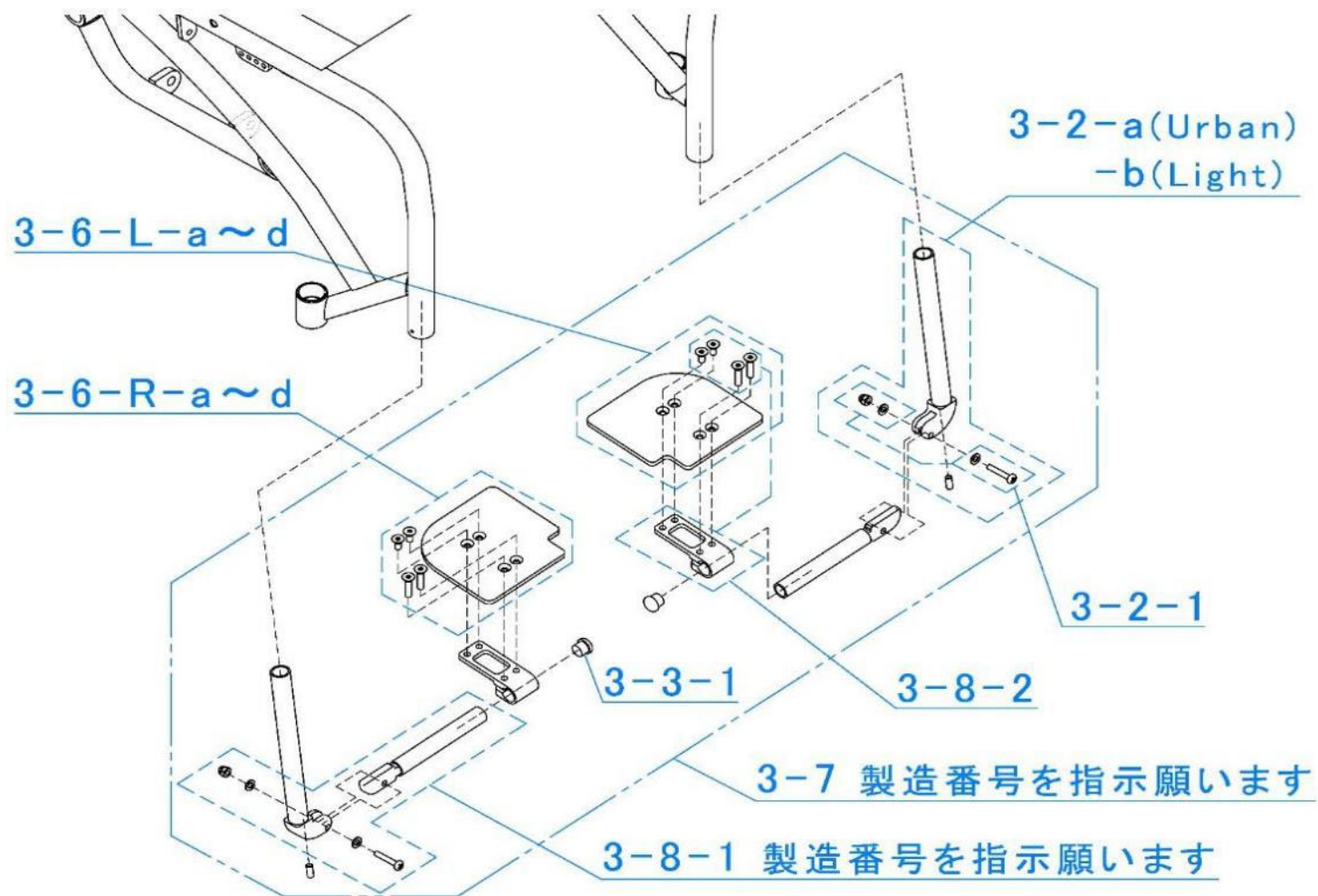


片跳ね式

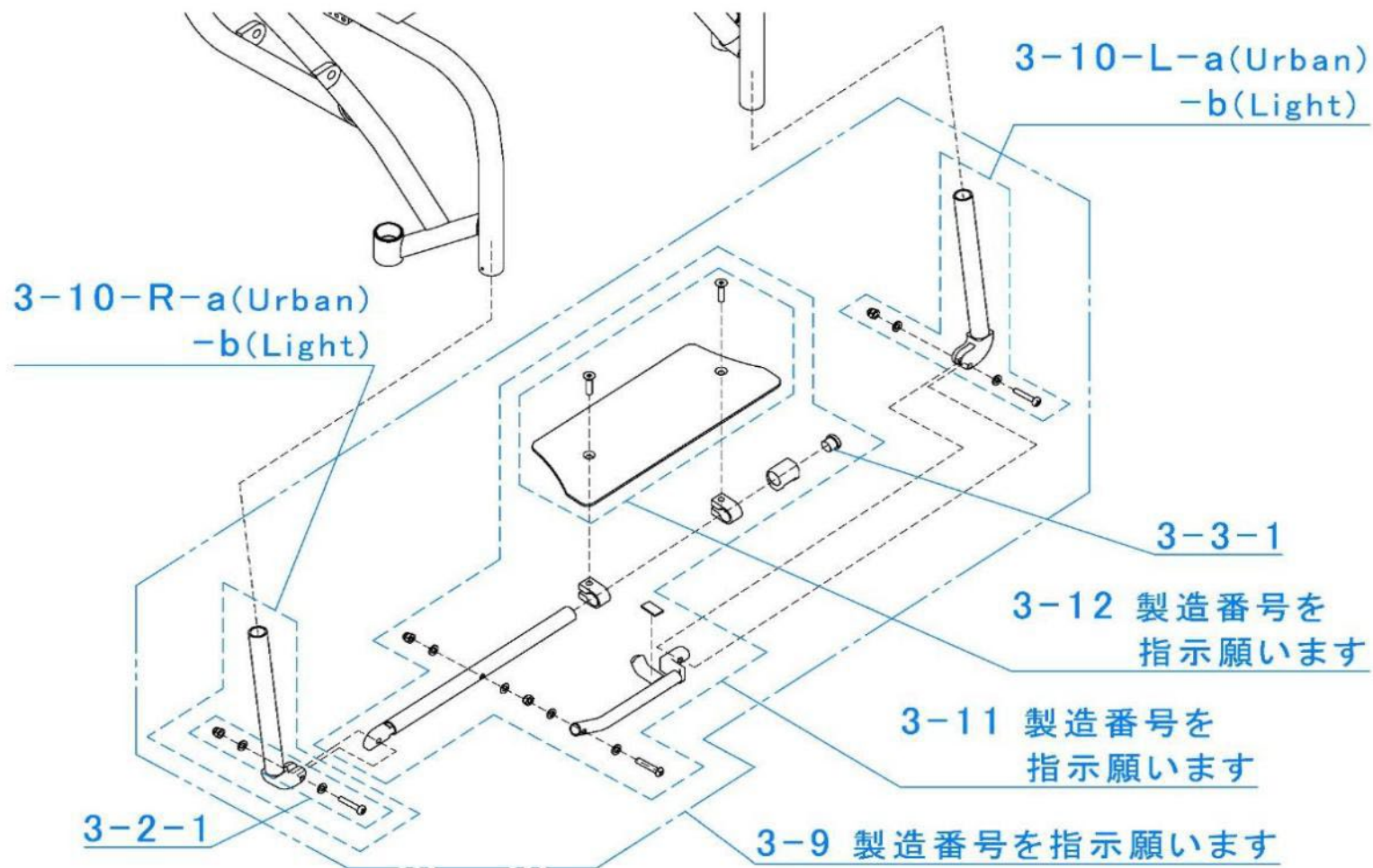


NCT-AS
ブレーキ部 - 1


NCTブレーキ

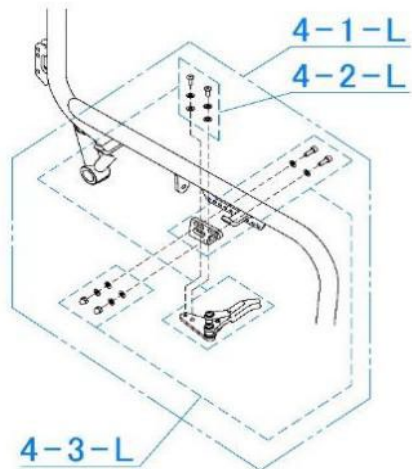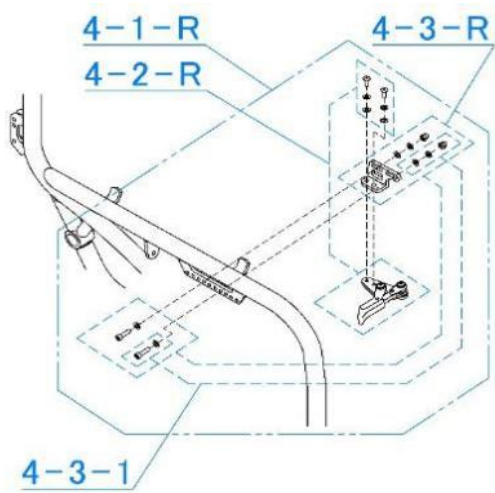


NCTブレーキ+DAアジャスタブル

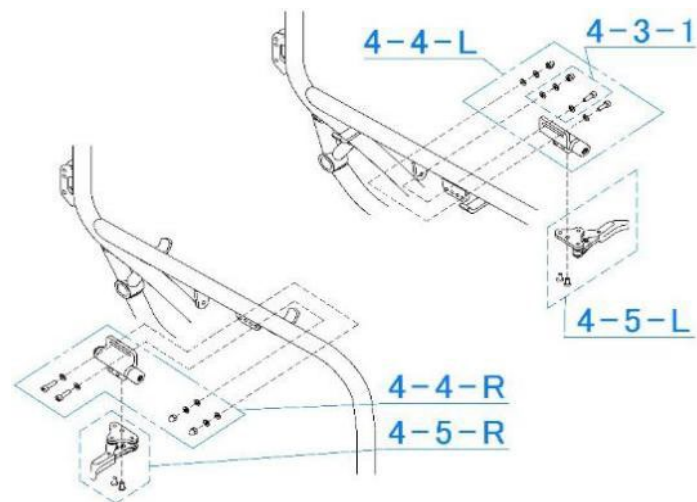


PD4ブレーキ

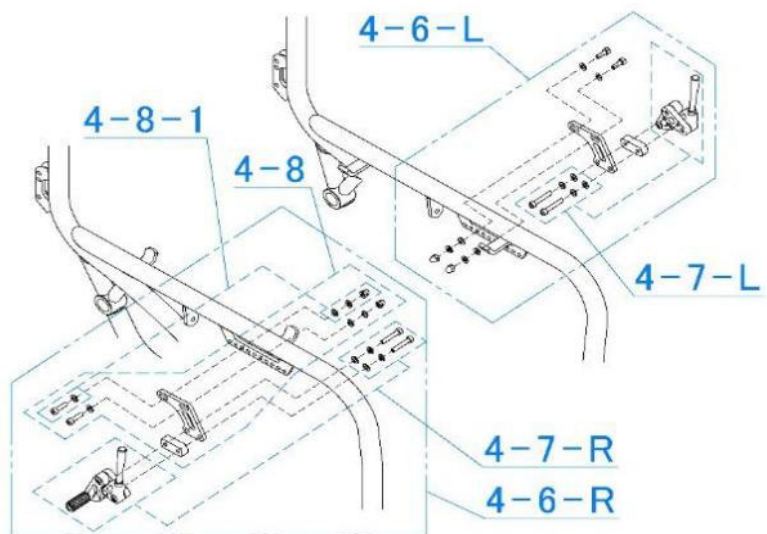






PD4ブレーキ+DAアジャスタブル

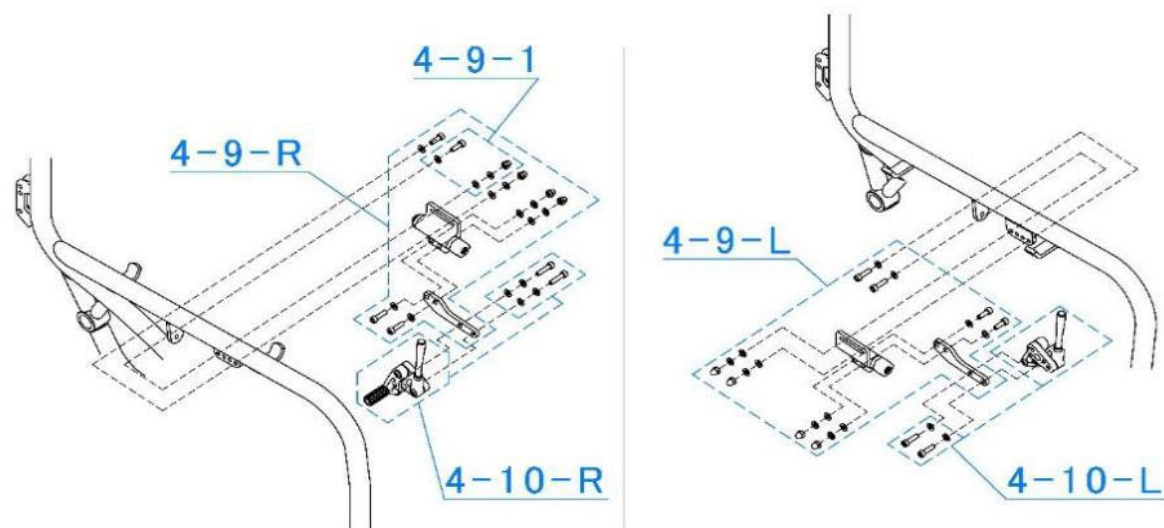


PPSブレーキ

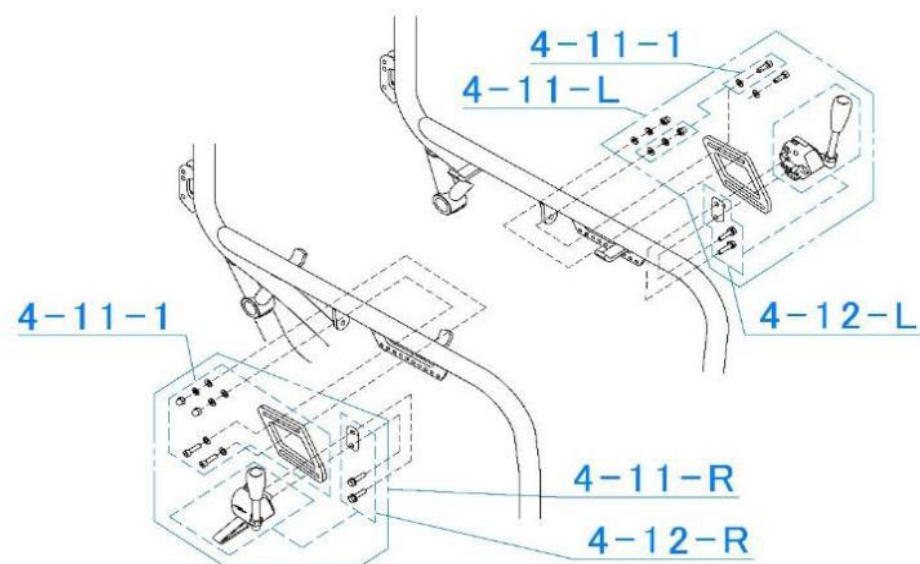



NCT-AS
シート部 - 1

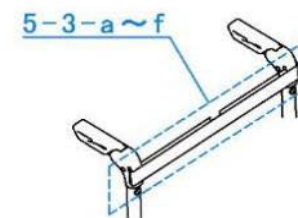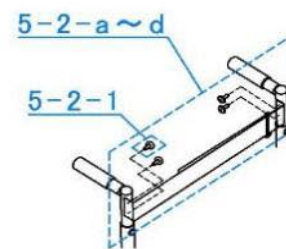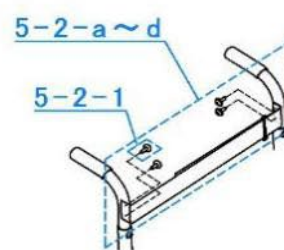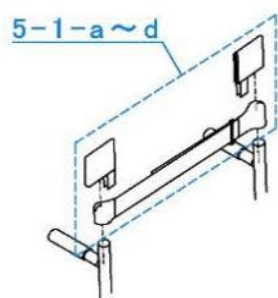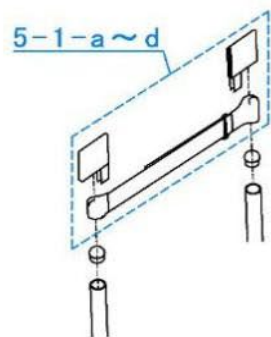


5-5-1-a~d(Urban)
2-a~d(Light)

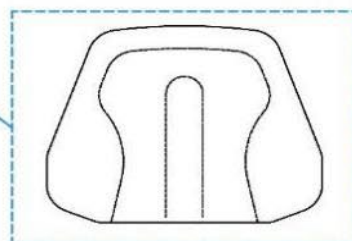


5-6 製造番号を指示願います

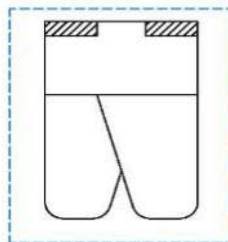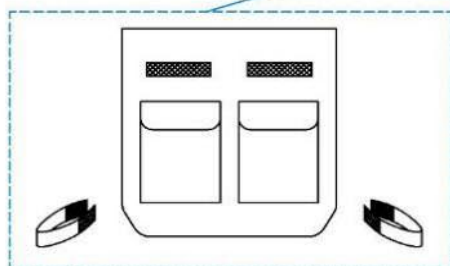

5-4-a~c

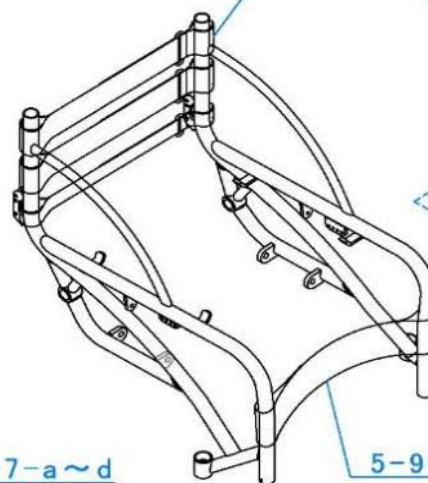

5-8 製造番号を指示願います

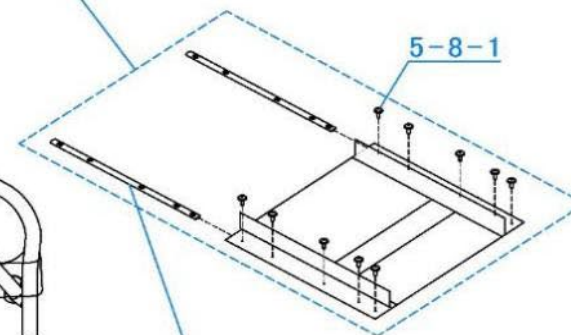


5-8-1

5-9-a~d


5-8-2-a~e

NCT-AS
車輪部 - 1

25-501車輪

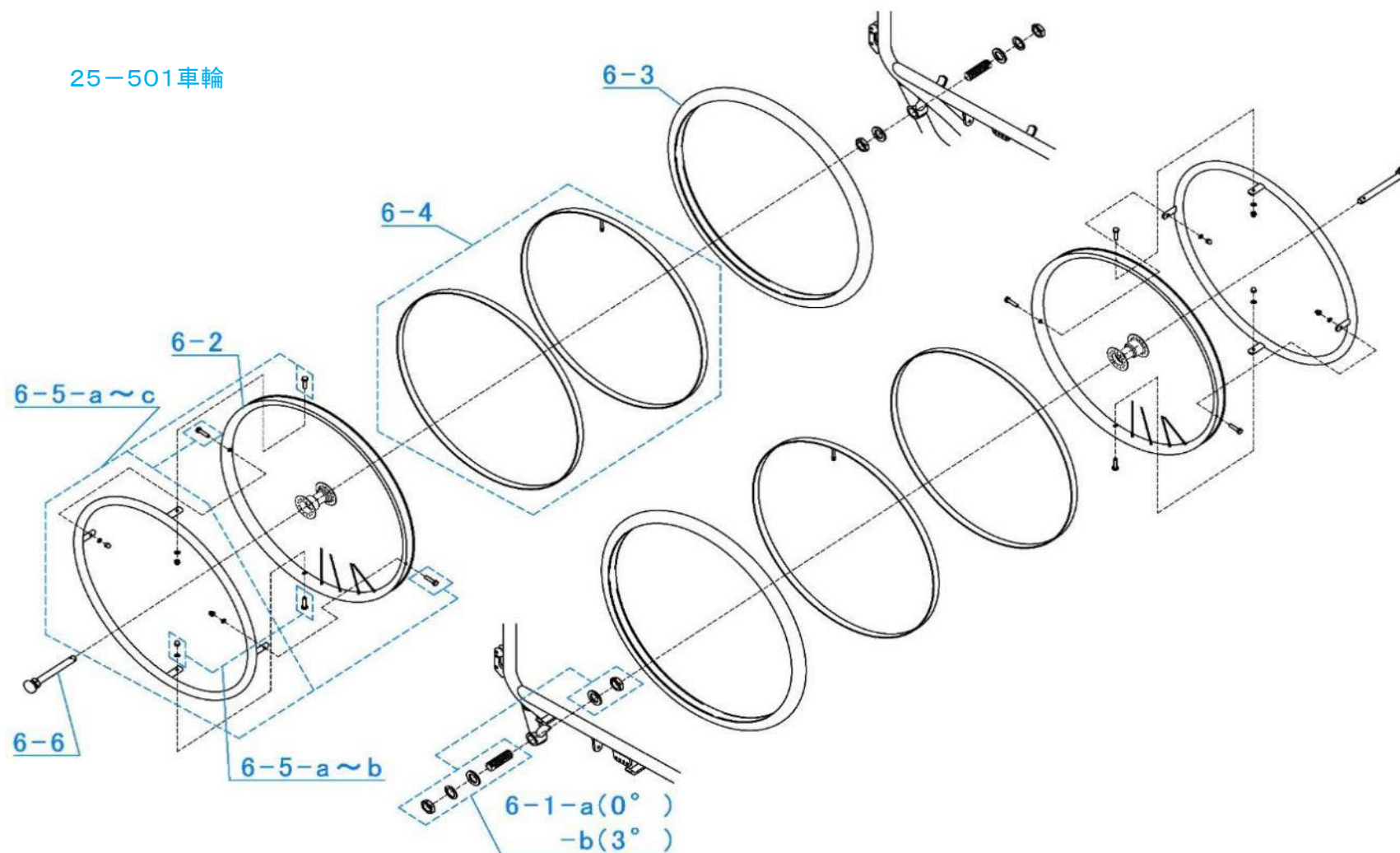

25-540車輪

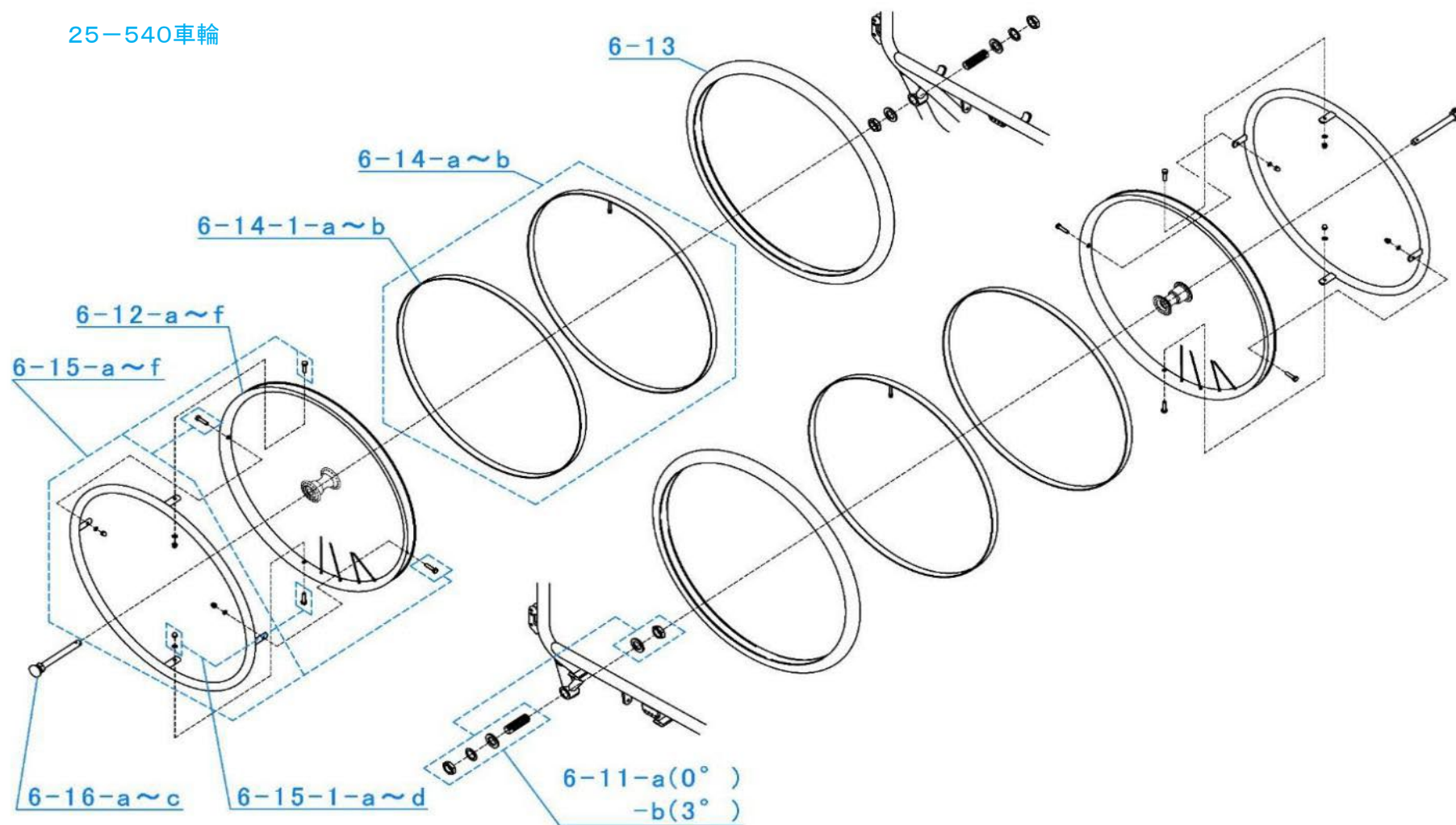

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-1	ABA-0004A	XフレームASSY AS	製造番号を指示願います	VX24-010
1-2	PJI-0200A	エックス/フレーム組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x130、平W、ブッシュ8x10x8(2個)	
			スペーサー(VX3YR010A)(2個)、平W、袋UNT M8 (黒)	
1-3	PJI-0201A	エックスセンター組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x90、平W(4枚)、UNT M8 (黒)	
1-4-R	PJI-0202A	タスキ/エックス組付BTセット 右 SDブレース NCT	十字アブセット胴太 M6x30、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-4-L	PJI-0203A	タスキ/エックス組付BTセット 左 SDブレース NCT	CBT M6x50、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-5	PJI-0045A	タスキ/背パイプ組付けBTセット (胴太M6x21 黒)	十字アブセット胴太 M6x21、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-6	SJA-0038A	エックス受け φ17用		K14-017
1-7	SJB-0022A	キャップ丸中栓J16(黒)		
1-8	SJB-0261A	キャップ半球中栓 Φ25.6-t1.6 黒		
	SJB-0025A	キャップ丸中栓J22(黒)		
1-9-a	PAC-0190A	φ25用クランプ_すり割り式ASSY(M6×25) 黒	CBT(黒) M6x25・小平W M6	VW1XW004A
1-9-b	PAC-0063A	φ22用クランプ_すり割り式ASSY(M6×18) 黒	CBT(黒) M6x18・小平W M6(2枚)	VZ07-040
1-21-a	PGC-0033A	フォークASSY EVO_Aタイプ シャフト短 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC16-004)、NT M10	
			BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-b	PGC-0034A	フォークASSY EVO_Bタイプ S_ワイド シャフト短 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC16-004)、NT M10	
			BT M6xP1.0x70、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-1	PJI-0063A	キャスター車軸用BTセット M6 アルミフォーク(黒)	BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-2	PJI-0054A	キャスター車軸用BTセット M6 黒 5inクッションキャスタ	BT M6xP1.0x70、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-3	AAF-0011A	キャップ キャスターキャップ(VC07-005) 黒	キャップ(VC07-005)、Oリング P-20	
1-22-a	PGB-0054A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広 フォーク内々40mm用	ベアリング、カラー 5A664000(2個)	
1-22-b	PGB-0053A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション(アルミ) フォーク内々40mm用	ベアリング、カラー VC2YY013B(2個)	
1-22-c	PGB-0055A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広(アルミ) フォーク内々40mm用	ベアリング、カラー 5A664000(2個)	
1-22-d	PGB-0069A	キャスタ車輪ASSY 4inライトニングH アルミフォーク	入荷時付属カラー(2個)	
1-22-e	PGB-0051B	キャスタ車輪ASSY 3inクッション アルミフォーク		
1-22-f	PGB-0010A	キャスタ車輪ASSY 5inクッション		
1-23-R	PGC-0035A	フォークASSY 右 SGフォーク シャフト短 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC16-004)、NT M10	
			Locking Screws(φ7.8 L42)、M6x12	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-23-L	PGC-0036A	フォークASSY 左 SGフォーク シャフト短 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC16-004)、NT M10	
			Locking Screws(φ 7.8 L42)、M6x12	
1-23-1	PJI-0205A	キャスター車軸用BTセット M6 SGフォーク	Locking Screws(φ 7.8 L42)、M6x12	
1-24-R	PGB-0071A	キャスタ車輪ASSY 右 4inクッション幅広(SG_黒) ホイルキャップ付		
1-24-L	PGB-0072A	キャスタ車輪ASSY 左 4inクッション幅広(SG_黒) ホイルキャップ付		
1-31-R	PCA-0511A	サイドガード カーボン 右 前後_ナッター 取付BT付	BBT M6x25、平W、SW (黒)(3セット)	
1-31-L	PCA-0512A	サイドガード カーボン 左 前後_ナッター 取付BT付	BBT M6x25、平W、SW (黒)(3セット)	
1-31-1	PJI-0206A	サイドガード取付BTセット カーボン・カーボン調樹脂 後_ナッター式	BBT M6x25、平W、SW (黒)	
1-31-2	SJJ-0082A	ロコシール NACTUS		
1-41-R	AAB-0045A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 右 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-L	AAB-0046A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 左 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-1	PEA-0200A	PVCグリップ φ25 L300		
1-42-R	AAB-0047A	パイプアームサポートASSY 右 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付
1-42-L	AAB-0048A	パイプアームサポートASSY 左 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付
1-43-R	AAB-0038B	パイプアームサポートホルダーASSY 右 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-L	AAB-0039B	パイプアームサポートホルダーASSY 左 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-1	PJI-0208A	パイプアームサポートホルダー取付BTセット	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)	
2-1-a	AAE-0020A	押手パイプASSY アール_φ19_L220 黒 φ25/27取付	グリップ、BBT M6x35、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(003)
2-1-b	AAE-0001A	押手パイプASSY アール_φ19_L220 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(003)
2-1-1	SJB-0408A	グリップ CR-91		
2-1-2-a	PJI-0221A	押手パイプ取付BTセット φ25取付	BBT M6x35、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
2-1-2-b	PJI-0209A	押手パイプ取付BTセット φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
2-2	AAE-0053A	押手取付カラー φ25-φ19 黒		VZ25-001
2-3-a	AAE-0021A	押手パイプASSY 直角_φ19_L190 黒 φ25/27取付	グリップ、BBT M6x35、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-004(001)
2-3-b	AAE-0008A	押手パイプASSY 直角_φ19_L190 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-004(001)
2-4-a	AAE-0022A	押手パイプASSY 中間出し_φ19_L190 黒 φ25/27取付	グリップ、BBT M6x35、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-003(001)

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
2-4-b	AAE-0010A	押手パイプASSY 中間出し_φ19_L190 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-003(001)
2-4-1	SJB-0021A	キャップ 丸中栓J19(黒)		
2-5-a	AAE-0023A	押手パイプASSY フォールディンググリップ φ25/27取付	BBT M6x35、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	67325RA
2-5-b	AAE-0012A	押手パイプASSY フォールディンググリップ φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	67325RA
3-1	AIA-0187A	フットサポートASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-2-a	PIB-0045A	フットサポートホストパイプ D21.6 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)	VF06-005
			袋UNT M6 (黒)、六角穴付きくぼみ先 M6x12	
3-2-b	PIB-0035A	フットサポートホストパイプ D19 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)	VF24-008
			袋UNT M6 (黒)、六角穴付きくぼみ先 M6x12	
3-2-1	PJI-0210A	ステップパイプ取付BTセット 中折れ	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
3-3	AIA-0188A	フットサポート・ステップASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-3-1	SJB-0022A	キャップ 丸中栓J16(黒)		
3-4	AIA-0189A	フットサポートASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-5	AIA-0190A	フットサポート・ステップASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-6-R-a	SIC-0127A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW75 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-R-b	SIC-0117A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-R-c	SIC-0119A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-R-d	SIC-0121A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-L-a	SIC-0128A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW75 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-L-b	SIC-0118A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-L-c	SIC-0120A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-6-L-d	SIC-0122A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	
3-7	AIA-0191A	フットサポートASSY 右左(プレート_両跳ね式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-8-1	PIB-0046A	ステップパイプ 黒 AS 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
			製造番号を指示願います	
3-8-2	PIC-0020A	プレートステップ固定用クランプ 取付BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x25(2本)	
3-9	AIA-0192A	フットサポートASSY 右左(片折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-10-R-a	PIB-0047A	片折れホストパイプ D21.6 右 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF25-001

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
3-10-L-a	PIB-0048A	片折れポストパイプ D21.6 左 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF25-001
3-10-R-b	PIB-0037A	片折れポストパイプ D19 右 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-10-L-b	PIB-0039A	片折れポストパイプ D19 左 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-11	AIA-0193A	フットサポート・ステップASSY 右左(片折れ式) 黒 AS	製造番号を指示願います	
3-12	PIC-0056A	フットサポートプレート 片折れ AS BT付	六角穴付皿BT M6x25(2本)	
			製造番号を指示願います	
4-1-R	AHA-0101A	NCTブレーキ・ステーASSY 右 黒 NCTブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステー取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステー・NCTブレーキ
4-1-L	AHA-0102A	NCTブレーキ・ステーASSY 左 黒 NCTブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステー取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステー・NCTブレーキ
4-2-R	PHA-0283A	NCTブレーキASSY 右 黒 NCTブレーキステー取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-2-L	PHA-0284A	NCTブレーキASSY 左 黒 NCTブレーキステー取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-3-R	AHA-0103A	NCTブレーキステー 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-L	AHA-0104A	NCTブレーキステー 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-1	PJI-0211A	NCTブレーキステー取付BTセット	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)	
4-4-R	AHA-0105A	DAアジャスタブル 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-4-L	AHA-0106A	DAアジャスタブル 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-5-R	PHA-0285A	NCTブレーキASSY 右 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	
4-5-L	PHA-0286A	NCTブレーキASSY 左 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	
4-6-R	AHA-0107A	PD4ブレーキ・ステーASSY 右 ブレーキステー・スペーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB3YR010B、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-6-L	AHA-0108A	PD4ブレーキ・ステーASSY 左 ブレーキステー・スペーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB3YR010B、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-R	PHA-0287A	PD4ブレーキASSY 右 スペーサー(t10)付	スペーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-L	PHA-0288A	PD4ブレーキASSY 左 スペーサー(t10)付	スペーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-8	PHZ-0076A	ブレーキステー VB3YR010 黒 取付BTセット付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-9-R	AHA-0109A	DAアジャスタブル 右 黒 ブレーキステー_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステー、CBT M5x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステー(VB24-024)

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
4-9-L	AHA-0110A	DAアジャスタブル 左 黒 ブレーキステー_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステー、CBT M5x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステー(VB24-024)
4-10-R	PHA-0251A	PD4ブレーキASSY 右	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-10-L	PHA-0252A	PD4ブレーキASSY 左	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-11-R	AHA-0111A	PPSブレーキ・ステーASSY 右 短(黒) ブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステー(VB10-002)
4-11-L	AHA-0112A	PPSブレーキ・ステーASSY 左 短(黒) ブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステー(VB10-002)
4-12-R	PHA-0165C	PPSブレーキASSY_ZN 右 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
4-12-L	PHA-0166C	PPSブレーキASSY_ZN 左 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
5-1-a	PDB-0042A	背インナーベルト・トップASSY パイプエンド 座幅30-32(ベルトL30) 緩衝カバー付	VS09-062(004)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	
5-1-b	PDB-0043A	背インナーベルト・トップASSY パイプエンド 座幅33-36(ベルトL38) 緩衝カバー付	VS09-062(000)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	
5-1-c	PDB-0044A	背インナーベルト・トップASSY パイプエンド 座幅37-40(ベルトL46) 緩衝カバー付	VS09-062(001)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	
5-1-d	PDB-0051A	背インナーベルト・トップASSY パイプエンド 座幅41-44(ベルトL54) 緩衝カバー付	VS09-062(002)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	
5-2-a	PDB-0045A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅36(ベルトL49)	VS24-032A(001) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-b	PDB-0046A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅38(ベルトL51)	VS24-032A(002) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-c	PDB-0047A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅40(ベルトL53)	VS24-032A(003) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-d	PDB-0052A	背インナーベルト・トップASSY 当て式	座幅を指示願います	
5-2-1	PDZ-0011A	座シートビニセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-3-a	SDB-0061A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅30(ベルトL59)	VS24-034(004)	座幅30用
5-3-b	SDB-0062A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅32(ベルトL63)	VS24-034(005)	座幅32用
5-3-c	SDB-0063A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅34(ベルトL67)	VS24-034(006)	座幅34用
5-3-d	SDB-0064A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅36(ベルトL71)	VS24-034(001)	座幅36用
5-3-e	SDB-0065A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅38(ベルトL75)	VS24-034(002)	座幅38用
5-3-f	SDB-0066A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅40(ベルトL79)	VS24-034(003)	座幅40用
5-4-a	SDB-0073A	背インナーベルト 座幅30-32(ベルトL52.5 W2.5)	VS17-021(004)	
5-4-b	SDB-0074A	背インナーベルト 座幅33-36(ベルトL58.5 W2.5)	VS17-021(005)	
5-4-c	SDB-0075A	背インナーベルト 座幅37-40(ベルトL64.5 W2.5)	VS17-021(006)	
5-4-d	SDB-0076A	背インナーベルト 座幅41-44(ベルトL72.5 W2.5)	VS17-021(006)	
5-5-1-a	SDE-0309A	バックサポートクッション Urban 座幅30-32(W45)	VS17-015(000)	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
5-5-1-b	SDE-0296A	バックサポ-トクッション Urban 座幅33-36(W49)	VS17-015(001)	
5-5-1-c	SDE-0297A	バックサポ-トクッション Urban 座幅37-40(W53)	VS17-015(002)	
5-5-1-d	SDE-0310A	バックサポ-トクッション Urban 座幅41-44(W57)	VS17-015(004)	
5-5-2-a	SDE-0313A	バックサポ-トクッション Light 座幅30-32(W45)	VS16-041(000)	
5-5-2-b	SDE-0314A	バックサポ-トクッション Light 座幅33-36(W49)	VS16-041(001)	
5-5-2-c	SDE-0315A	バックサポ-トクッション Light 座幅37-40(W53)	VS16-041(002)	
5-5-2-d	SDE-0316A	バックサポ-トクッション Light 座幅41-44(W57)	VS16-041(003)	
5-6	SDE-0298A	背シートアウター・ポケット NCT モケット インナーベルト2付	座幅、ポケット、フタ仕様を指示願います	インナーベルト2(VS09-059)
5-7-a	SDE-0311A	カバーシート 座幅30-32(W25)	VS09-056(000)	
5-7-b	SDE-0299A	カバーシート 座幅33-36(W28)	VS09-056(001)	
5-7-c	SDE-0300A	カバーシート 座幅37-40(W32)	VS09-056(002)	
5-7-d	SDE-0312A	カバーシート 座幅41-44(W36)	VS09-056(003)	
5-8	PDC-0240A	座シートASSY AS	芯金、ビス付	芯金: VS07-009
			製造番号を指示願います	
5-8-1	PDZ-0011A	座シートビスセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-8-2-a	SDZ-0031A	座シート芯金 鉄 5穴 L320	VS07-009(000)	
5-8-2-b	SDZ-0032A	座シート芯金 鉄 5穴 L340	VS07-009(001)	
5-8-2-c	SDZ-0033A	座シート芯金 鉄 5穴 L360	VS07-009(002)	
5-8-2-d	SDZ-0034A	座シート芯金 鉄 5穴 L380	VS07-009(003)	
5-8-2-e	SDZ-0035A	座シート芯金 鉄 5穴 L400	VS07-009(004)	
5-9-a	SDF-0210A	レックベルト モケット 座幅30-32(L82)	VS09-064(000)	
5-9-b	SDF-0202A	レックベルト モケット 座幅33-36(L86)	VS09-064(001)	
5-9-c	SDF-0203A	レックベルト モケット 座幅37-40(L90)	VS09-064(002)	
5-9-d	SDF-0211A	レックベルト モケット 座幅41-44(L94)	VS09-064(003)	
6-1-a	PFZ-0022A	車軸ソケットASSY ミリ 0°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD20-002
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-1-b	PFZ-0023A	車軸ソケットASSY ミリ 3°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD25-001
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
6-2	PFA-1008A	車輪のみASSY 501 NBK_脱着		
6-3	SFB-0041A	タイヤ ニュートロスベックS 25-501		
6-4	PFC-0017A	チューブ ニュートロン 25-501 英式		
6-5-a	PFG-0033A	ハンドリム アルミφ19 501 NBK シルバー	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-b	PFG-0034A	ハンドリム ステンφ19_ビニールコーティング 501 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-c	PFG-0035A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 501 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-1-a	PJI-0004A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x10)	6角アプセットM5x10、平W、SW・袋NT M5	NBK:ステン・ビニールコーティング
6-5-1-b	PJI-0212A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x12)	6角アプセットM5x12、平W、SW・袋NT M5	NBK:アルミφ19
6-6	AFE-0101B	着脱車軸 B1	NBK 25-501着脱	
6-11-a	PFZ-0018A	車軸ソケットASSY インチ 0°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD2YR029A
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-11-b	PFZ-0019A	車軸ソケットASSY インチ 3°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD10-006
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-12-a	PFA-1002A	車輪のみASSY 540 TW_脱着		
6-12-b	PFA-1003A	車輪のみASSY 540 スピナジー・エブリデー	黒・白	
6-12-c	PFA-1004A	車輪のみASSY 540 スピナジー・SPORT	黒・青・黄	
6-12-d	PFA-1005A	車輪のみASSY 540 スピナジー・ライトエクストリームLight	黒・白・赤・橙	
6-12-e	PFA-1006A	車輪のみASSY 540 ライトホイール		
6-12-f	PFA-1007A	車輪のみASSY 540 ミスノ・フルカーボンホイール ハンドリム付		
6-13	SFB-0045A	タイヤ ニュートロスベックS2 23-540 グレー		
6-14	PFC-0020A	チューブ ニュートロン 20~25-540 米式		
6-14-1	PFC-0109A	リムテープ ターボリン 540		
6-15-a	PFG-0027A	ハンドリム アルミφ19 540 TW シルバー	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-b	PFG-0028A	ハンドリム ステンφ19_ビニールコーティング 540 TW	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-c	PFG-0029A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 TW	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-d	PFG-0030A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-15-e	PFG-0031A	ハンドリム アルミ楕円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-15-f	PFG-0032A	ハンドリム チタン長円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0	取付BTセット付

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
6-15-1-a	PJI-0004A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x10)	6角アプセットM5x10、平W、SW・袋NT M5	TW:ステン・ビニールコーティング
6-15-1-b	PJI-0212A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x12)	6角アプセットM5x12、平W、SW・袋NT M5	TW:アルミφ19
				スピナジー・エブリデー/SPORT:アルミ、チタン
6-15-1-c	PJI-0213A	ハンドリム取付用 BTセット (BBT M5x12)	BBT M5x12、SW、平W	スピナジー・ライト、ライトホイール:チタン
6-15-1-d	PJI-0214A	ハンドリム取付用 BTセット (BBT M5x15)	BBT M5x15、SW、平W	スピナジー・ライト、ライトホイール:アルミ
6-16-a	AFE-0102B	着脱車軸 A1	TW、スピナジー・エブリデー/ライトエクストリーム、ライトホイール	
6-16-b	AFE-0104B	着脱車軸 A2	スピナジー・SPORT	
6-16-c	AFE-0105A	着脱車軸 A3	ミスノ・カーボンホイール	