

パーツリスト



NCT-MS

Ver.2


▼改訂履歴

バージョン	改訂年月日	改定内容
Ver. 1	2025年 9月22日	初版
Ver. 2	2026年3月2日	4-9-R(L) 5-3-a(b/c) 適用修正


▼ご注意

※ 当機種は新車製作時に特注・改造などのご注文を承っています。
そのため、現在ご使用中の部品とパーツリスト部品が異なる場合がございますので
パーツをご発注時にはご注意願います。

NCT-MS
フレーム部 - 1

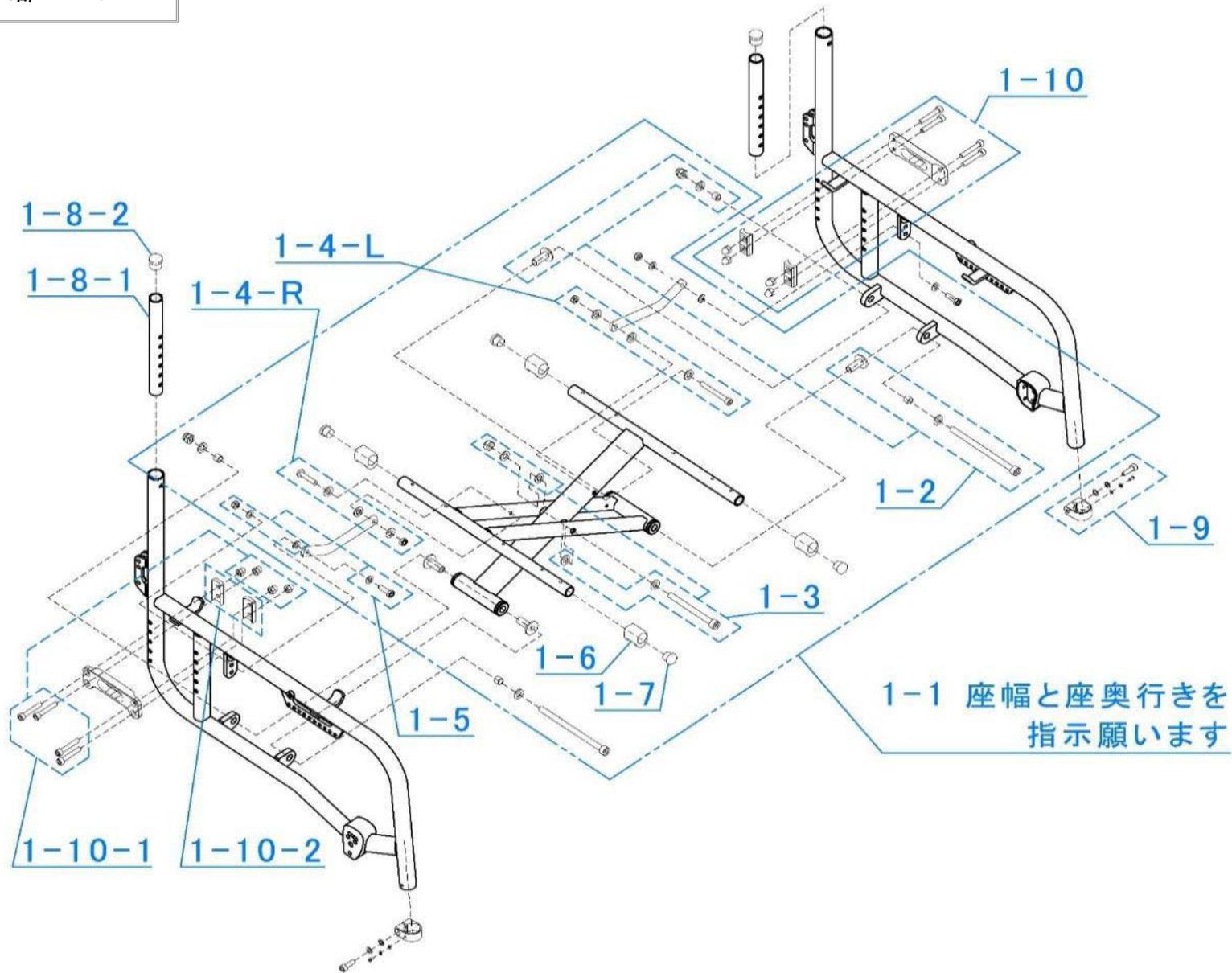


NCT-MS
フレーム部 - 2


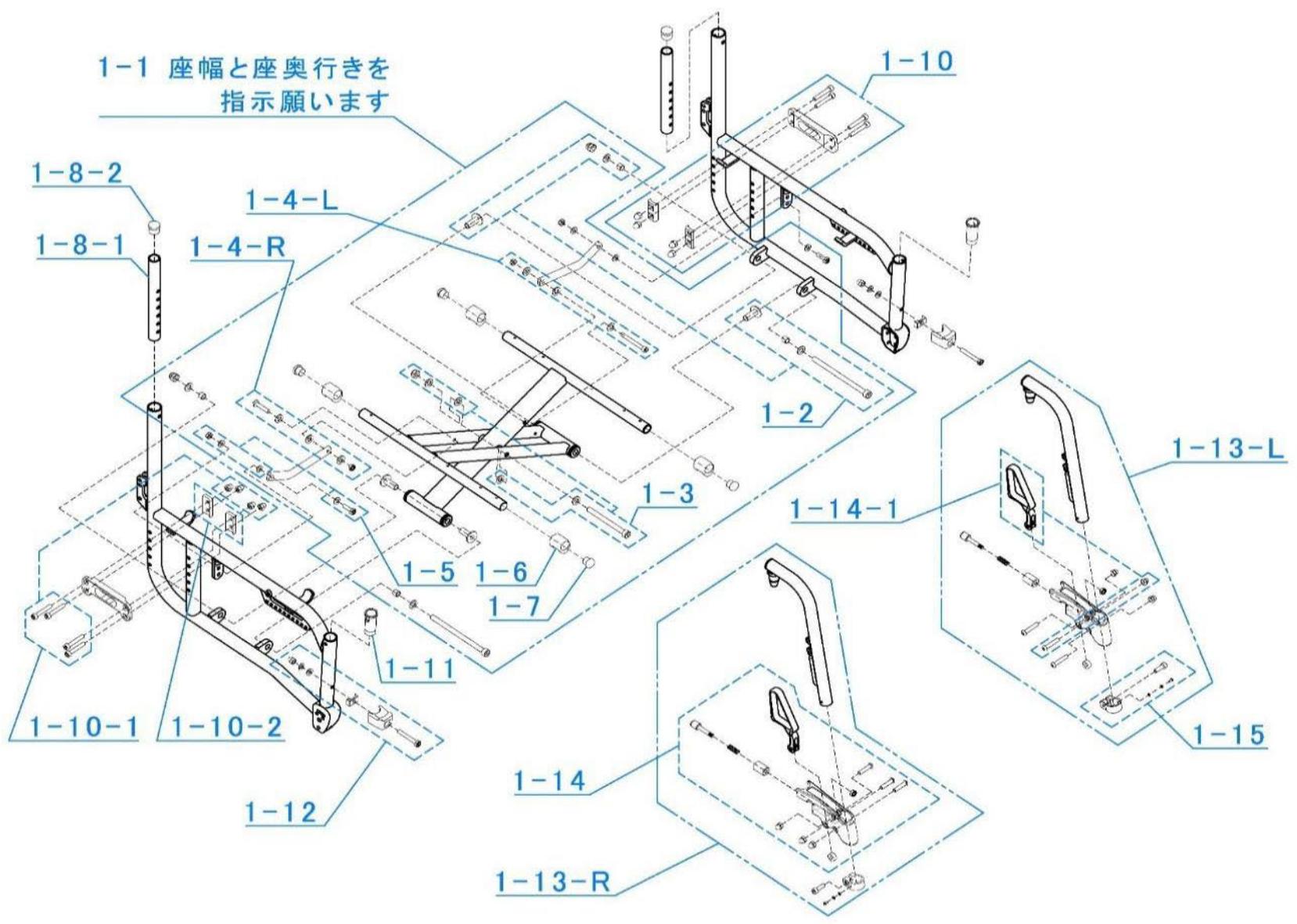


NCT-MS
 キャスター部 - 1

1-21-a(EVOフォーク
 Bタイプ M:ノーマル)
 -b(EVOフォーク
 Bタイプ L:ノーマル)

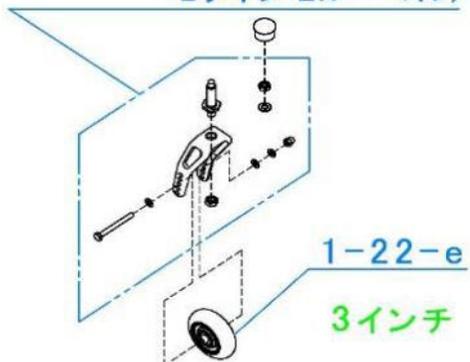


1-21-c(EVOフォーク
 Bタイプ M:ワイド)
 -d(EVOフォーク
 Bタイプ L:ワイド)

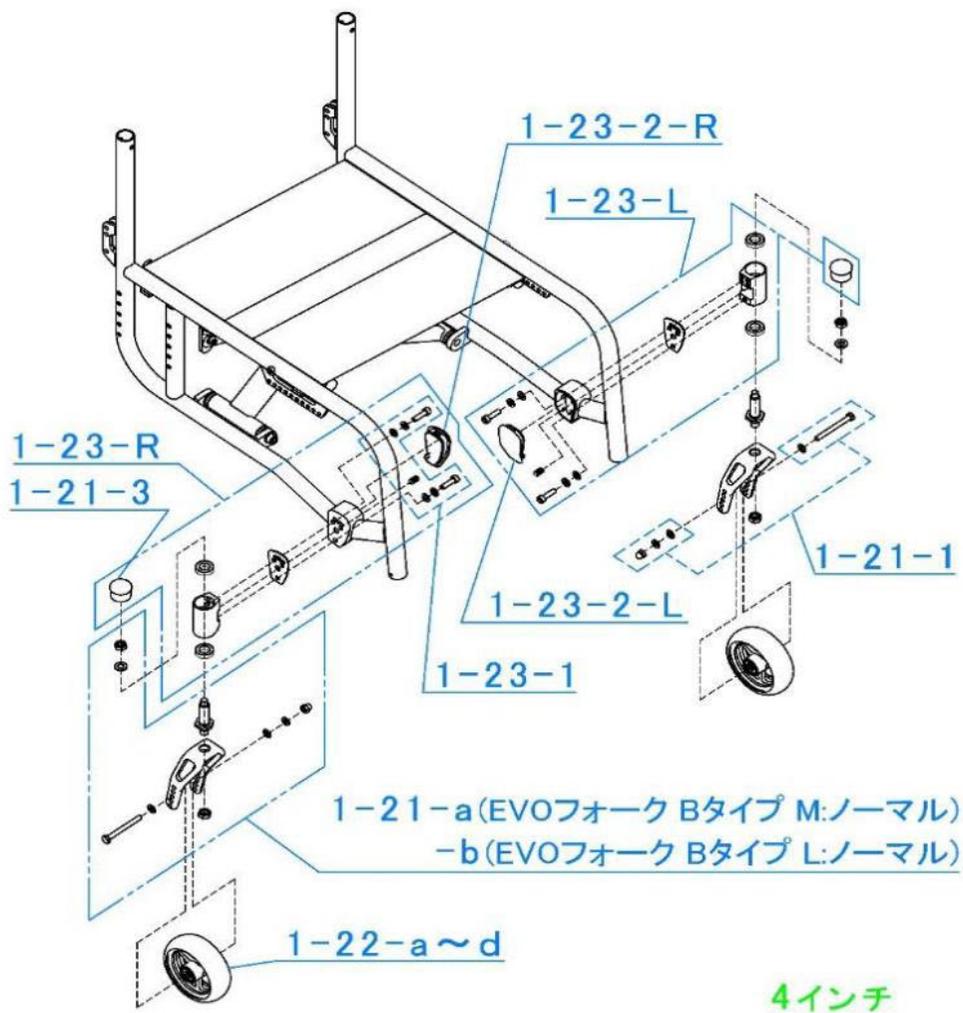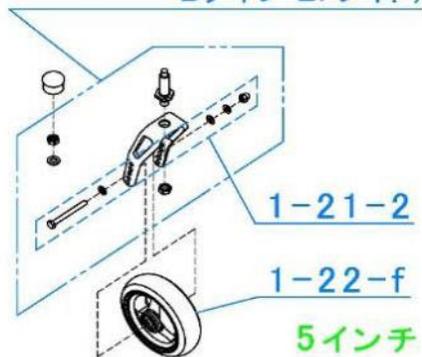


4インチ

NCT-MS
側板部 - 1


カーボン調樹脂側板

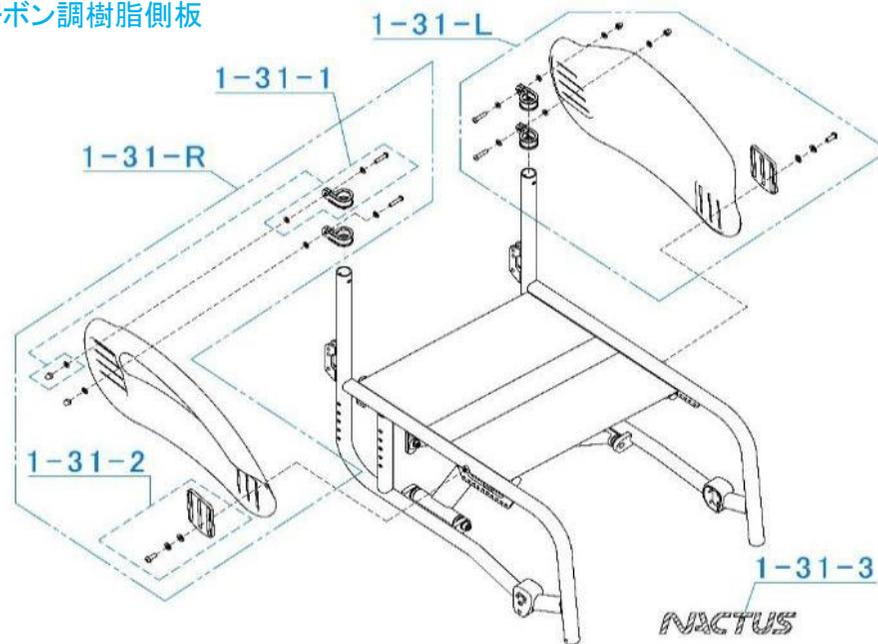


カーボン側板

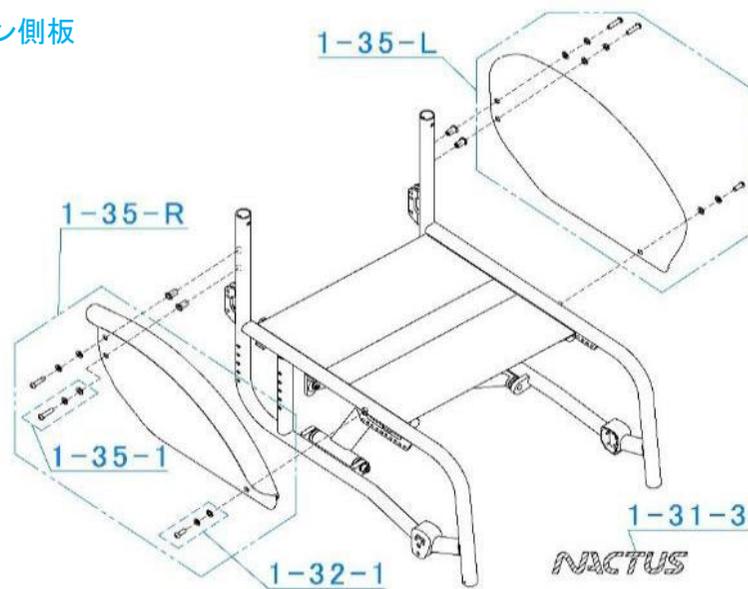


タイヤアール

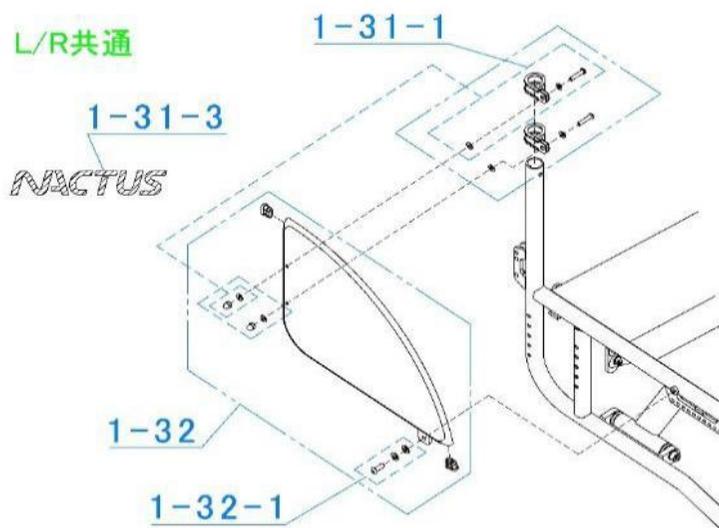


アールデスク

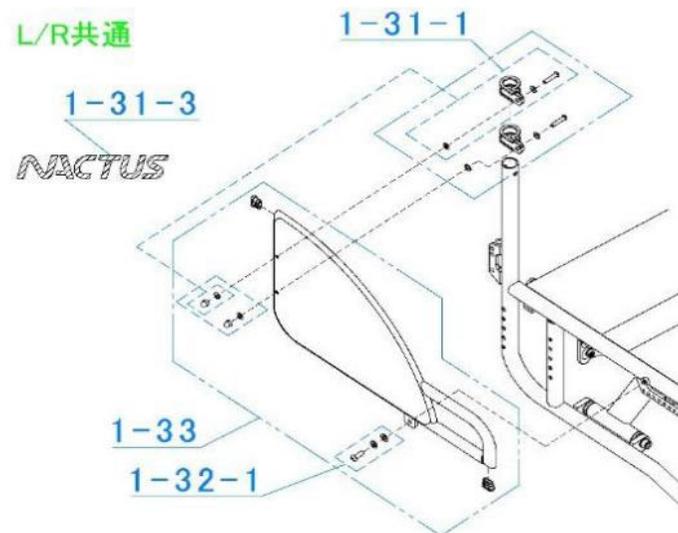


タイヤアール
(アップフレーム)

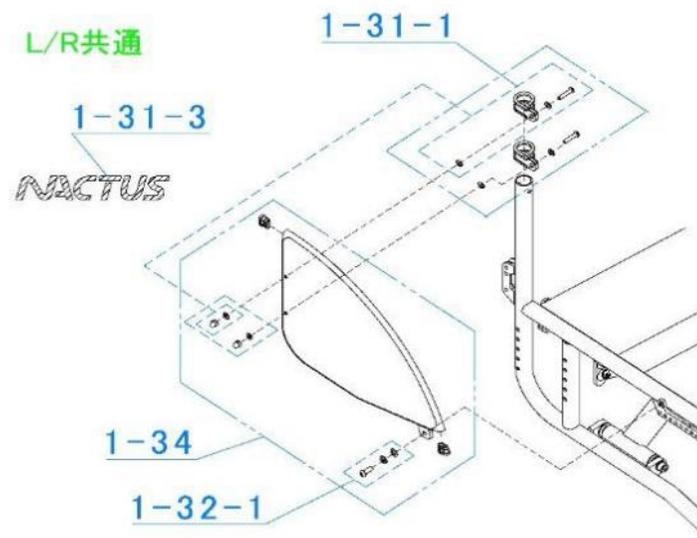


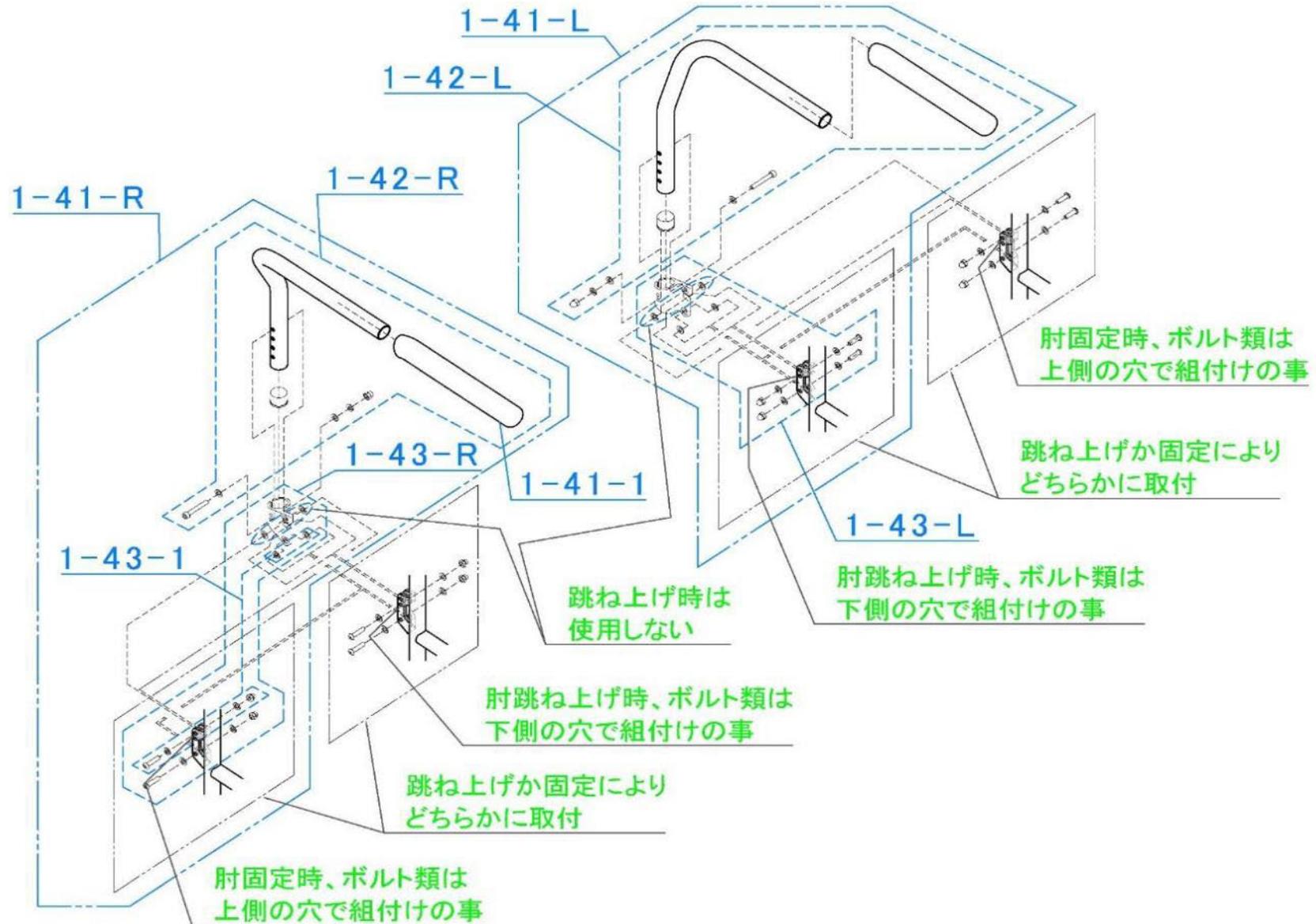


アール押手

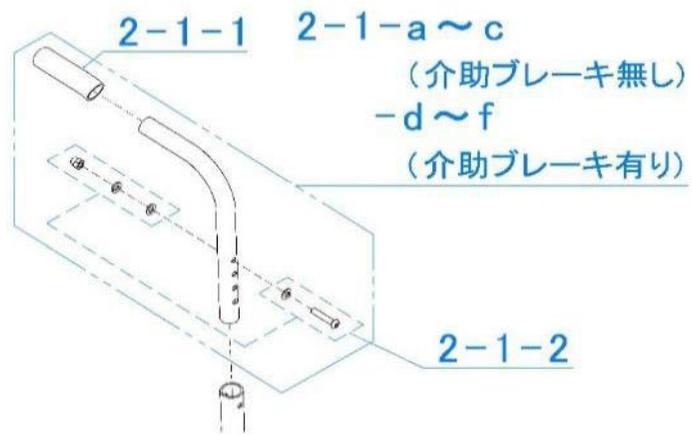


直角押手

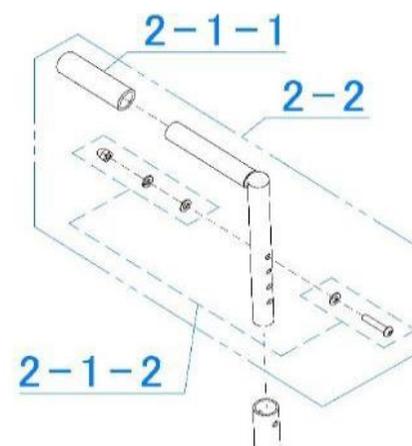


中間押手

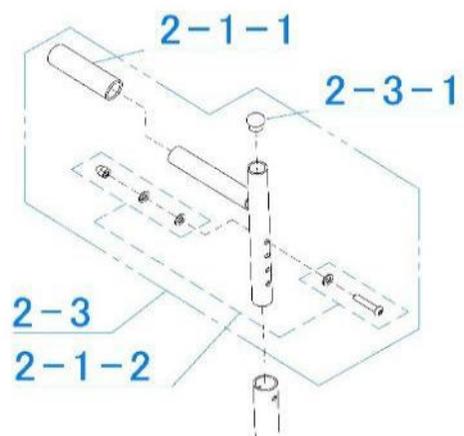


フォールディンググリップ

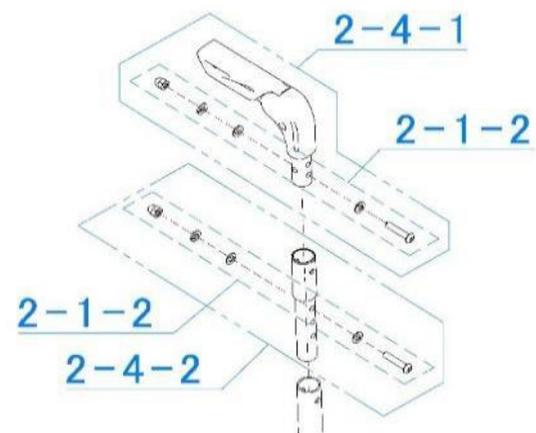


アール押手 背折れ付き

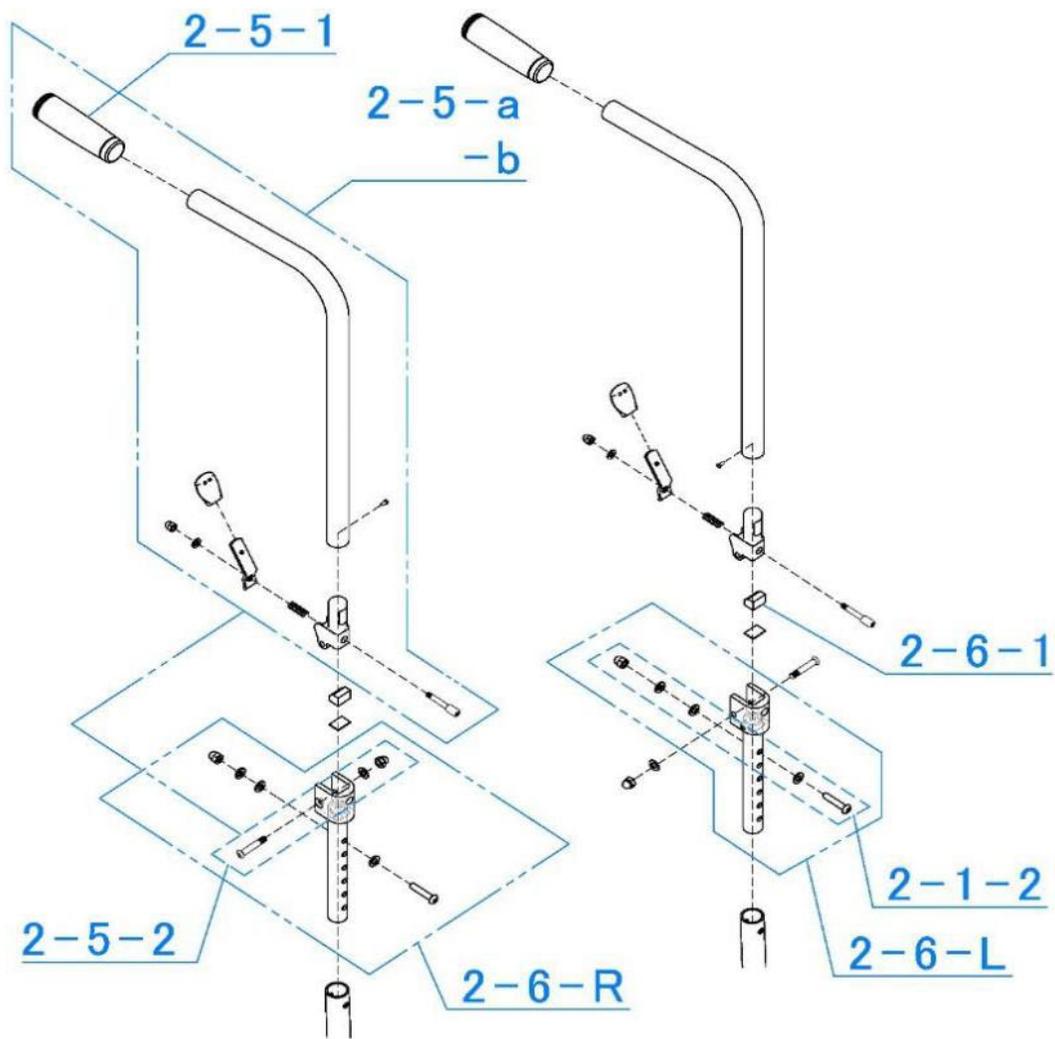


パイプ式中折れ

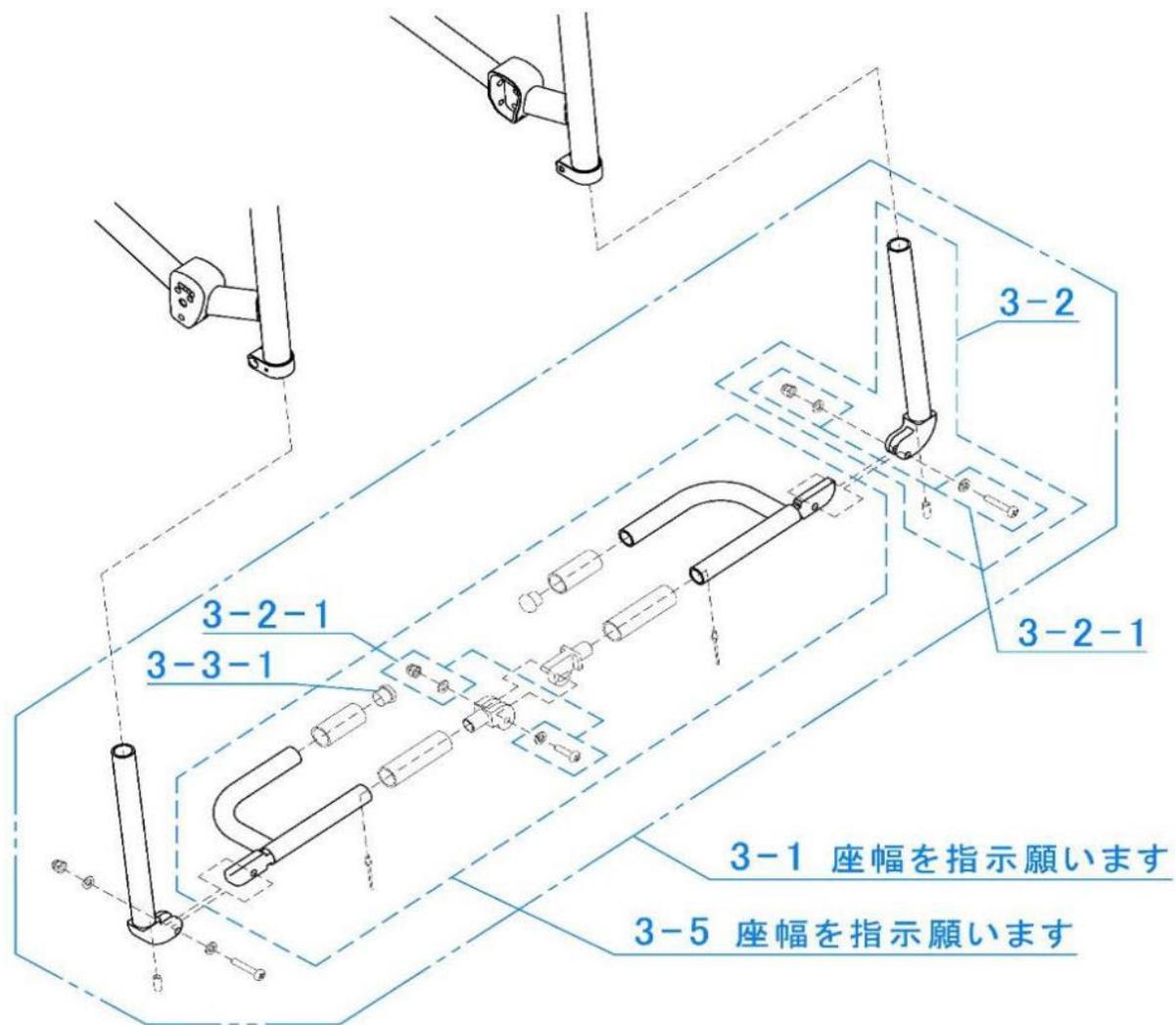


中折れ式

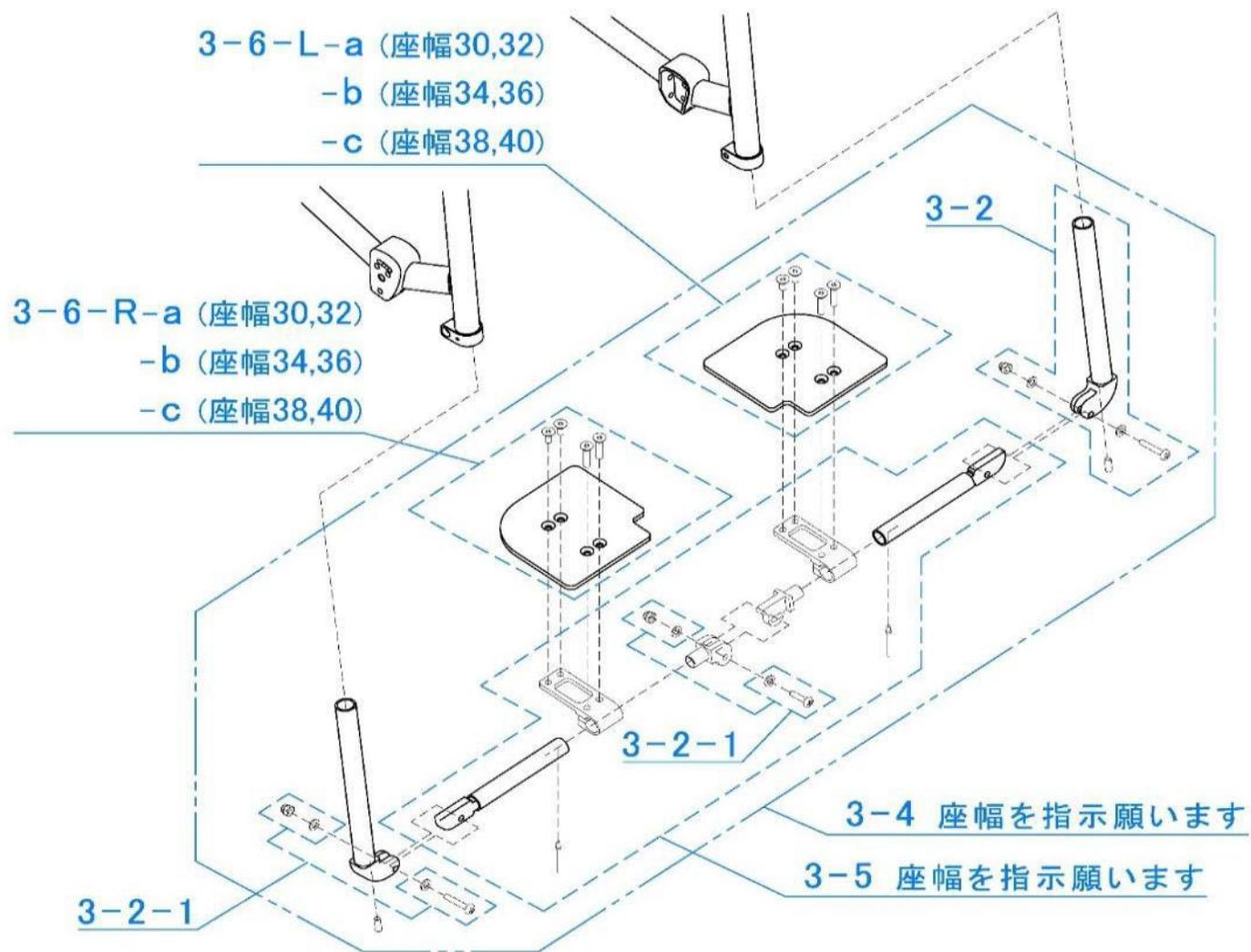

両跳ね式

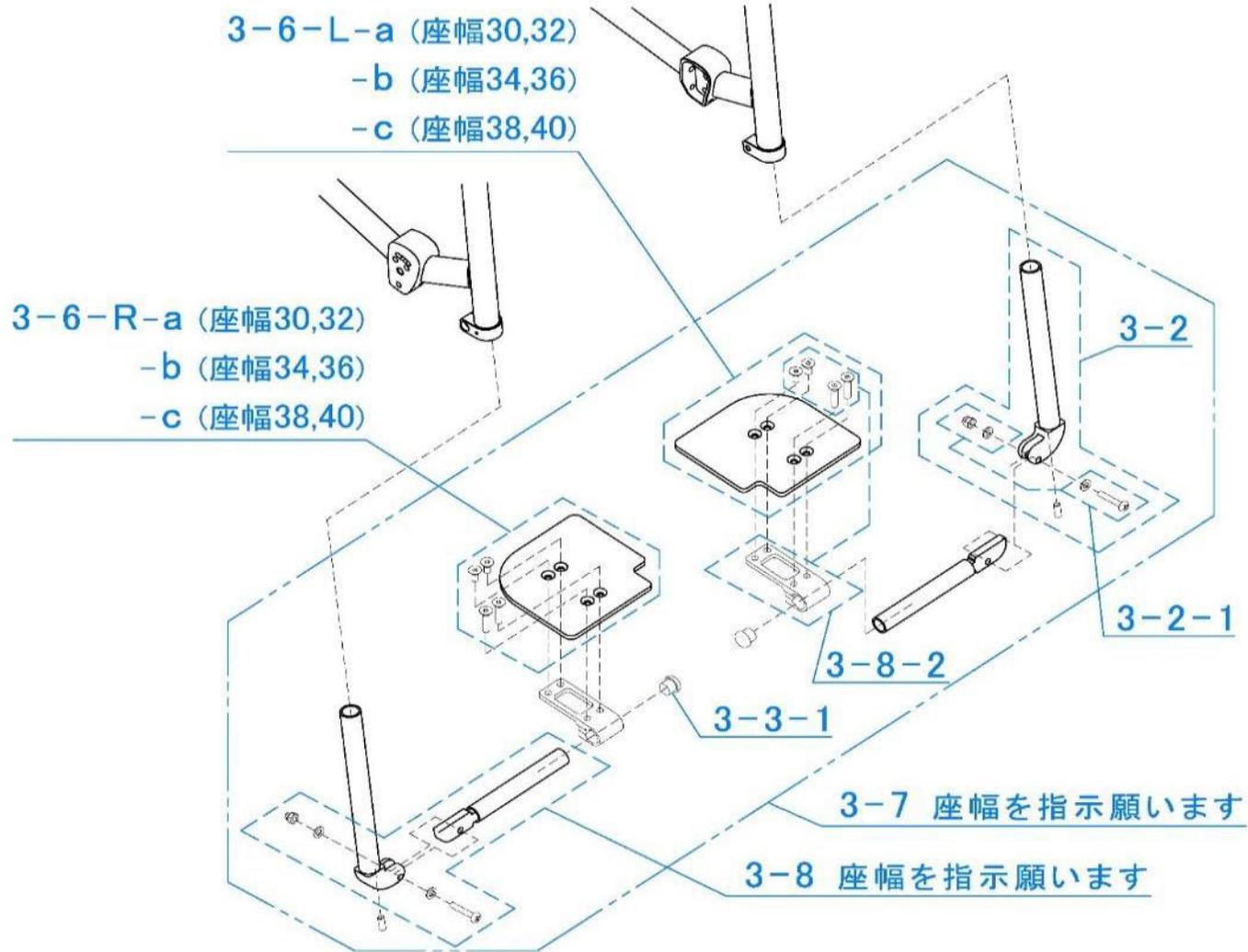


片折れ式

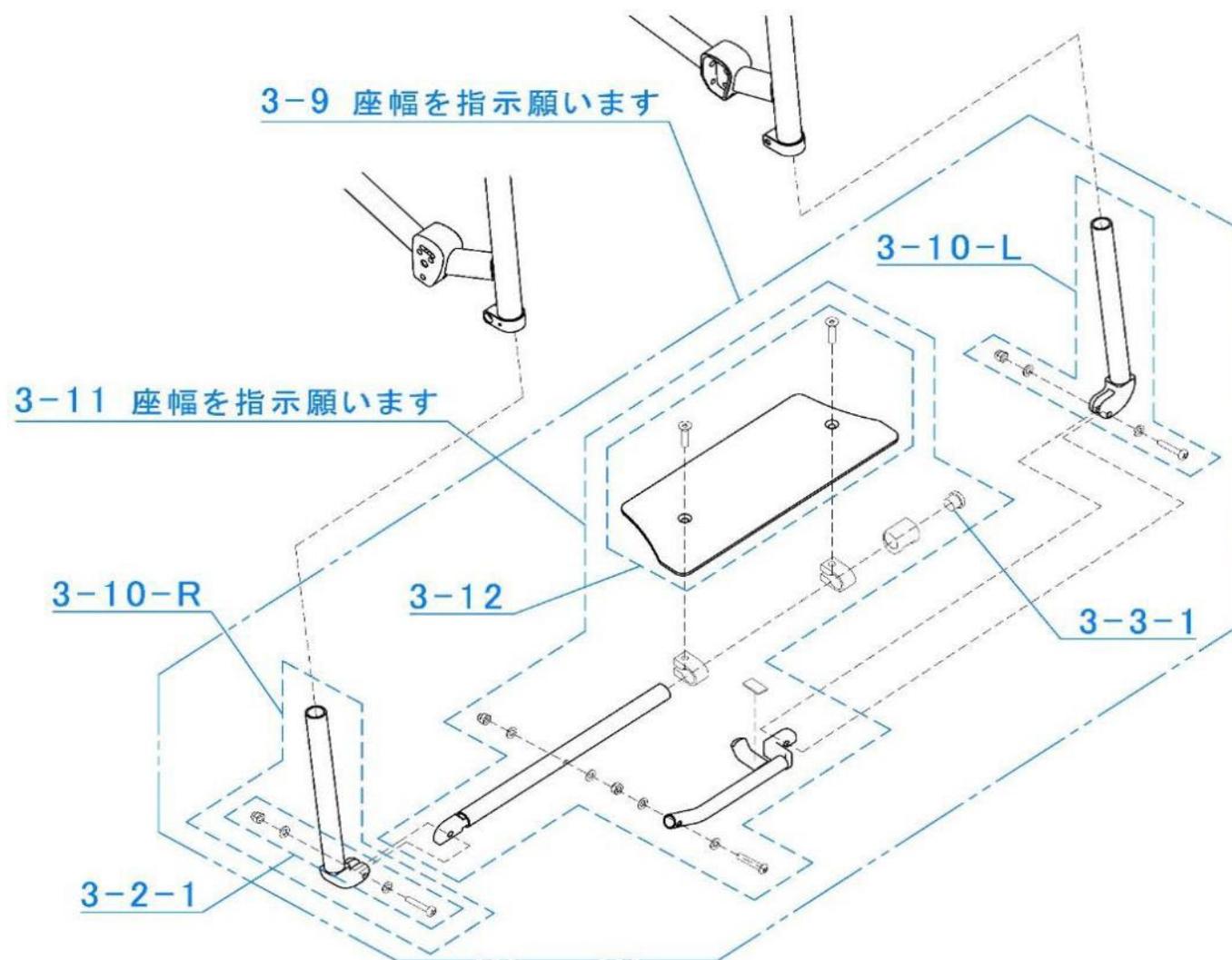


NCT-MS
ブレーキ部 - 1


NCTブレーキ

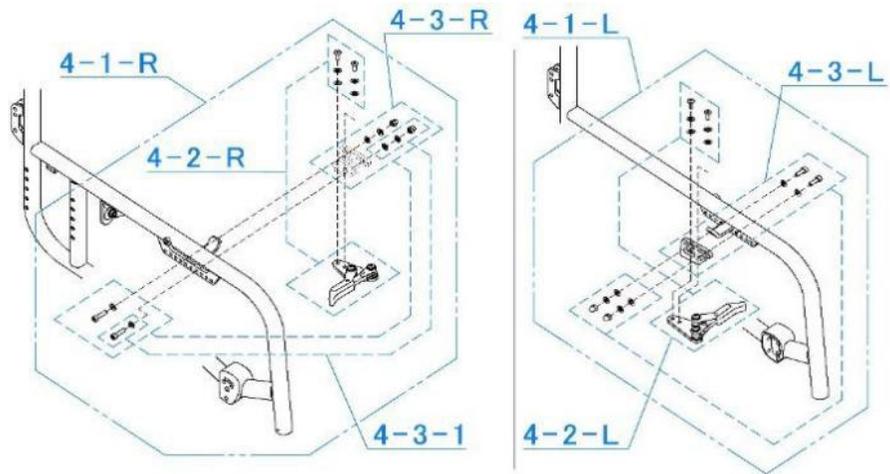

NCTブレーキ+DAアジャスタブル

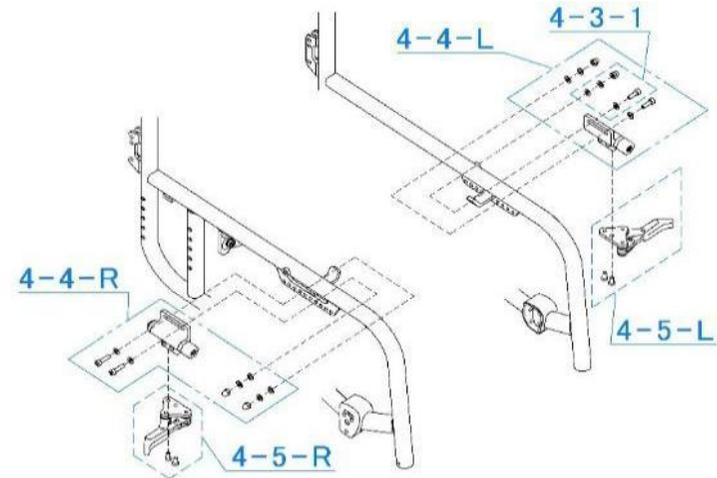

PD4ブレーキ

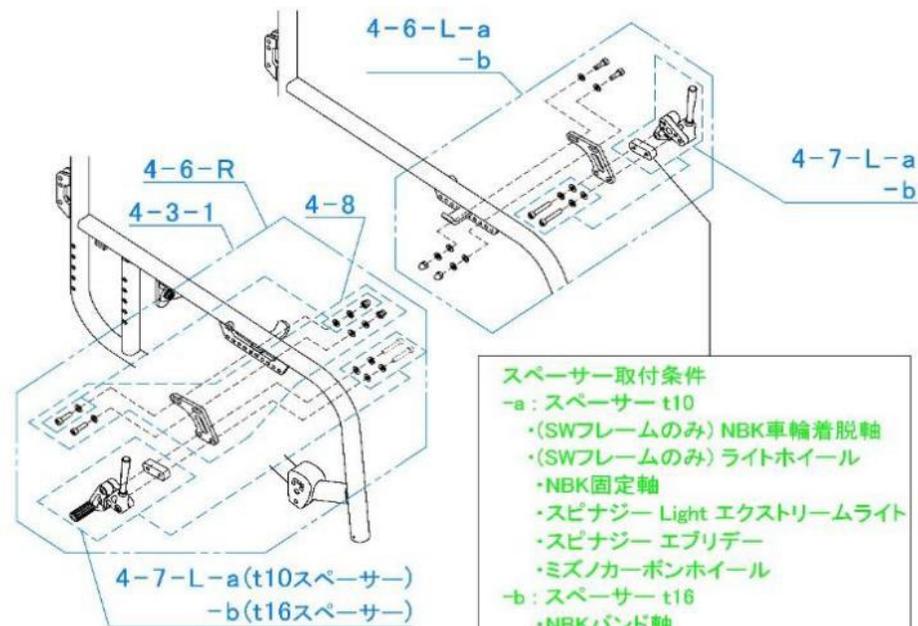


スペーサー取付条件


- a: スペーサー t10
 - ・(SWフレームのみ) NBK車輪着脱軸
 - ・(SWフレームのみ) ライトホイール
 - ・NBK固定軸
 - ・スピナジー Light エクストリームライト
 - ・スピナジー エブリデー
 - ・ミズノカーボンホイール
- b: スペーサー t16
 - ・NBKバンド軸
 - ・スピナジー スポックス SPORT

4-7-L-a(t10スペーサー)
-b(t16スペーサー)

PD4ブレーキ+DAアジャスタブル

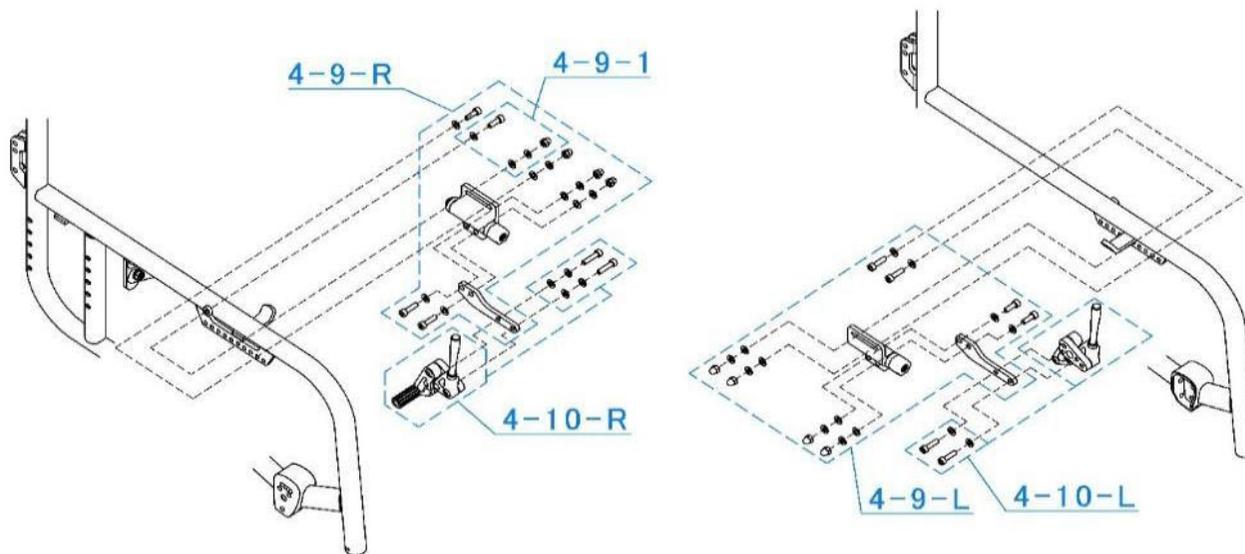


PPSブレーキ

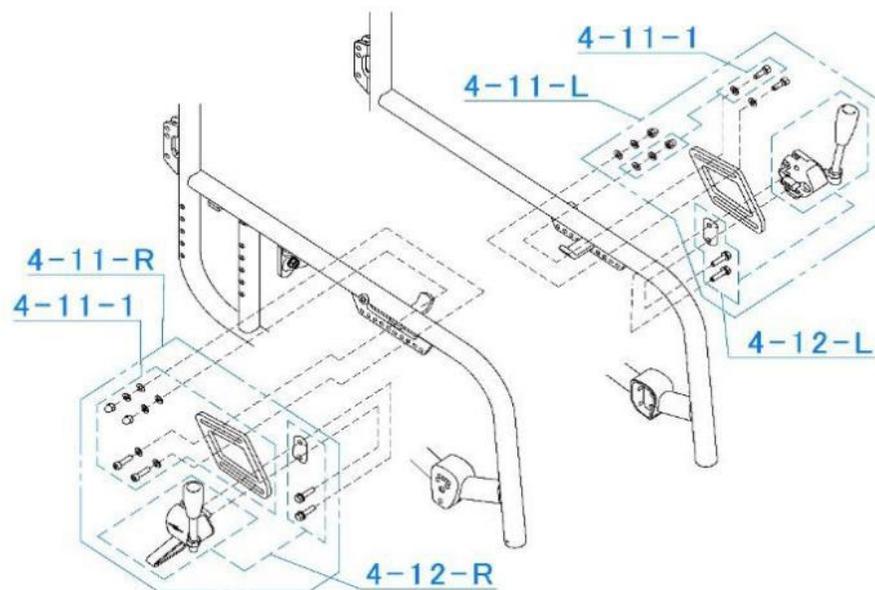


NCT-MS
シート部 - 1

5-1-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

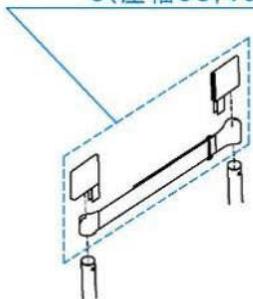


5-1-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

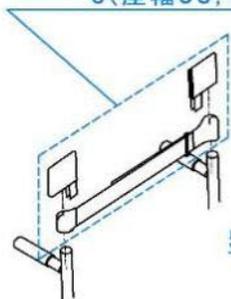


5-2-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)




5-2-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

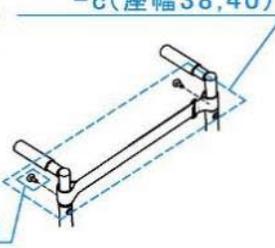


5-3-a(座幅30)
-b(座幅32)
-c(座幅34)
-d(座幅36)
-e(座幅38)
-f(座幅40)

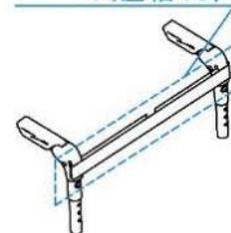


5-4-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

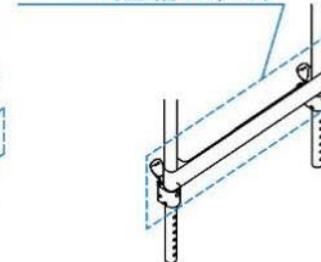

5-10

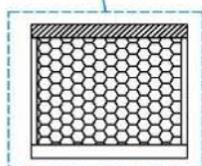

5-9

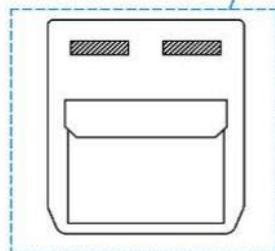


・背高(30~34)

5-7-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

・背高(36~40)

5-8-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

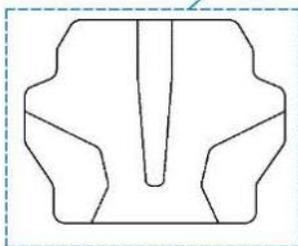


・W5

5-5-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

・W2.5


5-6-a(座幅30,32)
-b(座幅34,36)
-c(座幅38,40)

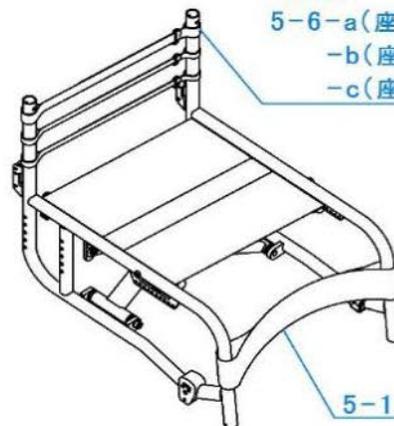

5-12-a~f

5-11 座幅と座奥行きを
指示願います


5-11-1

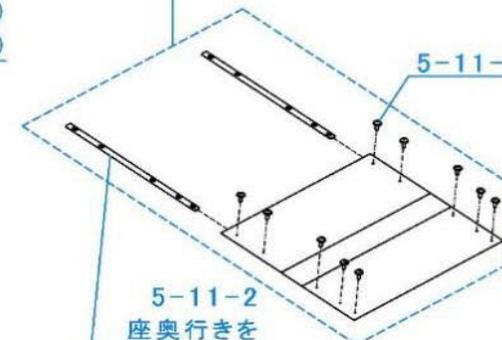


5-11-2
座奥行きを
指示願います

NCT-MS
車輪部 - 1

着脱車輪 (25-501)

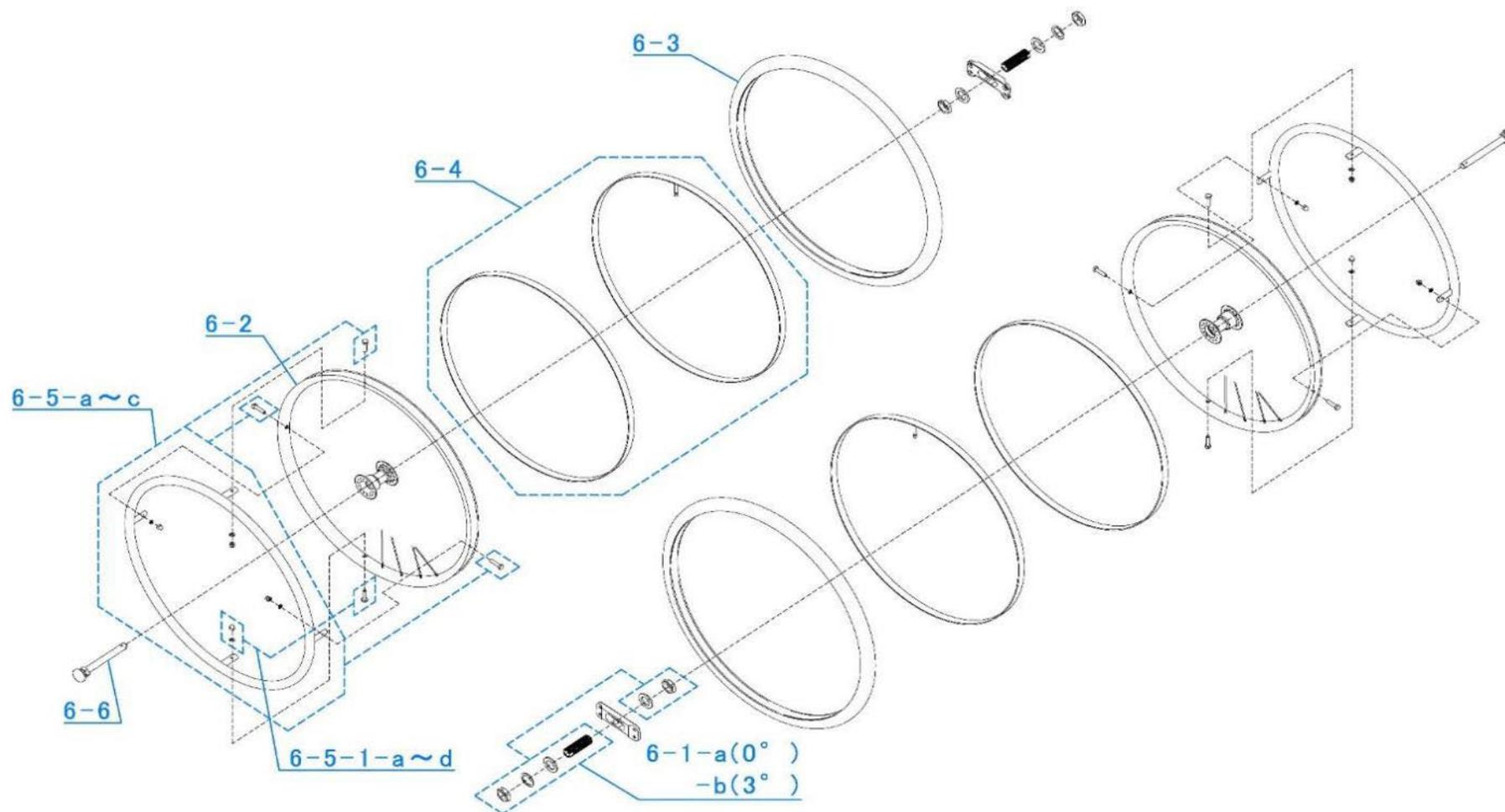


着脱車輪 (25-540)

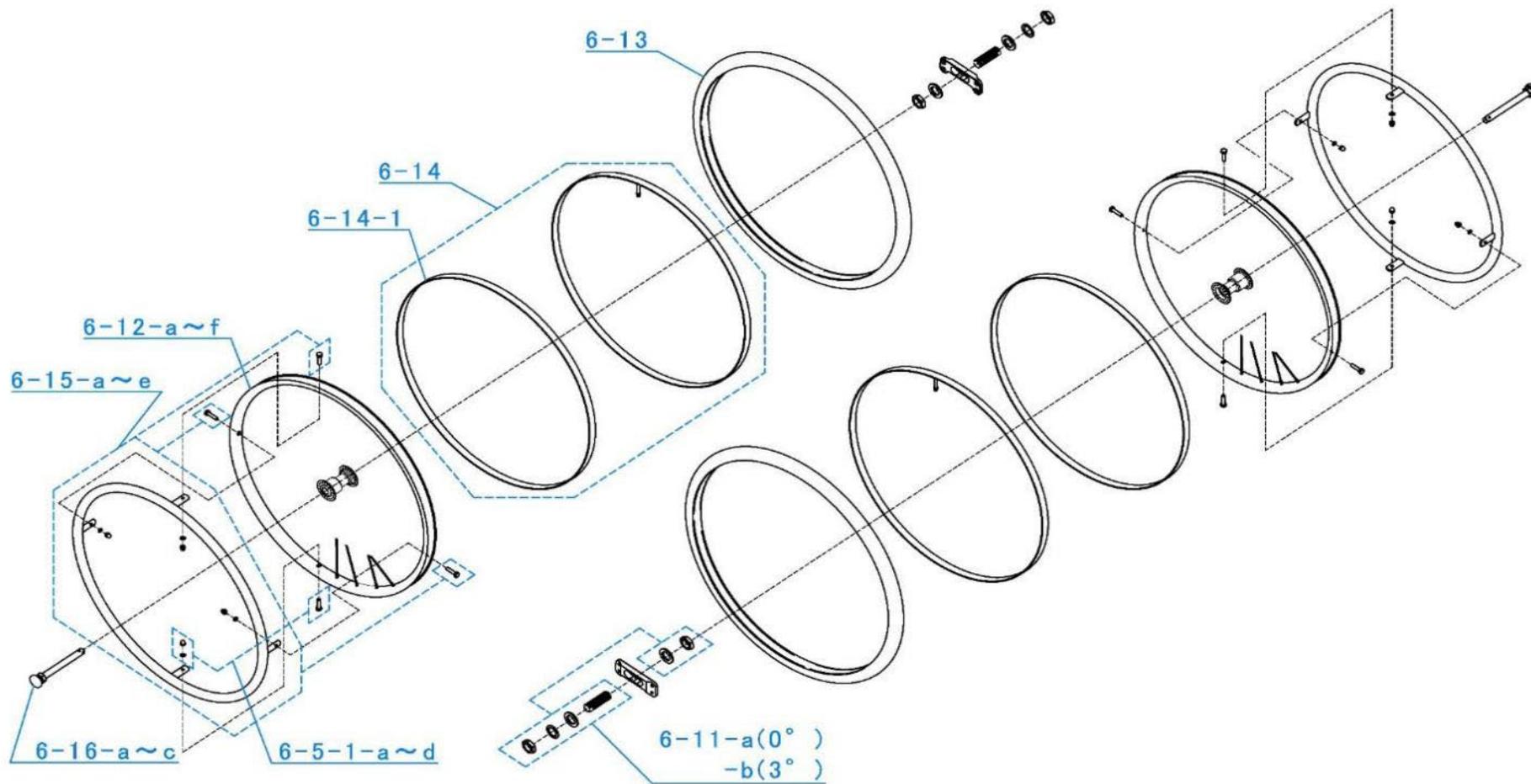


NCT-MS
車輪部 - 3

固定軸車輪 (25-501)
(25-540)

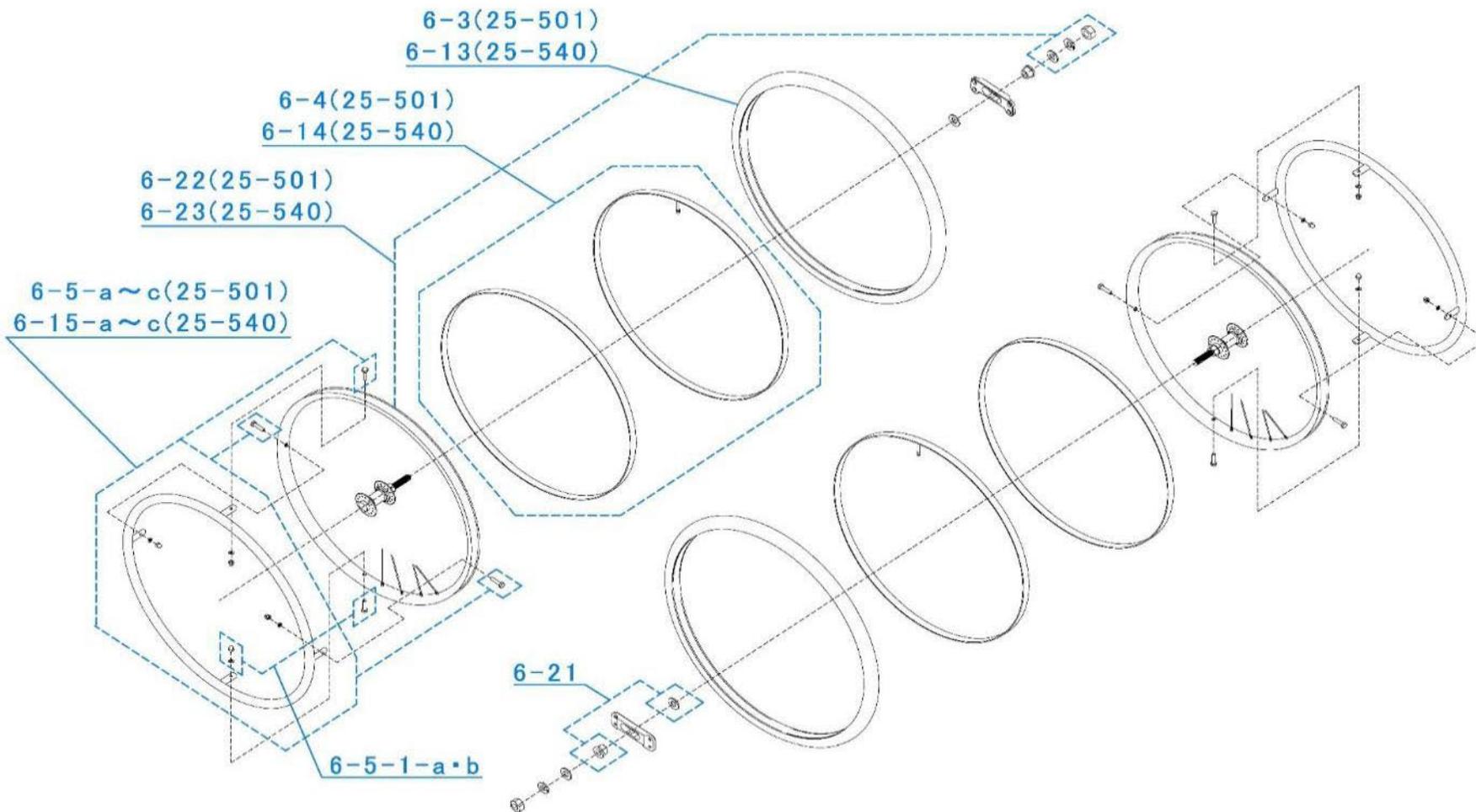

NCT-MS
車輪部 - 4

バンド車輪 (25-501)
(25-540)

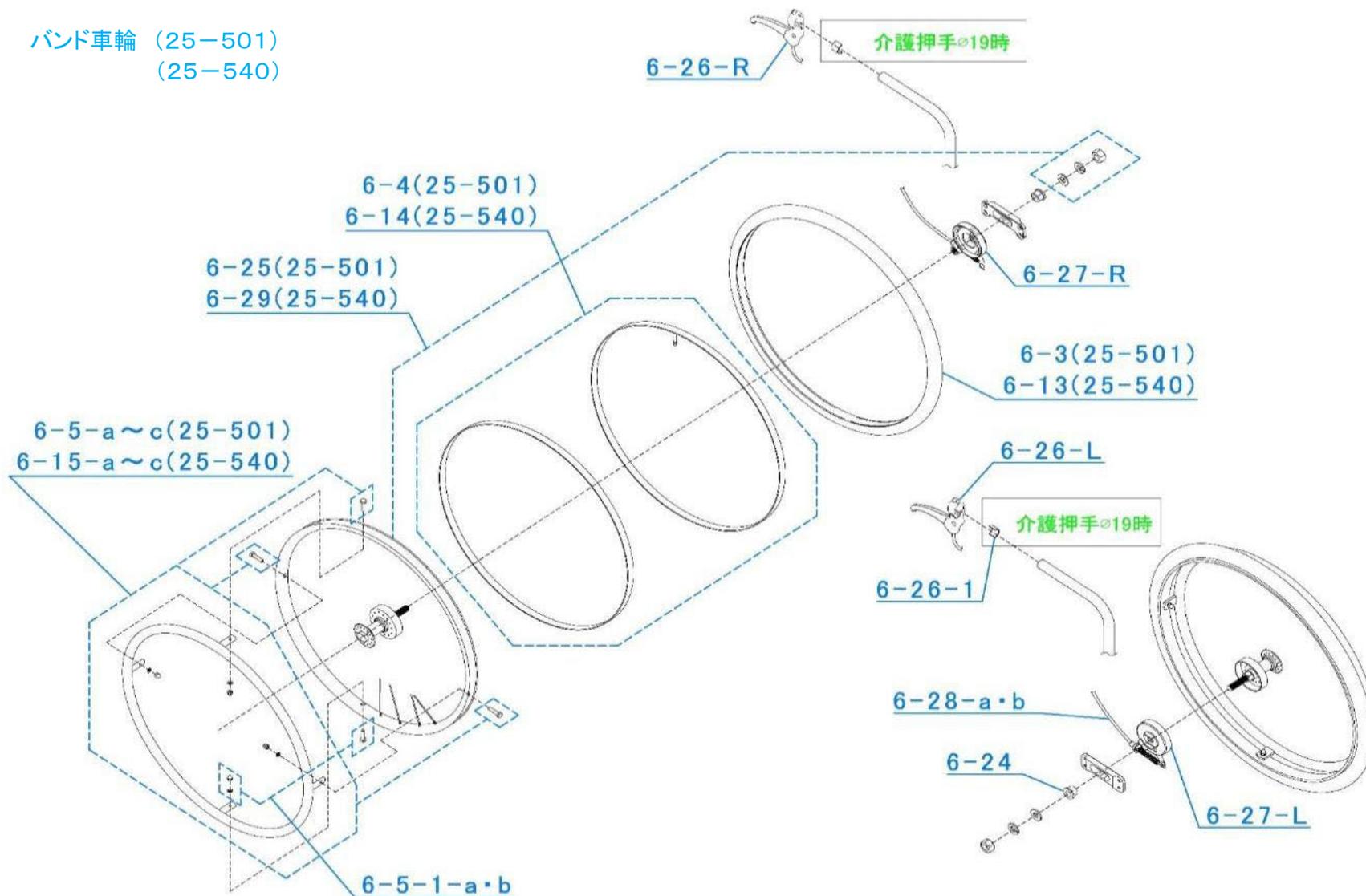

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-1	ABA-0002A	XフレームASSY MS	座幅:30~40cm、座奥行き:34~42cm指示	VX24-008(000-01~005-05)
1-2	PJI-0200A	エックス/フレーム組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x130、平W、フッシユ8x10x8(2個) スパーサー(VX3YR010A)(2個)、平W、袋UNT M8 (黒)	
1-3	PJI-0201A	エックスセンター組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x90、平W(4枚)、UNT M8 (黒)	
1-4-R	PJI-0202A	タスキ/エックス組付BTセット 右 SDブレース NCT	十字アプセット胴太 M6x30、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-4-L	PJI-0203A	タスキ/エックス組付BTセット 左 SDブレース NCT	CBT M6x50、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-5	PJI-0045A	タスキ/背パイプ組付けBTセット (胴太M6x21 黒)	十字アプセット胴太 M6x21、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-6	SJA-0038A	エックス受け φ17用		K14-017
1-7	SJB-0022A	キャップ丸中栓J16(黒)		
1-8	SJB-0021A	キャップ丸中栓J19(黒)		
1-9	PAC-0189A	φ23用クランプ_ネジ止め式ASSY 黒	CBT M6x20、小平W 十字穴付小ネジ M3x5、SW、平W	
1-10	PFZ-0020A	車軸プレートASSY φ23用 黒 受け・BTセット付	プレート(VD19-003)、CBT M6x30、袋UNT M6 (黒)(4セット) 受け(VD19-004)(2枚) (黒)	
1-10-1	PJI-0215A	車軸プレートφ23用取付BTセット 黒	CBT M6x30、袋UNT M6 (黒)(4セット)	
1-10-2	PFZ-0021A	車軸プレート受けセット φ23用 黒	受け(VD19-004)(2枚) (黒)	
1-11	SJA-0013A	樹脂カラー φ22×2t用		
1-12	PAC-0090A	スイングインアウト用クランプASSY(φ22用) ナット黒	胴太BT M6x40、平W6x13x1.0、SW、袋NT M6 (黒) アルミスパーサー(VZ14-009) ブロック(K14-013)	L/R共通
1-13-R	PAC-0221A	レッグサポートパイプASSY 右 φ20用 スイングインアウト レバー式黒 MS	フレーム色を指示願います	
1-13-L	PAC-0222A	レッグサポートパイプASSY 左 φ20用 スイングインアウト レバー式黒 MS	フレーム色を指示願います	
1-14	AAC-0001A	スイングインアウト用レバー・ブラケット レバー黒 MS-SW	BBT M6x25、袋UNT M6 (黒)(3セット)	レバー、ピン、スパーサー付
1-14-1	SAC-0013A	スイングインアウト用ロックレバー 黒 取付BT付	BBT M6x25、袋UNT M6 (黒)	
1-15	PAC-0095B	φ20用クランプ・ネジ止め式ASSY (M5x18) 黒 ホルト黒	CBT M5x18、BT M3×5(P0.5)、平W 小型3x6x0.6、SW (黒)	
1-21-a	PGC-0029A	フォークASSY EVO_Bタイプ M_ノーマル 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC07-006)、NT M10 BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-b	PGC-0030A	フォークASSY EVO_Bタイプ L_ノーマル 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC07-006)、NT M10 BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-c	PGC-0031A	フォークASSY EVO_Bタイプ M_ワイド 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC07-006)、NT M10	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
			BT M6xP1.0x70、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-d	PGC-0032A	フォークASSY EVO_タイヤ° L_ワイト° 黒 キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、シャフト(VC07-006)、NT M10	
			BT M6xP1.0x70、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-1	PJI-0063A	キャスター車軸用BTセット M6 アルミフォーク(黒)	BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-2	PJI-0054A	キャスター車軸用BTセット M6 黒 5inクッションキャスタ	BT M6xP1.0x70、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-3	SJB-0048A	キャップ° 平丸中栓J28S(黒)		
1-22-a	PGB-0054A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広 フォーク内々40mm用	ベアリング°、カラー 5A664000(2個)	
1-22-b	PGB-0053A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション(アルミ) フォーク内々40mm用	ベアリング°、カラー VC2YY013B(2個)	
1-22-c	PGB-0055A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広(アルミ) フォーク内々40mm用	ベアリング°、カラー 5A664000(2個)	
1-22-d	PGB-0069A	キャスタ車輪ASSY 4inライトニングH アルミフォーク	入荷時付属カラー(2個)	
1-22-e	PGB-0051B	キャスタ車輪ASSY 3inクッション アルミフォーク		
1-22-f	PGB-0010A	キャスタ車輪ASSY 5inクッション		
1-23-R	AAF-0005A	キャスターケースASSY 右 MS プレート°キャップ°取付BT付	上側:CBT胴太 M6x21、SW、平W 下側:CBT M6x22、SW、平W 六角穴付止ネジ° M8x12	キャスターケース(VC24-006) プレート(VC25-001) キャップ°(K24-013)右
1-23-L	AAF-0006A	キャスターケースASSY 左 MS プレート°キャップ°取付BT付	上側:CBT胴太 M6x21、SW、平W 下側:CBT M6x22、SW、平W 六角穴付止ネジ° M8x12	キャスターケース(VC24-006) プレート(VC25-001) キャップ°(K24-013)左
1-23-1	PJI-0216A	キャスターケース固定BTセット MS	上側:CBT胴太 M6x21、SW、平W 下側:CBT M6x22、SW、平W 六角穴付止ネジ° M8x12	
1-23-2-R	SJA-0070A	キャップ° キャスターケース用(K24-013) 右 MS		
1-23-2-L	SJA-0071A	キャップ° キャスターケース用(K24-013) 左 MS		
1-31-R	PCA-0506A	サイドガード° カーボン調樹脂 右 後クランプ° 補強プレート°クランプ°取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒) φ22x15クランプ°、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	
1-31-L	PCA-0507A	サイドガード° カーボン調樹脂 左 後クランプ° 補強プレート°クランプ°取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒) φ22x15クランプ°、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	
1-31-1	ACA-0002A	サイドガード°取付クランプ° φ22x15 取付BT付	φ22x15クランプ°、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-31-2	ACA-0003A	カーボン調樹脂側板補強プレート 取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒)	
1-31-3	SJJ-0082A	ロゴシール NACTUS		
1-32	PCA-0508A	サイドガード アルミ_タイヤール MS クランプ・取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒)	L/R共通
			φ22x15クランプ、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			色を指定願います	
1-32-1	PJI-0207A	サイドガード取付BTセット カーボン・アルミ 前_ホス式	BBT M6x15、平W、SW (黒)	
1-33	PCA-0509A	サイドガード アルミ_アールデスク MS クランプ・取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒)	L/R共通
			φ22x15クランプ、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			色を指定願います	
1-34	PCA-0510A	サイドガード アルミ_UPタイヤール MS クランプ・取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒)	L/R共通
			φ22x15クランプ、BBT M5x22、平W(3枚)、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			色を指定願います	
1-35-R	PCA-0504A	サイドガード カーボン 右 後_ナッター 取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒)	
			BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-35-L	PCA-0505A	サイドガード カーボン 左 後_ナッター 取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒)	
			BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-35-1	PJI-0206A	サイドガード取付BTセット カーボン・カーボン調樹脂 後_ナッター式	BBT M6x25、平W、SW (黒)	
1-41-R	AAB-0045A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 右 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-L	AAB-0046A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 左 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-1	PEA-0200A	PVCグリップ φ25 L300		
1-42-R	AAB-0047A	パイプアームサポートASSY 右 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付
1-42-L	AAB-0048A	パイプアームサポートASSY 左 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付
1-43-R	AAB-0038B	パイプアームサポートホルダーASSY 右 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-L	AAB-0039B	パイプアームサポートホルダーASSY 左 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-1	PJI-0208A	パイプアームサポートホルダー取付BTセット	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)	
2-1-a	AAE-0002A	押手パイプASSY ール_φ19_L255 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(000)
2-1-b	AAE-0003A	押手パイプASSY ール_φ19_L375 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(001)

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
2-1-c	AAE-0004A	押手パイプASSY アール_φ19_L445 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(002)
2-1-d	AAE-0005A	押手パイプASSY アール_φ19_L255 黒 介助ブレーキ φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(004)
2-1-e	AAE-0006A	押手パイプASSY アール_φ19_L375 黒 介助ブレーキ φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(005)
2-1-f	AAE-0007A	押手パイプASSY アール_φ19_L445 黒 介助ブレーキ φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(006)
2-1-1	SJB-0408A	グリップ CR-91		
2-1-2	PJI-0209A	押手パイプ取付BTセット φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
2-2	AAE-0009A	押手パイプASSY 直角_φ19_L225 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-004(000)
2-3	AAE-0011A	押手パイプASSY 中間出し_φ19_L210 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-003(000)
2-3-1	SJB-0021A	キャップ 丸中栓J19(黒)		
2-4-1	AAE-0012A	押手パイプASSY フォールディンググリップ φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	67325RA
2-4-2	AAE-0051A	フォールディンググリップ取付カラーASSY 黒 MS	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-005
2-5-a	AAE-0013A	押手パイプASSY 介護押手_φ19_L400 黒	十字穴付ナベ胴太 M6x35、SW、袋NT M6 (黒)	VR05-003(000)
2-5-b	AAE-0014A	押手パイプASSY 介護押手_φ19_L400 黒 介助ブレーキ	十字穴付ナベ胴太 M6x35、SW、袋NT M6 (黒)	VR05-003(001)
2-5-1	SJB-0002A	グリップ No.9(黒)		
2-5-2	PJI-0012A	BTセット 背折れジョイント(ZN)用 黒	鍋皿小ネジ M6x36、SW、袋NT M6 (黒)	
2-6-R	AAE-0015A	背折れ金具取付パイプASSY 右 黒 φ19 MS	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR17-006
2-6-L	AAE-0025A	背折れ金具取付パイプASSY 左 黒 φ19 MS	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR17-006
2-6-1	SJA-0001A	ゴムブッシュ 背折れ用		
3-1	AIA-0171A	フットサポートASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-2	PIB-0035A	フットサポートホストパイプ D19 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)	VF24-008
			袋UNT M6 (黒)、六角穴付きくぼみ先 M6x12	
3-2-1	PJI-0210A	ステップパイプ取付BTセット 中折れ	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
3-3	AIA-0172A	フットサポート・ステップASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-3-1	SJB-0022A	キャップ丸中栓J16(黒)		
3-4	AIA-0173A	フットサポートASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-5	AIA-0174A	フットサポート・ステップASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-6-R-a	SIC-0117A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅30・32
3-6-R-b	SIC-0119A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅34・36

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
3-6-R-c	SIC-0121A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅38・40
3-6-L-a	SIC-0118A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅30・32
3-6-L-b	SIC-0120A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅34・36
3-6-L-c	SIC-0122A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	座幅38・40
3-7	AIA-0175A	フットサポートASSY 右左(プレート_両跳ね式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-8-1	PIB-0038A	ステップパイプ 黒 MS 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
			座幅を指示願います(30~40)	
3-8-2	PIC-0020A	プレートステップ固定用クランプ 取付BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x25(2本)	
3-9	AIA-0176A	フットサポートASSY 右左(片折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-10-R	PIB-0037A	片折れポストパイプ D19 右 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-10-L	PIB-0039A	片折れポストパイプ D19 左 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-11	AIA-0177A	フットサポート・ステップASSY 右左(片折れ式) 黒 MS	座幅を指示願います(30~40)	
3-12	PIC-0054A	フットサポートプレート 片折れ MS BT付	六角穴付皿BT M6x25(2本)	
			レグパイプ内々寸法を指示願います。	
3-13	AIA-0178A	フットサポートASSY 右左(プレート_両跳ね式) 黒 MSスイング	座幅を指示願います(30~40)	
3-14	PIB-0040A	フットサポートポストポスト D16(MSスイング) 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)	
			袋UNT M6 (黒)、六角穴付きくぼみ先 M6x12	
4-1-R	AHA-0101A	NCTブレーキ・ステアASSY 右 黒 NCTブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステア取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステア・NCTブレーキ
4-1-L	AHA-0102A	NCTブレーキ・ステアASSY 左 黒 NCTブレーキステー付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステア取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステア・NCTブレーキ
4-2-R	PHA-0283A	NCTブレーキASSY 右 黒 NCTブレーキステー取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-2-L	PHA-0284A	NCTブレーキASSY 左 黒 NCTブレーキステー取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-3-R	AHA-0103A	NCTブレーキステー 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-L	AHA-0104A	NCTブレーキステー 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-1	PJI-0211A	NCTブレーキステー取付BTセット	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)	
4-4-R	AHA-0105A	DAアジャスタブル 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-4-L	AHA-0106A	DAアジャスタブル 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
4-5-R	PHA-0285A	NCTブレーキASSY 右 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	
4-5-L	PHA-0286A	NCTブレーキASSY 左 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	
4-6-R-a	AHA-0113A	PD4ブレーキ・ステアASSY 右 MS ブレーキステア・スペーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-008、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-6-L-a	AHA-0114A	PD4ブレーキ・ステアASSY 左 MS ブレーキステア・スペーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-008、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-6-R-b	AHA-0115A	PD4ブレーキ・ステアASSY 右 MS ブレーキステア・スペーサー(t16)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-008、VZ22-016
			CBT M5x30、平W、SW (黒)(2セット)	
4-6-L-b	AHA-0116A	PD4ブレーキ・ステアASSY 左 MS ブレーキステア・スペーサー(t16)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-008、VZ22-016
			CBT M5x30、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-R-a	PHA-0287A	PD4ブレーキASSY 右 スペーサー(t10)付	スペーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-L-a	PHA-0288A	PD4ブレーキASSY 左 スペーサー(t10)付	スペーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-R-b	PHA-0289A	PD4ブレーキASSY 右 スペーサー(t16)付	スペーサー(VZ22-016)、CBT M5x30、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-L-b	PHA-0290A	PD4ブレーキASSY 左 スペーサー(t16)付	スペーサー(VZ22-016)、CBT M5x30、平W、SW (黒)(2セット)	
4-8	PHZ-0078A	ブレーキステア VB25-008 黒 取付BTセット付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-9-R	AHA-0109A	DAアジャスタブル 右 黒 ブレーキステア_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステア、CBT M6x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB24-024)
4-9-L	AHA-0110A	DAアジャスタブル 左 黒 ブレーキステア_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステア、CBT M6x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB24-024)
4-10-R	PHA-0251A	PD4ブレーキASSY 右	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-10-L	PHA-0252A	PD4ブレーキASSY 左	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-11-R	AHA-0111A	PPSブレーキ・ステアASSY 右 短(黒) ブレーキステア付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB10-002)
4-11-L	AHA-0112A	PPSブレーキ・ステアASSY 左 短(黒) ブレーキステア付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB10-002)
4-12-R	PHA-0165C	PPSブレーキASSY_ZN 右 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
4-12-L	PHA-0166C	PPSブレーキASSY_ZN 左 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
5-1-a	PDB-0042A	背インナーベルト・トップASSY ハイポイント 座幅30-32(ベルトL30) 緩衝カバー付	VS09-062(004)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	座幅30・32用
5-1-b	PDB-0043A	背インナーベルト・トップASSY ハイポイント 座幅33-36(ベルトL38) 緩衝カバー付	VS09-062(000)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	座幅34・36用
5-1-c	PDB-0044A	背インナーベルト・トップASSY ハイポイント 座幅37-40(ベルトL46) 緩衝カバー付	VS09-062(001)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	座幅38・40用

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
5-2-a	PDB-0048A	背インナーベルト 座幅30-32(ベルトL52.5 W5) 取付ビス付	VS17-021(000) トラスA5×16(W付)x2本	座幅30・32用
5-2-b	PDB-0049A	背インナーベルト 座幅33-36(ベルトL58.5 W5) 取付ビス付	VS17-021(001) トラスA5×16(W付)x2本	座幅34・36用
5-2-c	PDB-0050A	背インナーベルト 座幅37-40(ベルトL64.5 W5) 取付ビス付	VS17-021(002) トラスA5×16(W付)x2本	座幅38・40用
5-2-1	PDZ-0011A	座シートビスセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-3-a	SDB-0061A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅30(ベルトL59)	VS24-034(005)	座幅30用
5-3-b	SDB-0062A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅32(ベルトL63)	VS24-034(006)	座幅32用
5-3-c	SDB-0063A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅34(ベルトL67)	VS24-034(007)	座幅34用
5-3-d	SDB-0064A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅36(ベルトL71)	VS24-034(001)	座幅36用
5-3-e	SDB-0065A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅38(ベルトL75)	VS24-034(002)	座幅38用
5-3-f	SDB-0066A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅40(ベルトL79)	VS24-034(003)	座幅40用
5-4-a	SDB-0067A	背インナーベルト 座幅30-32(ベルトL87 W5) 背折れ用	VS07-012(000-02)	座幅30・32用
5-4-b	SDB-0068A	背インナーベルト 座幅34-36(ベルトL95 W5) 背折れ用	VS07-012(000-04)	座幅34・36用
5-4-c	SDB-0069A	背インナーベルト 座幅38-40(ベルトL103 W5) 背折れ用	VS07-012(000-06)	座幅38・40用
5-5-a	SDB-0070A	背インナーベルト 座幅30-32(ベルトL52.5 W5)	VS17-021(000)	座幅30・32用
5-5-b	SDB-0071A	背インナーベルト 座幅33-36(ベルトL58.5 W5)	VS17-021(001)	座幅34・36用
5-5-c	SDB-0072A	背インナーベルト 座幅37-40(ベルトL64.5 W5)	VS17-021(002)	座幅38・40用
5-6-a	SDB-0073A	背インナーベルト 座幅30-32(ベルトL52.5 W2.5)	VS17-021(004)	座幅30・32用
5-6-b	SDB-0074A	背インナーベルト 座幅33-36(ベルトL58.5 W2.5)	VS17-021(005)	座幅34・36用
5-6-c	SDB-0075A	背インナーベルト 座幅37-40(ベルトL64.5 W2.5)	VS17-021(006)	座幅38・40用
5-7-a	SDE-0301A	バックサポートクッション MS 座幅30-32(W41) 背高30-34	VS17-018(001)	座幅30・32用
5-7-b	SDE-0302A	バックサポートクッション MS 座幅34-36(W45) 背高30-34	VS17-018(002)	座幅34・36用
5-7-c	SDE-0303A	バックサポートクッション MS 座幅38-40(W49) 背高30-34	VS17-018(003)	座幅38・40用
5-8-a	SDE-0304A	バックサポートクッション MS 座幅30-32(W41) 背高36-40	VS17-019(001)	座幅30・32用
5-8-b	SDE-0305A	バックサポートクッション MS 座幅34-36(W45) 背高36-40	VS17-019(002)	座幅34・36用
5-8-c	SDE-0306A	バックサポートクッション MS 座幅38-40(W49) 背高36-40	VS17-019(003)	座幅38・40用
5-9	SDE-0307A	背シートアウター・ポケット NCT NM-8	座幅、ポケット、フタ仕様を指示願います	
5-10	SDE-0308A	クッションガイド	VS10-014	
5-11	PDC-0238A	座シートASSY MS	座幅:30~40cm、座奥行き:34~42cm指示	
			芯金、ビス付	芯金:VS07-009

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
5-11-1	PDZ-0011A	座シートビスセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-11-2-a	SDZ-0031A	座シート芯金 鉄 5穴 L320	VS07-009(000)	座奥34用
5-11-2-b	SDZ-0032A	座シート芯金 鉄 5穴 L340	VS07-009(001)	座奥36用
5-11-2-c	SDZ-0033A	座シート芯金 鉄 5穴 L360	VS07-009(002)	座奥38用
5-11-2-d	SDZ-0034A	座シート芯金 鉄 5穴 L380	VS07-009(003)	座奥40用
5-11-2-e	SDZ-0035A	座シート芯金 鉄 5穴 L400	VS07-009(004)	座奥42用
5-12-a	SDF-0204A	レックヘルト PPヘルト 座幅30(L83)	VS07-013(000-01)	
5-12-b	SDF-0205A	レックヘルト PPヘルト 座幅32(L87)	VS07-013(000-02)	
5-12-c	SDF-0206A	レックヘルト PPヘルト 座幅34(L91)	VS07-013(000-03)	
5-12-d	SDF-0207A	レックヘルト PPヘルト 座幅36(L95)	VS07-013(000-04)	
5-12-e	SDF-0208A	レックヘルト PPヘルト 座幅38(L99)	VS07-013(000-05)	
5-12-f	SDF-0209A	レックヘルト PPヘルト 座幅40(L102)	VS07-013(000-06)	
6-1-a	PFZ-0022A	車軸ソケットASSY ミリ 0°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD20-002
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-1-b	PFZ-0023A	車軸ソケットASSY ミリ 3°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD25-001
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-2	PFA-1008A	車輪のみASSY 501 NBK_脱着		
6-3	SFB-0041A	タイヤ ニュートロンスペックS 25-501		
6-4	PFC-0017A	チューブ ニュートロン 25-501 英式		
6-5-a	PFG-0033A	ハンドリム アルミφ19 501 NBK シルバー	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-b	PFG-0034A	ハンドリム ステンφ19_ビニールコーティング 501 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-c	PFG-0035A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 501 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-5-1-a	PJI-0004A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x10)	6角アプセットM5x10、平W、SW・袋NT M5	NBK:ステン・ビニールコーティング
6-5-1-b	PJI-0212A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x12)	6角アプセットM5x12、平W、SW・袋NT M5	NBK:アルミφ19
6-6	AFE-0101B	着脱車軸 B1	NBK 25-501着脱	
6-11-a	PFZ-0018A	車軸ソケットASSY インチ 0°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD2YR029A
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
6-11-b	PFZ-0019A	車軸ソケットASSY インチ 3°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚)	VD10-006
			皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	
6-12-a	PFA-1009A	車輪のみASSY 540 NBK_脱着		
6-12-b	PFA-1003A	車輪のみASSY 540 スピナジー・エブリデー	黒・白	
6-12-c	PFA-1004A	車輪のみASSY 540 スピナジー・SPORT	黒・青・黄	
6-12-d	PFA-1005A	車輪のみASSY 540 スピナジー・ライトエクストリームLight	黒・白・赤・橙	
6-12-e	PFA-1006A	車輪のみASSY 540 ライトホイール		
6-12-f	PFA-1007A	車輪のみASSY 540 ミスノ・フルカーボンホイール ハンドリム付		
6-13	SFB-0045A	タイヤ ニュートロンスペックS2 23-540 グレー		
6-14	PFC-0019A	チューブ Vトラック 25-540 英式		
6-14-1	PFC-0110A	リムテープ 540 スピナジー		
6-15-a	PFG-0036A	ハンドリム アルミφ19 540 NBK シルバー	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-b	PFG-0037A	ハンドリム ステンφ19_ビニールコーティング 540 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-c	PFG-0038A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 NBK	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-15-d	PFG-0030A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-15-e	PFG-0031A	ハンドリム アルミ楕円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-15-f	PFG-0032A	ハンドリム チタン長円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0	取付BTセット付
6-16-a	AFE-0102B	着脱車軸 A1	TW、スピナジー・エブリデー/ライトエクストリーム、ライトホイール	
6-16-b	AFE-0104B	着脱車軸 A2	スピナジー・SPORT	
6-16-c	AFE-0105A	着脱車軸 A3	ミスノ・カーボンホイール	
6-21	PFZ-0024A	バンドブレーキ取付アタッチメント MS 固定軸	アタッチメント(VD3YR011C-001)、丸座金 12.5x26x23	
6-22	PFA-1010A	車輪のみASSY 501 NBK_固定軸	車軸用NTセット付	
6-23	PFA-1011A	車輪のみASSY 540 NBK_固定軸	車軸用NTセット付	
6-24	PFZ-0025A	バンドブレーキ取付アタッチメント MS バンド軸	アタッチメント(VD3YR011C-001)	
6-25	PFA-1012A	車輪のみASSY 501 NBK_バンド軸	車軸用NTセット付	
6-26-R	PHB-0007A	NUW-2ブレーキレバー(R)		
6-26-L	PHB-0008A	NUW-2ブレーキレバー(L)		
6-26-1	SJA-0072A	ブレーキレバー取付用カラー φ19	VZ17-025 押手φ19時に使用	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
6-27-R	SHA-0003A	内拡式ドラムブレーキ本体・ZN(R) ZSP06601-00	アシスタターBT、ダルマネジセット付	
6-27-L	SHA-0004A	内拡式ドラムブレーキ本体・ZN(L) ZSP06601-00	アシスタターBT、ダルマネジセット付	
6-28-a	PJK-0010A	ワイヤー_エンド L:730-930(両キャップ)		
6-28-b	PJK-0017A	ワイヤー_エンド L:830-1030(両キャップ)		
6-29	PFA-1013A	車輪のみASSY 540 NBK_バンド軸	車軸用NTセット付	