

パーツリスト



NCT-VS

Ver.2


▼改訂履歴

バージョン	改訂年月日	改定内容
Ver. 1	2025年 9月22日	初版
Ver. 2	2026年3月2日	4-9-R(L) 適用修正


▼ご注意

※ 当機種は新車製作時に特注・改造などのご注文を承っています。
そのため、現在ご使用中の部品とパーツリスト部品が異なる場合がございますので
パーツをご発注時にはご注意願います。


NCT-VS
フレーム部 - 1

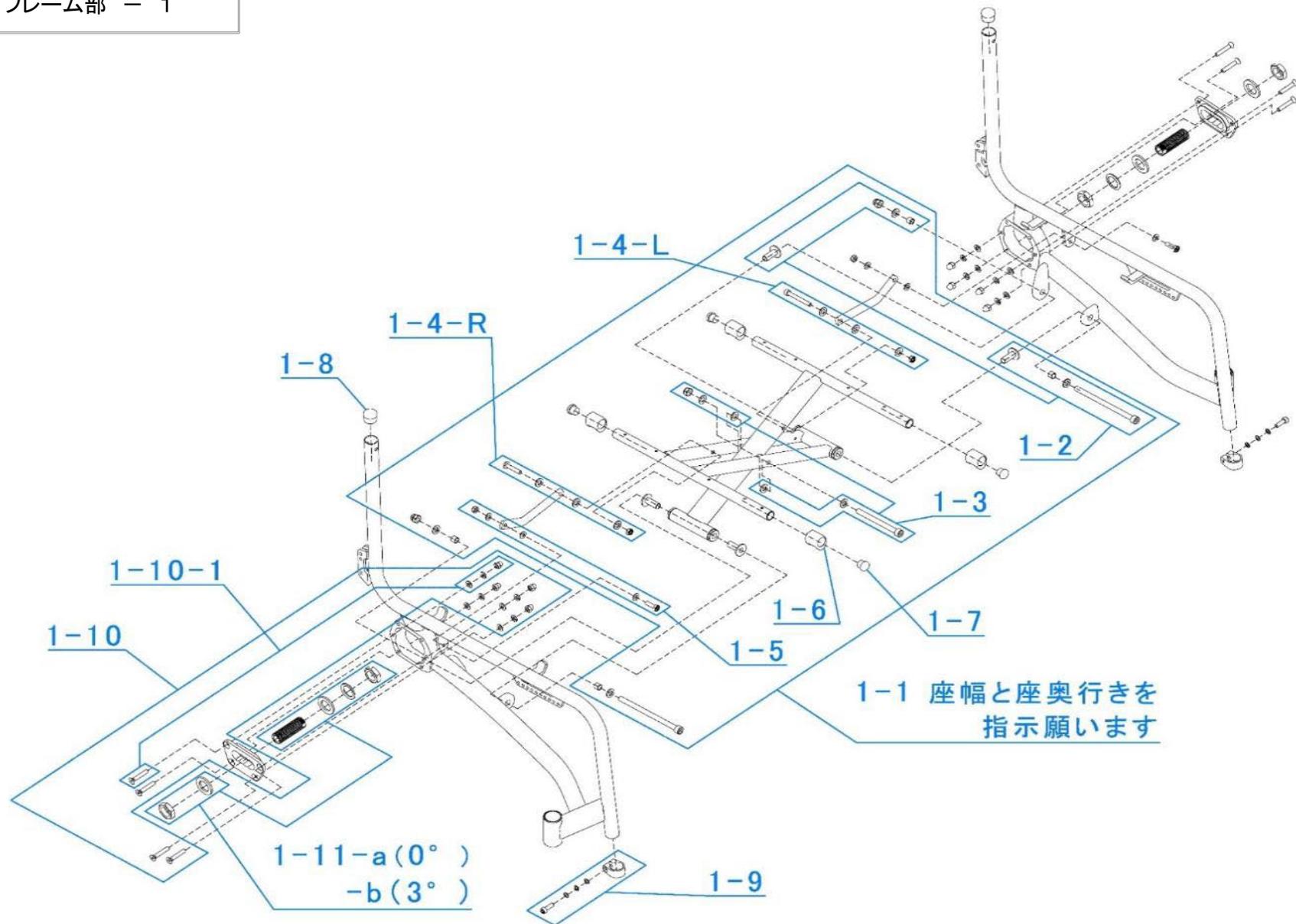



NCT-VS
キャスター部 - 1

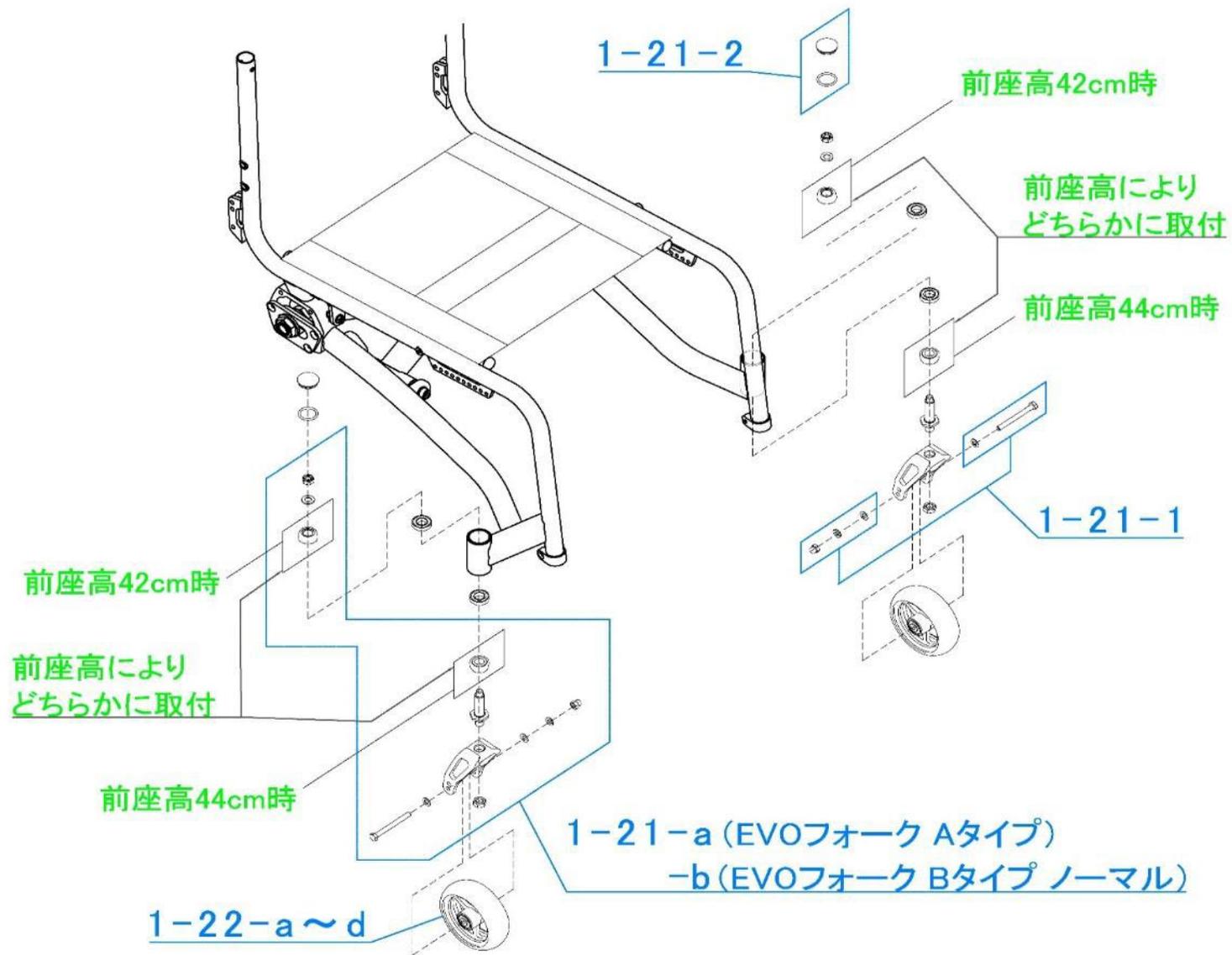


NCT-VS
キャスター部 - 2

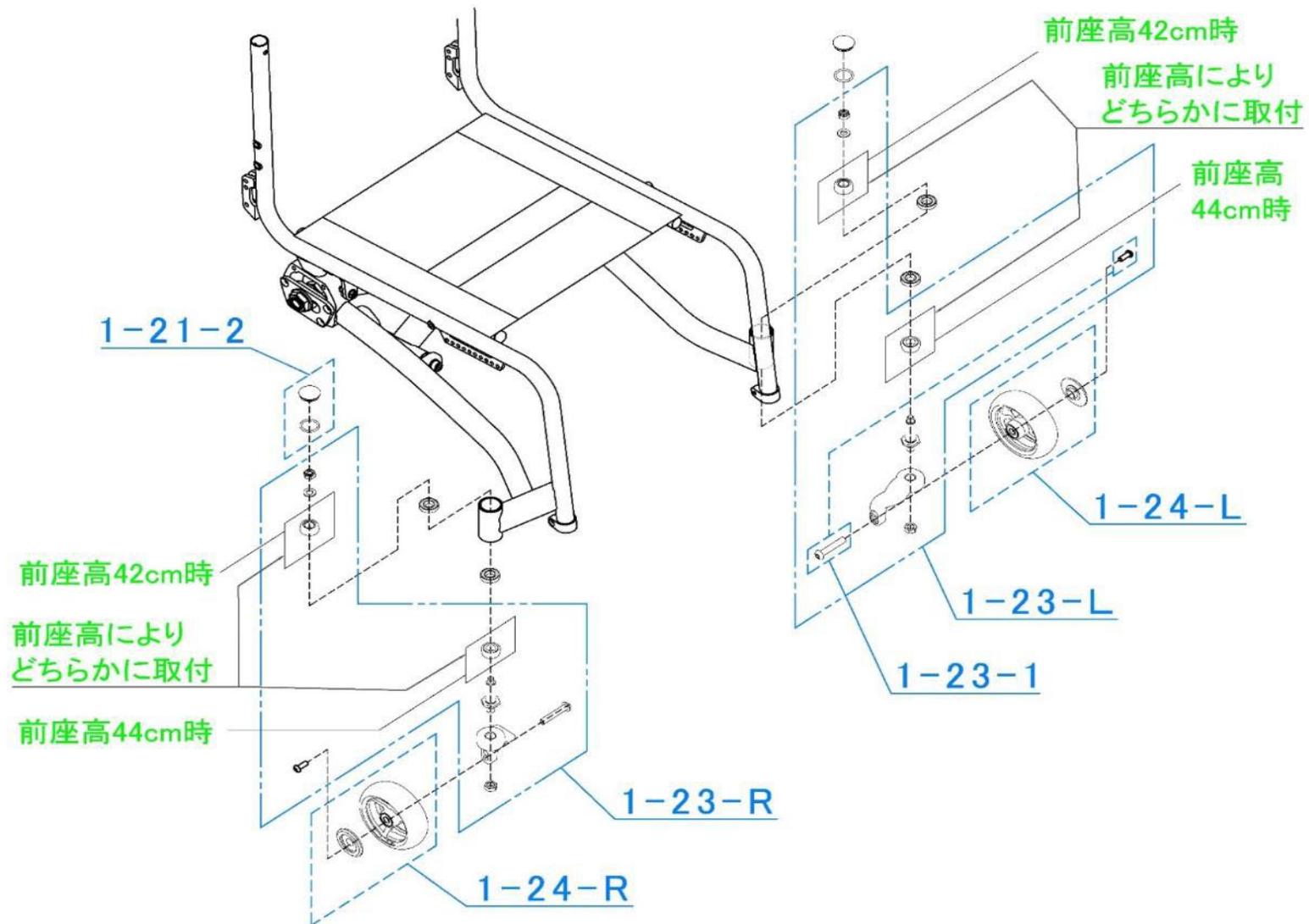

NCT-VS
側板部 - 1

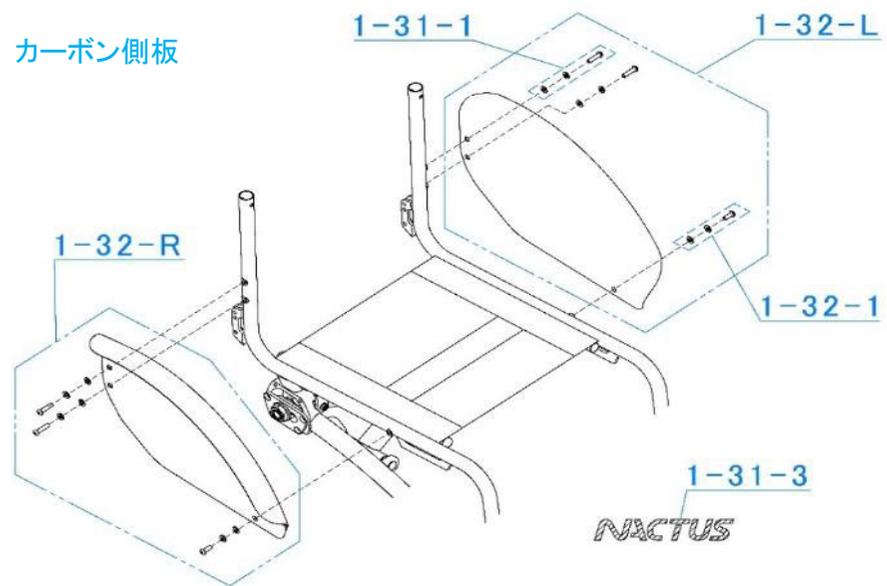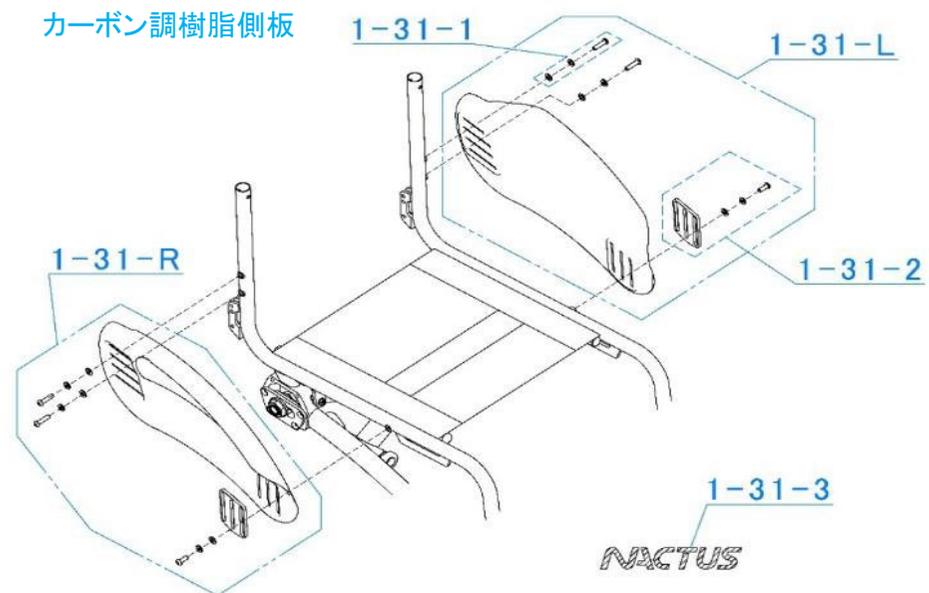


NCT-VS
アームサポート部 - 1

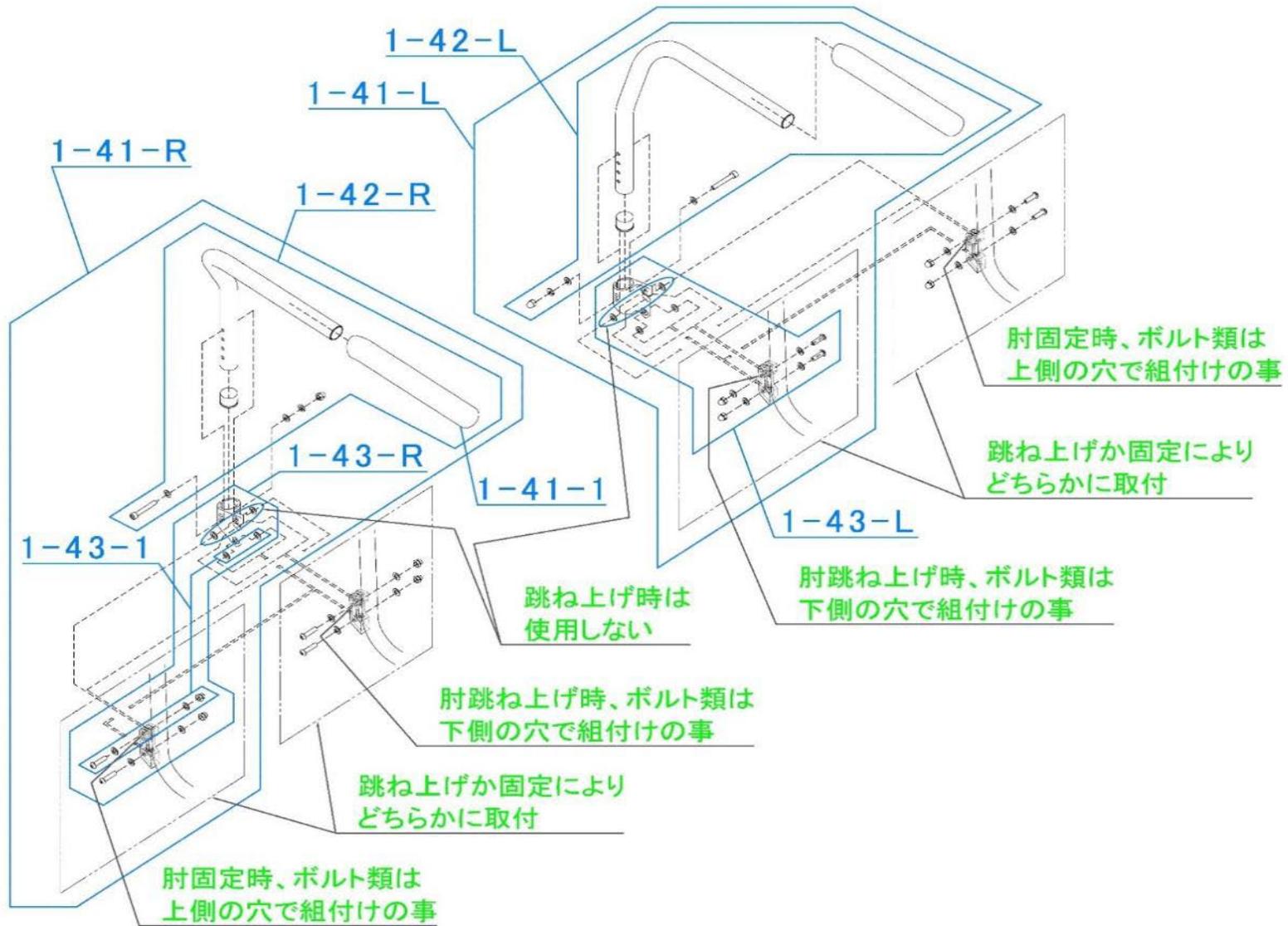


NCT-VS
押手部 - 1


アール押手

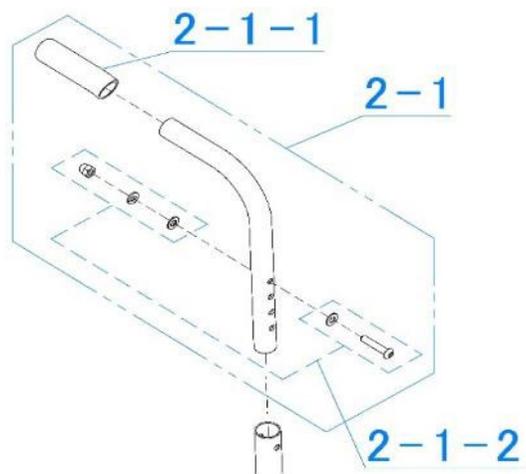


直角押手

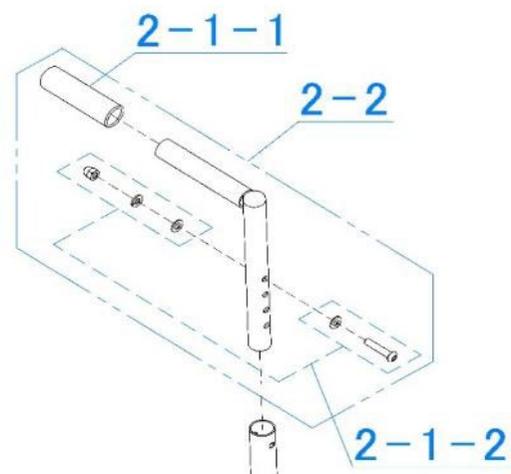

中間押手

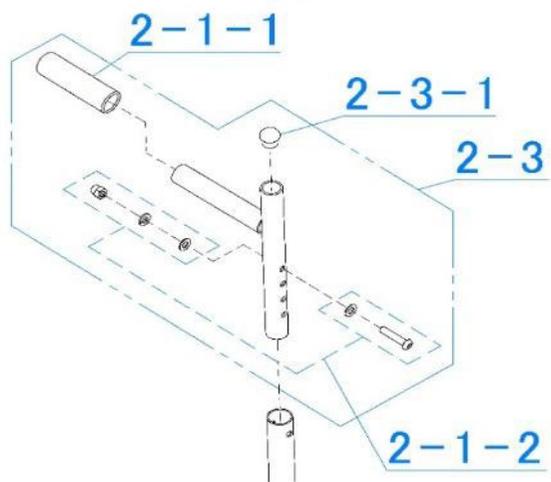


フォールディンググリップ

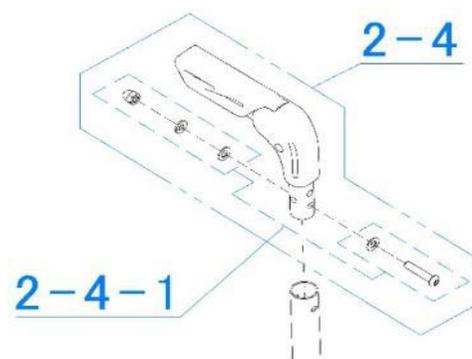

NCT-VS
ステップ部 - 1

パイプ式中折れ

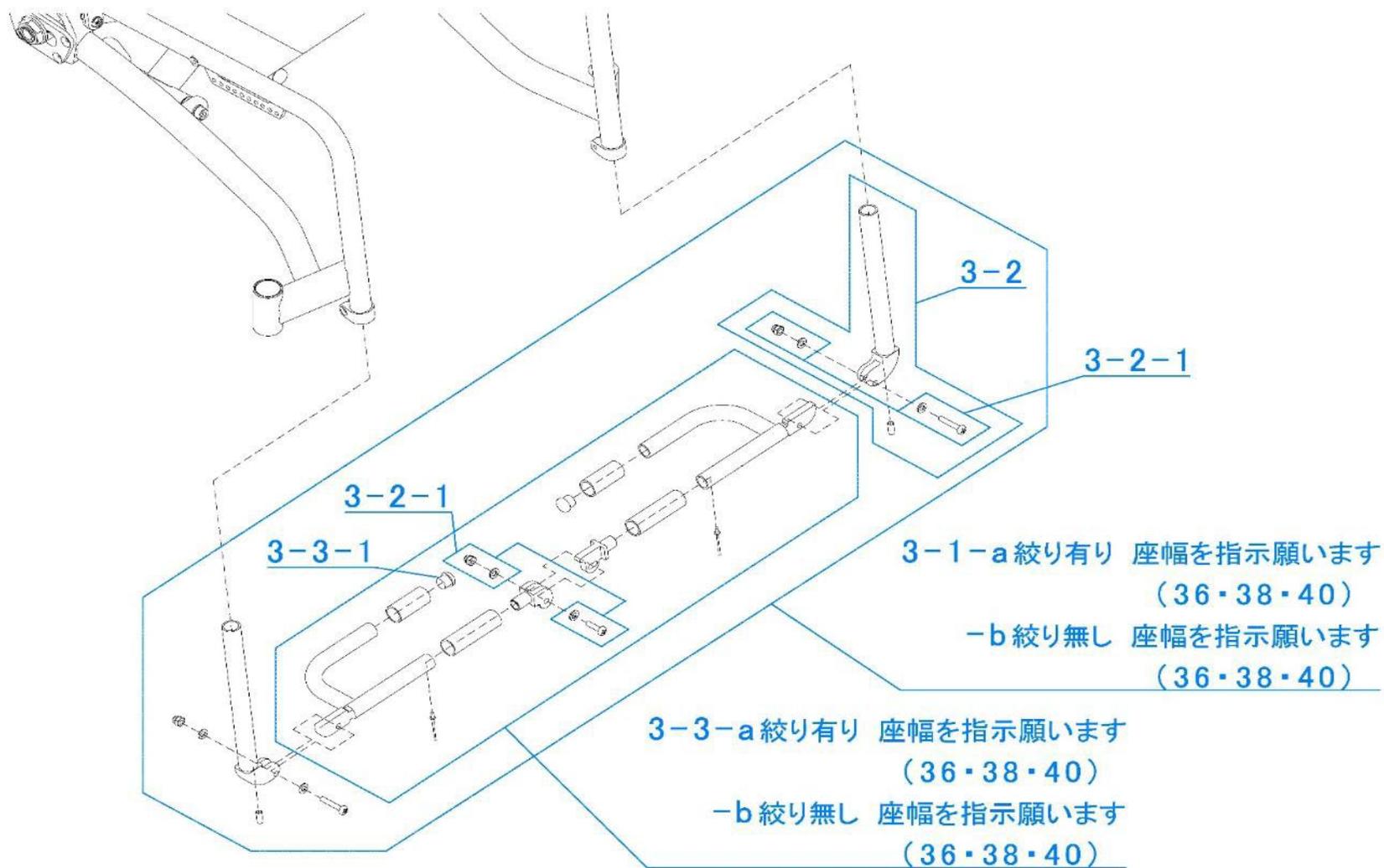

NCT-VS
ステップ部 - 2


中折れ式

3-6-L

- a 絞り有り (座幅36)
- b 絞り有り (座幅38,40)
絞り無し (座幅36)
- c 絞り無し (座幅38,40)

3-6-R

- a 絞り有り (座幅36)
- b 絞り有り (座幅38,40)
絞り無し (座幅36)
- c 絞り無し (座幅38,40)

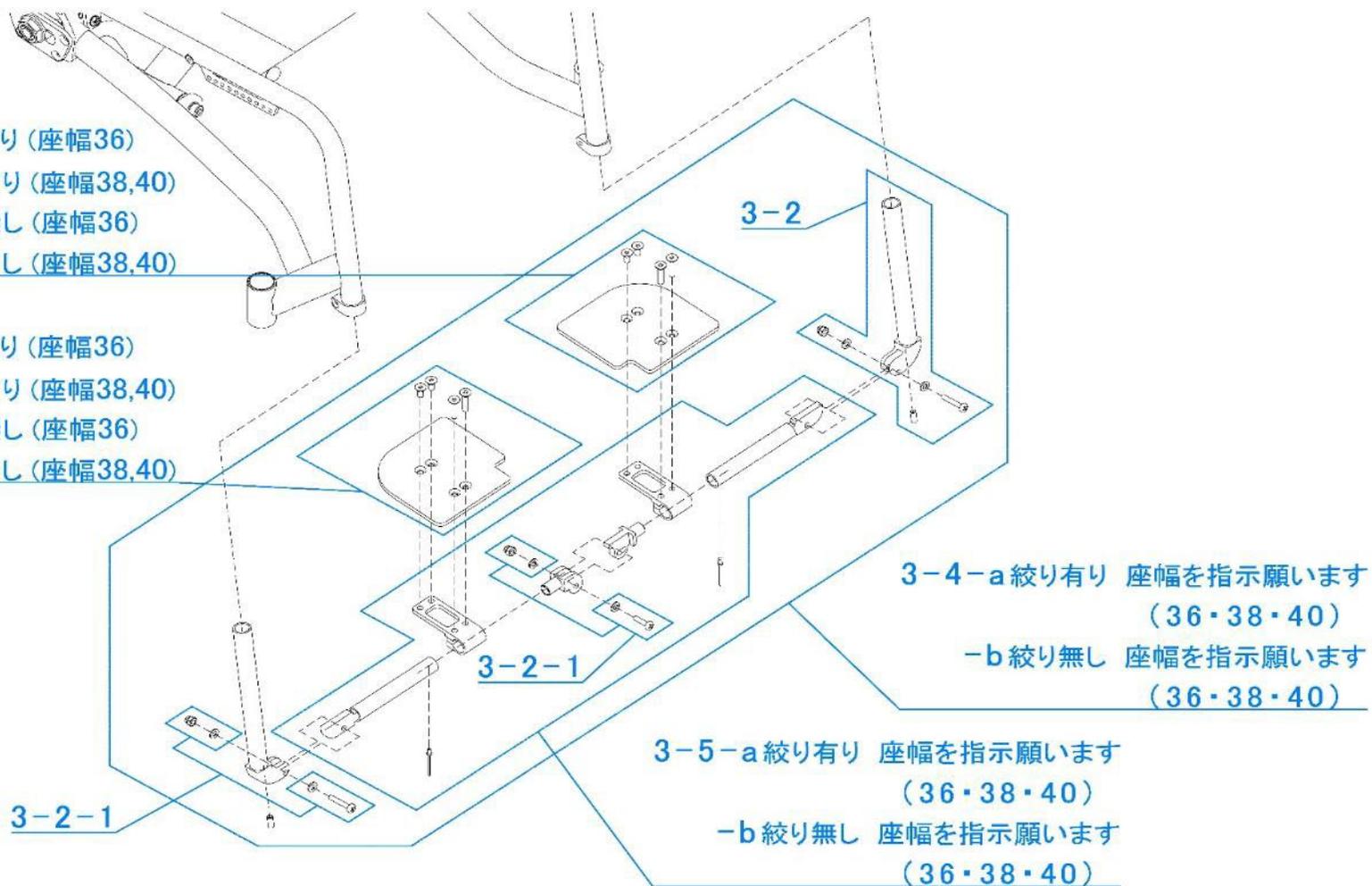


両跳ね式

3-6-L

- a 絞り有り (座幅36)
- b 絞り有り (座幅38,40)
絞り無し (座幅36)
- c 絞り無し (座幅38,40)


3-6-R

- a 絞り有り (座幅36)
- b 絞り有り (座幅38,40)
絞り無し (座幅36)
- c 絞り無し (座幅38,40)

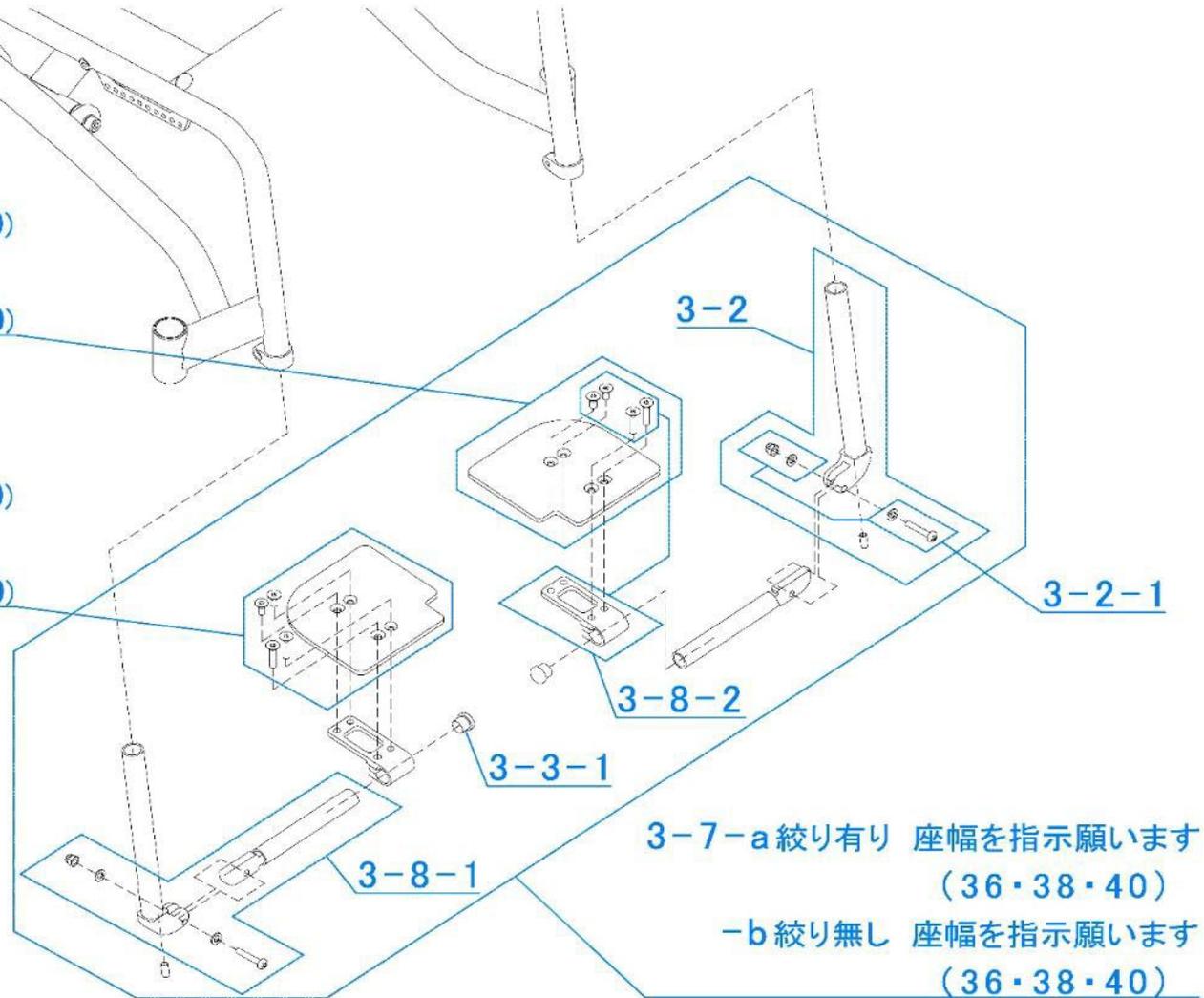



- 3-7-a 絞り有り 座幅を指示願います
(36・38・40)
- b 絞り無し 座幅を指示願います
(36・38・40)

片折れ式

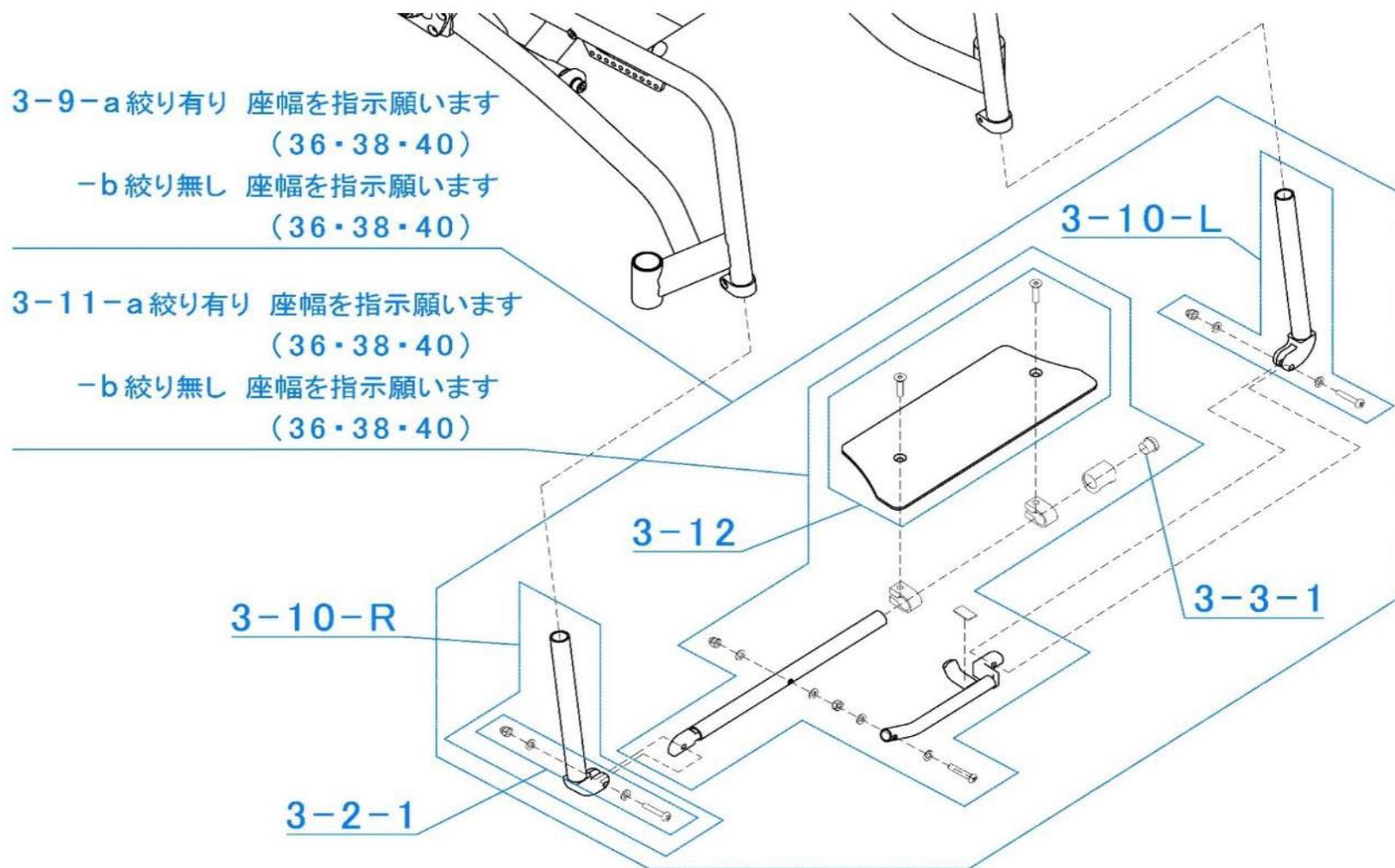


NCT-VS
ブレーキ部 - 1


NCTブレーキ

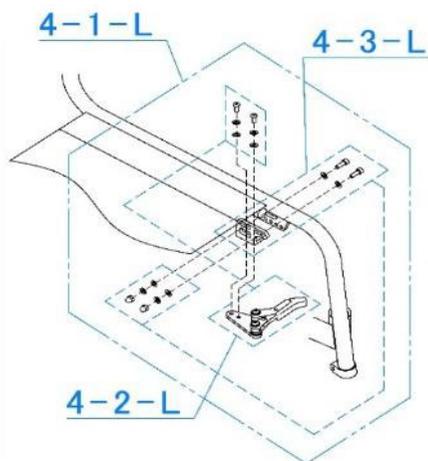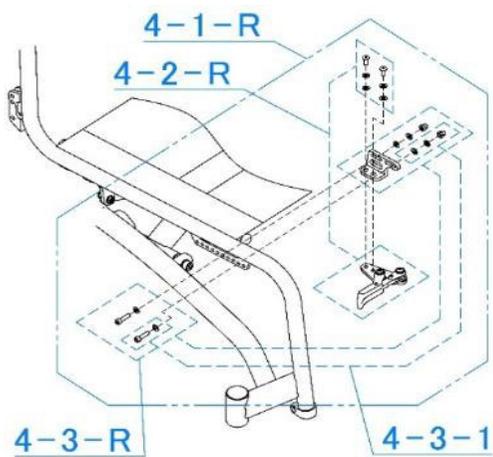


NCTブレーキ+DAアジャスタブル

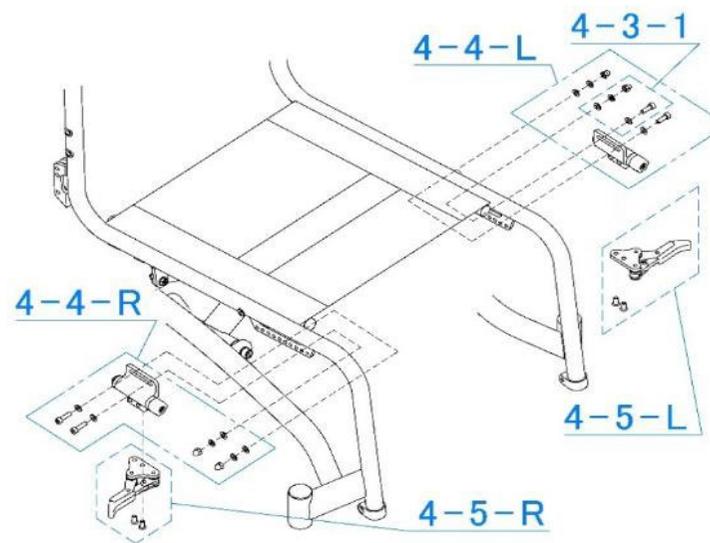


PD4ブレーキ

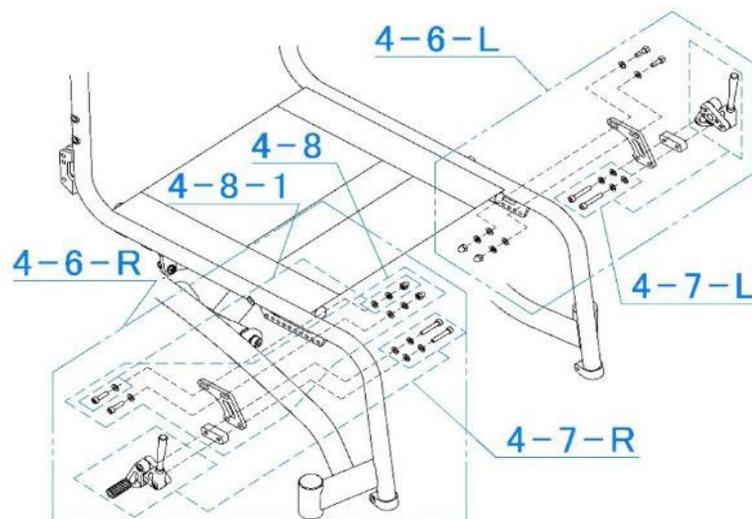

PD4ブレーキ+DAアジャスタブル

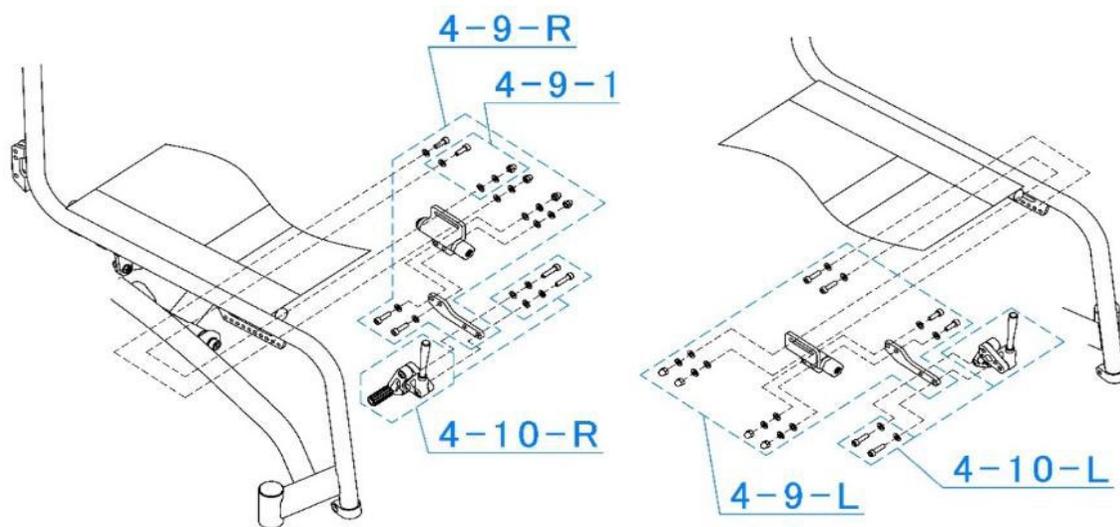


PPSブレーキ

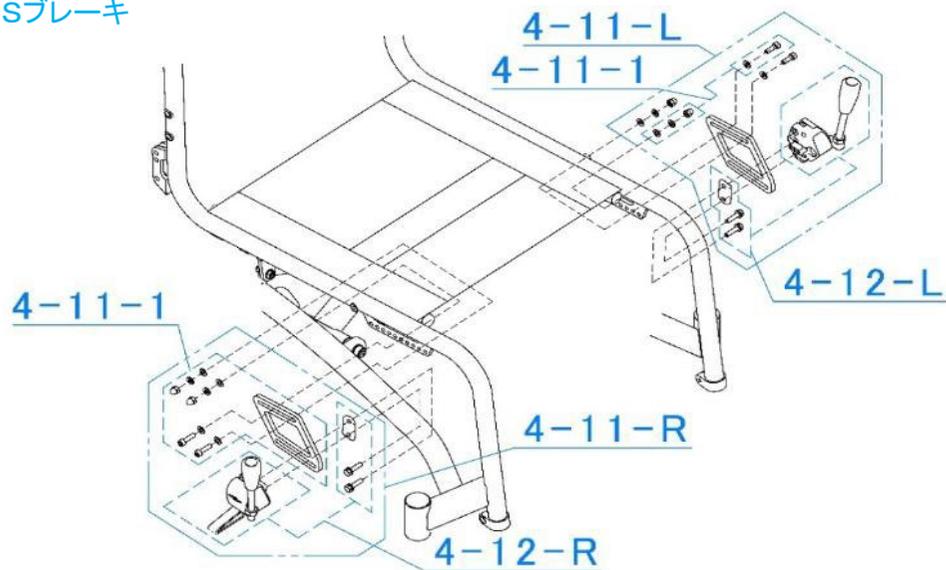


NCT-VS
シート部 - 1


5-1-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

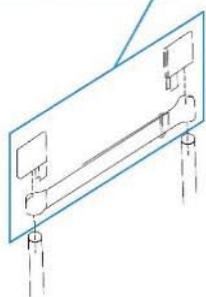


5-1-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

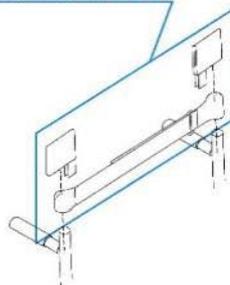


5-2-a (座幅36)
-b (座幅38)
-c (座幅40)

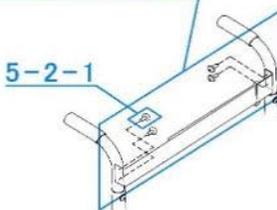


5-2-a (座幅36)
-b (座幅38)
-c (座幅40)

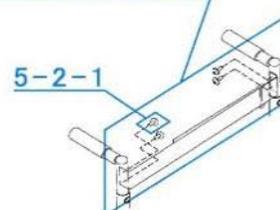


5-3-a (座幅36)
-b (座幅38)
-c (座幅40)

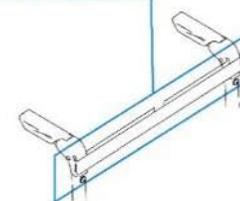


5-5-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

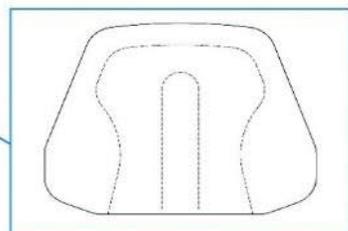

5-6-a (座幅36)
-b (座幅38)
-c (座幅40)

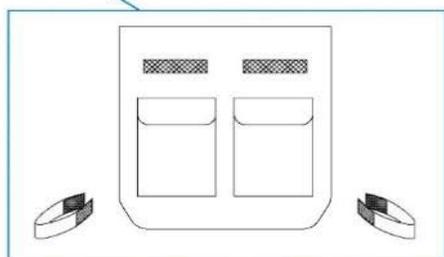


5-4-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

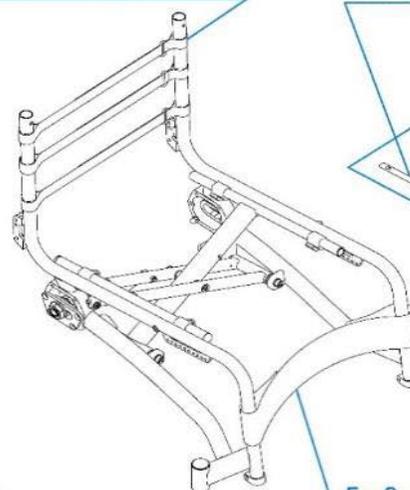


5-8-2
座奥行きを
指示願います


5-8座幅と座奥行きを
指示願います

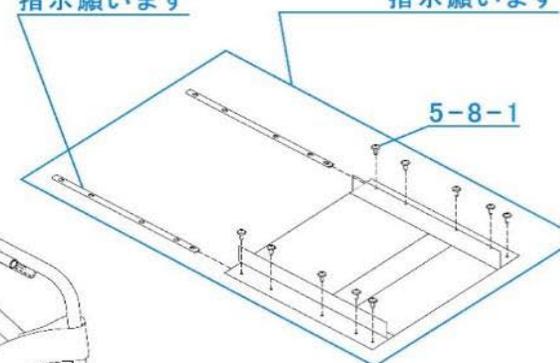


5-7-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

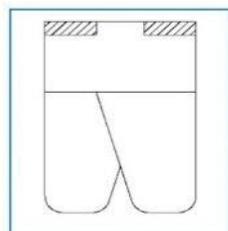

5-9-a (座幅36)
-b (座幅38,40)

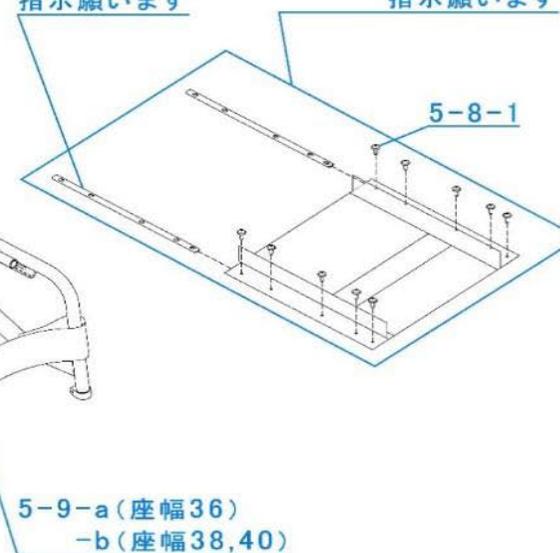

NCT-VS
車輪部 - 1

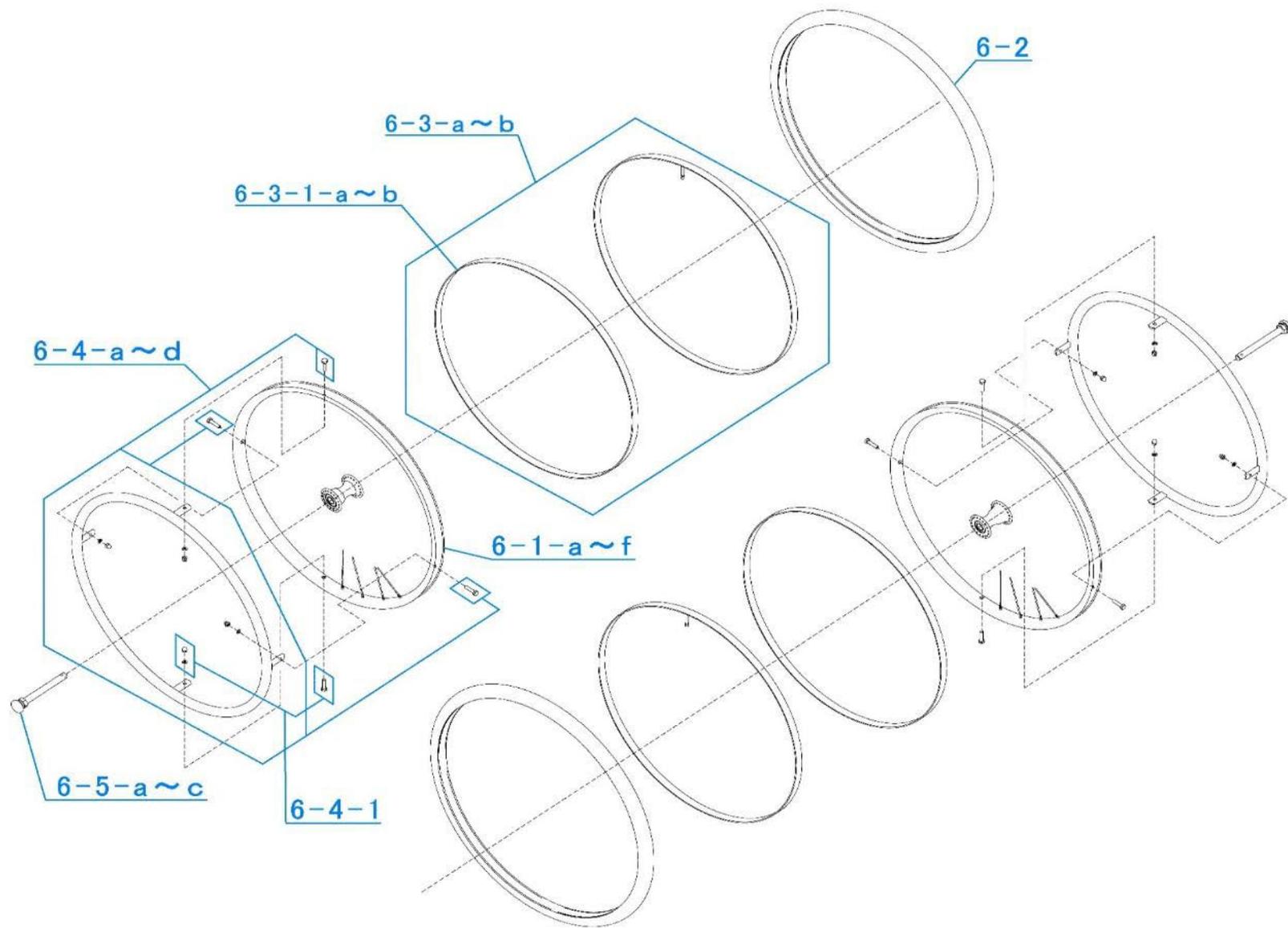

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-1	ABA-0001A	XフレームASSY VS	座幅:36~40cm 座奥行き:36~40cm指示	VX24-008.009
1-2	PJI-0200A	エックス/フレーム組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x130、平W、ブッシュ8x10x8(2個) スぺーサー(VX3YR010A)(2個)、平W、袋UNT M8 (黒)	
1-3	PJI-0201A	エックスセンター組付BTセット SDブレース NCT	CBT M8x90、平W(4枚)、UNT M8 (黒)	
1-4-R	PJI-0202A	タスキ/エックス組付BTセット 右 SDブレース NCT	十字アプセット胴太 M6x30、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-4-L	PJI-0203A	タスキ/エックス組付BTセット 左 SDブレース NCT	CBT M6x50、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-5	PJI-0045A	タスキ/背パイプ組付けBTセット (胴太M6x21 黒)	十字アプセット胴太 M6x21、平W(3枚)、UNT M6 (黒)	
1-6	SJA-0038A	エックス受け φ17用		K14-017
1-7	SJB-0022A	キャップ丸中栓J16(黒)		
1-8	SJB-0025A	キャップ丸中栓J22(黒)		
1-9	PAC-0063A	φ22用クランプ_すり割り式ASSY(M6×18) 黒	CBT(黒) M6x18・小平W M6(2枚)	VZ07-040
1-10	PFZ-0017A	車軸プレートASSY BTセット付 VS	六角穴付皿BT M6x40、平W、SW、袋NT M6 (4セット)	VD24-021
1-10-1	PJI-0204A	車軸プレート組付BTセット VS	六角穴付皿BT M6x40、平W、SW、袋NT M6	
1-11-a	PFZ-0018A	車軸ソケットASSY インチ 0°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚) 皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	VD2YR029A
1-11-b	PFZ-0019A	車軸ソケットASSY インチ 3°	NT M20xP1.5x8hx27B、平W 21x34x3(2枚) 皿ばね座金 M20、NT M20xP1.5x8hx27B	VD10-006
1-21-a	PGC-0025A	フォークASSY EVO_Aタイプ 黒 VS キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、スぺーサー(VC24-005) シャフト(VC07-006)、NT M10 BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-b	PGC-0026A	フォークASSY EVO_Bタイプ M_ノーマル 黒 VS キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、スぺーサー(VC24-005) シャフト(VC07-006)、NT M10 BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-1	PJI-0063A	キャスター車軸用BTセット M6 アルミフォーク(黒)	BT M6xP1.0x60、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
1-21-2	AAF-0011A	キャップ キャスターキャップ(VC07-005) 黒	キャップ(VC07-005)、Oリング P-20	
1-22-a	PGB-0054A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広 フォーク内々40mm用	ヘアリング、カラー 5A664000(2個)	
1-22-b	PGB-0053A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション(アルミ) フォーク内々40mm用	ヘアリング、カラー VC2YY013B(2個)	
1-22-c	PGB-0055A	キャスタ車輪ASSY 4inクッション幅広(アルミ) フォーク内々40mm用	ヘアリング、カラー 5A664000(2個)	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-22-d	PGB-0069A	キャスト車輪ASSY 4inライトニングH アルミフォーク	入荷時付属カラー(2個)	
1-23-R	PGC-0027A	フォークASSY 右 SGフォーク 黒 VS キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、スぺーサー(VC24-005) シャフト(VC07-006)、NT M10 Locking Screws(φ 7.8 L42)、M6x12	
1-23-L	PGC-0028A	フォークASSY 左 SGフォーク 黒 VS キャスター取付BT付	UNT 3種 M8、平W 8x16、スぺーサー(VC24-005) シャフト(VC07-006)、NT M10 Locking Screws(φ 7.8 L42)、M6x12	
1-23-1	PJI-0205A	キャスター車軸用BTセット M6 SGフォーク	Locking Screws(φ 7.8 L42)、M6x12	
1-24-R	PGB-0071A	キャスト車輪ASSY 右 4inクッション幅広(SG_黒) ホイルキャップ付		
1-24-L	PGB-0072A	キャスト車輪ASSY 左 4inクッション幅広(SG_黒) ホイルキャップ付		
1-31-R	PCA-0502A	サイドガード カーボン調樹脂 右 後_ナッター 補強プレート取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒) BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-31-L	PCA-0503A	サイドガード カーボン調樹脂 左 後_ナッター 補強プレート取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒) BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-31-1	PJI-0206A	サイドガード取付BTセット カーボン・カーボン調樹脂 後_ナッター式	BBT M6x25、平W、SW (黒)	
1-31-2	ACA-0003A	カーボン調樹脂側板補強プレート 取付BT付	補強プレート(VA24-013)、BBT M6x15、平W、SW (黒)	
1-31-3	SJJ-0082A	ロコンシル NACTUS		
1-32-R	PCA-0504A	サイドガード カーボン 右 後_ナッター 取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒) BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-32-L	PCA-0505A	サイドガード カーボン 左 後_ナッター 取付BT付	BBT M6x15、平W、SW (黒) BBT M6x25、平W、SW (黒)(2セット)	
1-32-1	PJI-0207A	サイドガード取付BTセット カーボン・アルミ 前_ボス式	BBT M6x15、平W、SW (黒)	
1-41-R	AAB-0045A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 右 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-L	AAB-0046A	パイプアームサポート(ホルダー付)ASSY 左 φ25_黒 グリップ付		VA09-014、VA09-015
1-41-1	PEA-0200A	PVCグリップ φ25 L300		
1-42-R	AAB-0047A	パイプアームサポートASSY 右 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付
1-42-L	AAB-0048A	パイプアームサポートASSY 左 φ25_黒 グリップ付	CBT M6x40、平W(2枚)、SW、袋NT (黒)	エンドキャップ、グリップ付

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
1-43-R	AAB-0038B	パイプアームサポートホルダー-ASSY 右 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-L	AAB-0039B	パイプアームサポートホルダー-ASSY 左 黒 取付BT付	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)(2セット)	
1-43-1	PJI-0208A	パイプアームサポートホルダー取付BTセット	CBT胴太 M6x25、平W(4枚)、SW、袋NT (黒)	
2-1	AAE-0001A	押手パイプASSY アール_φ19_L220 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-002(003)
2-1-1	SJB-0408A	グリップ CR-91		
2-1-2	PJI-0209A	押手パイプ取付BTセット φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	
2-2	AAE-0008A	押手パイプASSY 直角_φ19_L190 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-004(001)
2-3	AAE-0010A	押手パイプASSY 中間出し_φ19_L190 黒 φ22/23取付	グリップ、BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	VR25-003(001)
2-3-1	SJB-0021A	キャップ 丸中栓J19(黒)		
2-4	AAE-0012A	押手パイプASSY フォールディンググリップ φ22/23取付	BBT M6x30、平W(2枚)、SW、袋NT M6 (黒)	67325RA
3-1-a	AIA-0157A	フットサポートASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-1-b	AIA-0158A	フットサポートASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-2	PIB-0035A	フットサポートホストパイプ D19 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)	VF24-008
			袋UNT M6 (黒)、六角穴付きくぼみ先 M6x12	
3-2-1	PJI-0210A	ステップパイプ取付BTセット 中折れ	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
3-3-a	AIA-0159A	フットサポート・ステップASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-3-b	AIA-0160A	フットサポート・ステップASSY 右左(パイプ_中折れ式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-3-1	SJB-0022A	キャップ丸中栓J16(黒)		
3-4-a	AIA-0161A	フットサポートASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-4-b	AIA-0162A	フットサポートASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-5-a	AIA-0163A	フットサポート・ステップASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-5-b	AIA-0164A	フットサポート・ステップASSY 右左(プレート_中折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-6-R-a	SIC-0117A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り有り(座幅36)
3-6-R-b	SIC-0119A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り有り(座幅38・40)、絞り無し(座幅36)
3-6-R-c	SIC-0121A	フットサポートプレート 右 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り無し(座幅38・40)
3-6-L-a	SIC-0118A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW85 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り有り(座幅36)
3-6-L-b	SIC-0120A	フットサポートプレート 左 プレートD120xW105 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り有り(座幅38・40)、絞り無し(座幅36)

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
3-6-L-c	SIC-0122A	フットサポ-ト_プレート 左 プレートD120xW125 BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x10(2本)	絞り無し(座幅38・40)
3-7-a	AIA-0165A	フットサポ-トASSY 右左(プレート_両跳ね式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-7-b	AIA-0166A	フットサポ-トASSY 右左(プレート_両跳ね式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-8-1	PIB-0036A	ステップパイプ 黒 VS 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	
			絞り有り・無し、座幅を指示願います(36・38・40)	
3-8-2	PIC-0020A	プレートステップ固定用クランプ 取付BT付	六角穴付皿BT M6x10(2本)・M6x25(2本)	
3-9-a	AIA-0167A	フットサポ-トASSY 右左(片折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-9-b	AIA-0168A	フットサポ-トASSY 右左(片折れ式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-10-R	PIB-0037A	片折れポストパイプ D19 右 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-10-L	PIB-0039A	片折れポストパイプ D19 左 黒 取付BT付	十字穴付ナベ胴太 M6x30、平W(2枚)、袋UNT M6 (黒)	VF24-010
3-11-a	AIA-0169A	フットサポ-ト_ステップASSY 右左(片折れ式) 黒 VS_絞り有り	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-11-b	AIA-0170A	フットサポ-ト_ステップASSY 右左(片折れ式) 黒 VS_絞り無し	座幅を指示願います(36・38・40)	
3-12	PIC-0053A	フットサポ-ト_プレート 片折れ VS BT付	六角穴付皿BT M6x25(2本)	
			レグパイプ内々寸法を指示願います。	
4-1-R	AHA-0101A	NCTブレーキ・ステ-ASSY 右 黒 NCTブレーキステ-付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステ-取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステ-・NCTブレーキ
4-1-L	AHA-0102A	NCTブレーキ・ステ-ASSY 左 黒 NCTブレーキステ-付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	メインフレーム・ステ-取付
			BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	ステ-・NCTブレーキ
4-2-R	PHA-0283A	NCTブレーキASSY 右 黒 NCTブレーキステ-取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-2-L	PHA-0284A	NCTブレーキASSY 左 黒 NCTブレーキステ-取付用	BBT M6x12、平W、SW (黒)(2セット)	
4-3-R	AHA-0103A	NCTブレーキステ- 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-L	AHA-0104A	NCTブレーキステ- 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB25-004
4-3-1	PJI-0211A	NCTブレーキステ-取付BTセット	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)	
4-4-R	AHA-0105A	DAアジャスタブル 右 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-4-L	AHA-0106A	DAアジャスタブル 左 黒 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-5-R	PHA-0285A	NCTブレーキASSY 右 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	
4-5-L	PHA-0286A	NCTブレーキASSY 左 黒 DAアジャスタブル取付用	極低頭六角穴付BT M5x10(2本) (黒)	

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
4-6-R	AHA-0107A	PD4ブレーキ・ステアASSY 右 ブレーキステア・スパーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB3YR010B、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-6-L	AHA-0108A	PD4ブレーキ・ステアASSY 左 ブレーキステア・スパーサー(t10)付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	VB3YR010B、VZ18-024
			CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-R	PHA-0287A	PD4ブレーキASSY 右 スパーサー(t10)付	スパーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-7-L	PHA-0288A	PD4ブレーキASSY 左 スパーサー(t10)付	スパーサー(VZ18-024)、CBT M5x25、平W、SW (黒)(2セット)	
4-8	PHZ-0076A	ブレーキステア VB3YR010 黒 取付BTセット付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
4-9-R	AHA-0109A	DAアジャスタブル 右 黒 ブレーキステア_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステア、CBT M6x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB24-024)
4-9-L	AHA-0110A	DAアジャスタブル 左 黒 ブレーキステア_PD 取付BT付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	
			ブレーキステア、CBT M6x20、平W、SW (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB24-024)
4-10-R	PHA-0251A	PD4ブレーキASSY 右	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-10-L	PHA-0252A	PD4ブレーキASSY 左	CBT M5x15、平W、SW (黒)(2セット)	
4-11-R	AHA-0111A	PPSブレーキ・ステアASSY 右 短(黒) ブレーキステア付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB10-002)
4-11-L	AHA-0112A	PPSブレーキ・ステアASSY 左 短(黒) ブレーキステア付	CBT M5x15、平W(2枚)、SW、袋NT M5 (黒)(2セット)	ブレーキステア(VB10-002)
4-12-R	PHA-0165C	PPSブレーキASSY_ZN 右 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
4-12-L	PHA-0166C	PPSブレーキASSY_ZN 左 短(黒)	取付バー・6角BT、M5x20、SW (2セット)	
5-1-a	PDB-0043A	背インナーベルト・トップASSY ハイポイント 座幅33-36(ベルトL38) 緩衝カバー付	VS09-062(000)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	座幅36用
5-1-b	PDB-0044A	背インナーベルト・トップASSY ハイポイント 座幅37-40(ベルトL46) 緩衝カバー付	VS09-062(001)、緩衝カバー(VS24-036)2枚	座幅38・40用
5-2-a	PDB-0045A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅36(ベルトL49)	VS24-032A(001) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-b	PDB-0046A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅38(ベルトL51)	VS24-032A(002) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-c	PDB-0047A	背インナーベルト・トップASSY 当て式 座幅40(ベルトL53)	VS24-032A(003) トラスA5x16(W付) 4本	
5-2-1	PDZ-0011A	座シートビスセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-3-a	SDB-0064A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅36(ベルトL71)	VS24-034(001)	座幅36用
5-3-b	SDB-0065A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅38(ベルトL75)	VS24-034(002)	座幅38用
5-3-c	SDB-0066A	背インナーベルト・トップ フォールディングG 座幅40(ベルトL79)	VS24-034(003)	座幅40用
5-4-a	SDB-0074A	背インナーベルト 座幅33-36(ベルトL58.5 W2.5)	VS17-021(005)	座幅36用
5-4-b	SDB-0075A	背インナーベルト 座幅37-40(ベルトL64.5 W2.5)	VS17-021(006)	座幅38・40用

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
5-5-a	SDE-0296A	バックサポ-トクッション Urban 座幅33-36(W49)	VS17-015(001)	
5-5-b	SDE-0297A	バックサポ-トクッション Urban 座幅37-40(W53)	VS17-015(002)	
5-6	SDE-0298A	背シートアウター・ポケット NCT モケット インナーベルト2付	座幅、ポケット、フタ仕様を指示願います	インナーベルト2(VS09-059)
5-7-a	SDE-0299A	カバーシート 座幅33-36(W28)	VS09-056(001)	座幅36用
5-7-b	SDE-0300A	カバーシート 座幅37-40(W32)	VS09-056(002)	座幅38・40用
5-8	PDC-0237A	座シートASSY VS	座幅:36~40cm 座奥行き:36~40cm指示	芯金:VS07-009
			芯金、ビス付	
5-8-1	PDZ-0011A	座シートビスセット トラスA5×16(W付)	1本	
5-8-2-a	SDZ-0031A	座シート芯金 鉄 5穴 L320	VS07-009(000)	座奥36・37用
5-8-2-b	SDZ-0032A	座シート芯金 鉄 5穴 L340	VS07-009(001)	座奥38・39用
5-8-2-c	SDZ-0033A	座シート芯金 鉄 5穴 L360	VS07-009(002)	座奥40用
5-9-a	SDF-0202A	レグベルト モケット 座幅33-36(L86)	VS09-064(001)	
5-9-b	SDF-0203A	レグベルト モケット 座幅37-40(L90)	VS09-064(002)	
6-1-a	PFA-1002A	車輪のみASSY 540 TW_脱着		
6-1-b	PFA-1003A	車輪のみASSY 540 スピナジー・エブリデー	黒・白	
6-1-c	PFA-1004A	車輪のみASSY 540 スピナジー・SPORT	黒・青・黄	
6-1-d	PFA-1005A	車輪のみASSY 540 スピナジー・ライトエクストリームLight	黒・白・赤・橙	
6-1-e	PFA-1006A	車輪のみASSY 540 ライトホイール		
6-1-f	PFA-1007A	車輪のみASSY 540 ミスノ・フルカーボンホイール ハンドリム付		
6-2	SFB-0045A	タイヤ ニュートロスベックS2 23-540 グレー		
6-3	PFC-0020A	チューブ ニュートロン 20~25-540 米式		
6-3-1	PFC-0109A	リムテープ ターポリン 540		
6-4-a	PFG-0027A	ハンドリム アルミφ19 540 TW シルバー	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-4-b	PFG-0028A	ハンドリム ステンφ19_ビニールコーティング 540 TW	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-4-c	PFG-0029A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 TW	間隔:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0	取付BTセット付
6-4-d	PFG-0030A	ハンドリム アルミφ19_ハードアルマイト 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-4-e	PFG-0031A	ハンドリム アルミ楕円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0、1.5	取付BTセット付
6-4-f	PFG-0032A	ハンドリム チタン長円 540 スピナジー・ライトホイール	間隔:0.5、1.0	取付BTセット付

図番号	部品番号	部品名称	適用	備考
6-4-1-a	PJI-0004A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x10)	6角アプセットM5x10、平W、SW・袋NT M5	TW:ステン・ビニールコーティング
6-4-1-b	PJI-0212A	ハンドリム取付用 BTセット (M5x12)	6角アプセットM5x12、平W、SW・袋NT M5	TW:アルミφ19
				スピナジー・エブリデー/SPORT:アルミ、チタン
6-4-1-c	PJI-0213A	ハンドリム取付用 BTセット (BBT M5x12)	BBT M5x12、SW、平W	スピナジー・ライト、ライトホイール:チタン
6-4-1-d	PJI-0214A	ハンドリム取付用 BTセット (BBT M5x15)	BBT M5x15、SW、平W	スピナジー・ライト、ライトホイール:アルミ
6-5-a	AFE-0102B	着脱車軸 A1	TW、スピナジー・エブリデー/ライトエクストリーム、ライトホイール	
6-5-b	AFE-0104B	着脱車軸 A2	スピナジー・SPORT	
6-5-c	AFE-0105A	着脱車軸 A3	ミスノ・カーボンホイール	